

⚠ ガイデッドサージェリーを適用する際のご注意


ガイデッドサージェリーは口腔内の状況によりガイドを作成できない、もしくはガイドを装着した状態で指定のドリルを使用することができない場合があります。このため口腔内の状況及びインプラントの設計方針によっては本システムで対応できない場合もありますのでご注意ください。

また、本システムで対応できない場合でも、iCAT社の“シングルガイドとドリル”を使用することで、ガイデッドサージェリー（パイロットドリルのみ）を適用できる場合もあります。

症例ごとにご相談はiCAT社までお問い合わせください。

上記の状況が生じやすい次のケースでは、iCAT社シングルガイドでの作製をお勧めいたします。

- ◆ 6～8番へ8mm長インプラントを埋入する場合。
ガイド高さ（スリーブ位置）が高くなる。（右図A参照）。
- ◆ 13mm長のインプラント埋入で、骨状況によりガイドの厚みや必要なスリーブ長が確保できない場合。（右図B参照）。

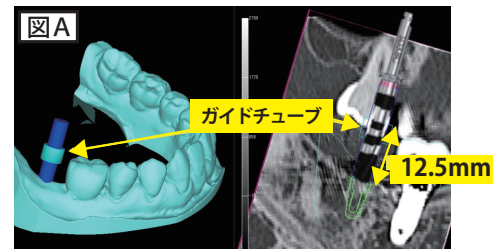

注文書

電話
番号

FAX
番号

診療所名

ご芳名

〒

都 道
府 県

市 区
郡

メールアドレス

商品コード

商品名

価格

注文数

003-G-HK

ガイデッドサージェリーハンドルキットLG/IA

180,000円（税込198,000円）

備考 ※送付先が上記と異なる場合はご記入ください。

一般的名称：歯科用インプラント手術器具 販売名：ガイデッドサージェリー ツール 一般医療機器 届出番号：13B1X00053AD0013

● 商品の発送

ご注文いただきました商品は宅急便にて発送いたします。午後3時までのご注文は当日発送、午後3時以降のご注文につきましては翌日発送となります。また、ご注文品の在庫がない場合は、弊社より納期をご連絡いたします。あらかじめご了承ください。

● 製品の交換について

製品の交換は、製品到着後6ヶ月以内とさせていただきます。（製品が未開封、パッケージに損傷の無い物、滅菌期限1年以上の物に限りです）

● 製品の返品について

返品は、お買い上げ製品がご注文の品と異なる場合、または破損や汚損している場合に限り、お受けいたします。製品の返品は、製品到着後14日以内とさせていただきます。（製品が未開封、パッケージに損傷の無い物に限りです）

● 配達料

送料は基本的に負担いたしますが、1回のご注文が10,000円未満（税別）の場合は送料をご負担いただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。タイム便については別途料金が必要となります。

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。表示価格は全て希望小売価格となります。



インプラテックス
Implant Direct社製品保証プログラム

Implant Direct社製品を安心して
お使いいただけるよう、弊社では
「インプラテックス Implant Direct社製品
保証プログラム」をご提供しております。
詳細はお問い合わせください。

ご注文は
24時間受付

FAX: 03-5850-8505

(株式会社インプラテックス 東京本社)

●ご記載頂いた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。www.itx.co.jp

製造販売元



製造元



※商品の詳細は(株)インプラテックスまでお問い合わせください。

〒116-0013東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00～17:00にお願いいたします。
歯科器具・インプラント材料・セミナー
インプラテックス 検索



202103 GS_1.5K

Next Premium Implant



Legacy™ System

レガシー システム



InterActive™

インタラクティブ

Guided Surgery

ガイデッドサージェリー




SIMPLY SMARTER



インプラテックス
Implant Direct社製品保証プログラム

レガシー／インタラクティブ用 ガイデッドサージェリーの必要器材

■ ガイデッドサージェリーハンドルキットLG/IA 商品コード003-G-HK 標準価格：180,000円(税込198,000円)

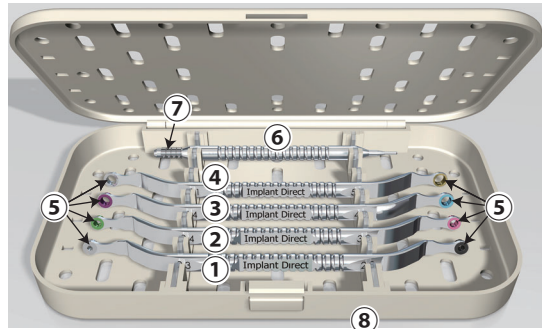


- セット構成**
- ① ガイデッドサージェリー ハンドル 2.3-2.8
 - ② ガイデッドサージェリー ハンドル 3.4-3.8
 - ③ ガイデッドサージェリー ハンドル 4.4-4.8
 - ④ ガイデッドサージェリー ハンドル 5.1-5.4
 - ⑤ ガイデッドサージェリー ドリルアダプター 8種 各1個
(φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm)
 - ⑥ ガイデッドサージェリー ツール
 - ⑦ ガイデッドサージェリー スペーサー 4個
 - ⑧ ガイデッドサージェリー トレイ

※本キットはレガシー／インタラクティブインプラントシステム外科用ドリルに適合したガイデッドサージェリー ハンドル4本組のキットです。

■ Implant Direct社 ブラックドリル

⚠ 旧タイプのドリルではご使用いただけません。

※旧タイプのドリルにはハブが無く、サージカルガイドのサージカルガイドスリーブで止まりません。

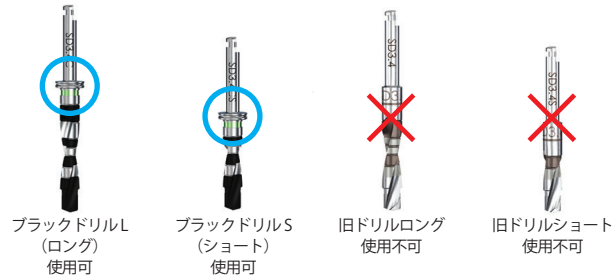

ドリル長と穿孔できるインプラント長の関係

ブラックドリルL⇒対応インプラント：8mmL、10mmL、11.5mmL、13mmL

ブラックドリルS⇒対応インプラント：6mmL

⚠ 非対応インプラント長：16mmL

※本システムは 16mmL インプラントの穿孔には対応していません。

ブラックドリルL (ロング)	ブラックドリルS (ショート)
対応インプラント	対応インプラント
8mmL 10mmL 11.5mmL 13mmL	6mmL

オプション

商品コード 310-15000

■ T's BS フラットドリル GS

標準価格：12,000円
(税込13,200円)


起始点周囲をフラットにします。



使用方法

- ① φ2.3mmドリル使用前に、ガイドハンドルのφ2.8を使用し、フラットドリルを使って1～3mm穿孔し、起始点周囲(φ2.8mmの範囲)をフラットにする。
- ② ガイドハンドルのφ2.3を使用し、φ2.3mmドリルでドリルのハブまで穿孔する。
- ③ ガイドハンドルのφ2.8を使用し、φ2.8mmドリルでドリルのハブまで穿孔する。
- ④ 以下同様に、必要なドリル径まで拡大・穿孔する。

使用ソフトについて

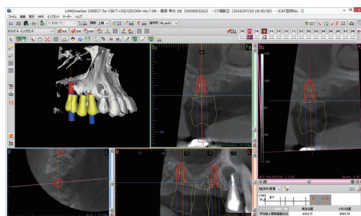

インプラントシミュレーションソフト

LANDmarker®
ランドマーカ®

株式会社アイキャット

ランドマーカ®は弊社でも取扱いしております。

詳細のお問合せ、ご注文は弊社または営業担当者までご相談ください。

電話：03-5850-8555

受付時間：9:00～17:00(土日祝日は除く)

一般的名称：汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム 販売名：ランドマーカ 管理医療機器 認証番号：227AHBZX00029000

ガイデッドサージェリー用ガイド発注先

Implant Direct社純正サージカルガイドスリーブを装備したレガシー／インタラクティブインプラント用のサージカルガイドは、iCAT社から供給されます。

※上記のiCAT社プランニングソフトウェアが必要です。

ガイデッドサージェリー用のガイドのご注文は「株式会社アイキャット」にご連絡ください。

株式会社アイキャット連絡先：フリーダイヤル ☎ 0120-167-190

受付時間：9:00～17:00(土日祝日は除く)

URL: <https://www.icatcorp.jp/>

商品説明

(GS＝ガイデッドサージェリー) 単位はmm

GS ハンドル


外科手技中に、サージカルガイドスリーブへGSドリルアダプターを保持するためのハンドルです。

各ハンドルの両端には2つのGSドリルアダプター(全8種)が装着されています。

GS ドリルアダプター

金属製のドリルアダプターはドリルの位置と角度をコントロールします。予めハンドルに装着されています。

全8種(φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm)

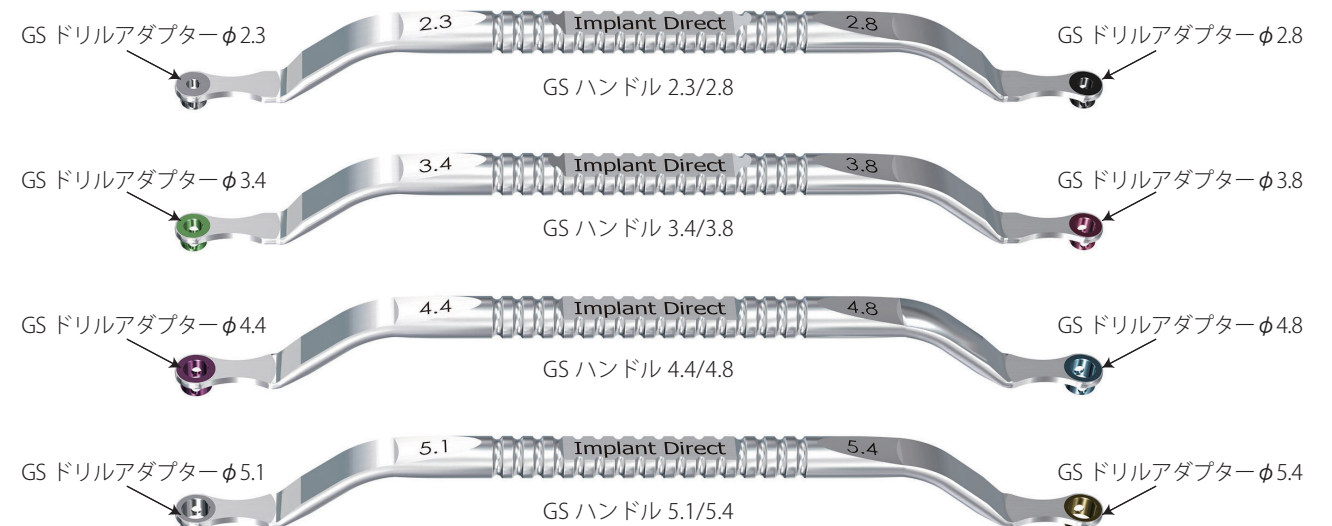

GS ツール

GSハンドルへのGSドリルアダプターの脱着に使用します。

GSドリルアダプターからGSスペーサーを取り外す際にも使用します。



GS スペーサー

金属製のリングで、小径のGSドリルアダプターを大径のサージカルガイドスリーブに適合させるためのツールです。

右図のようにGSツール先端にはめ込んで収納します。



本システムのポイント

●お手持ちのレガシー／インタラクティブインプラント埋入用外科キット内の各ブラックステップドリルと併せてお使いいただくことで、インプラントのプランニングソフトウェア※で設計した埋入計画通りの方向・深度でのインプラント窩の形成が可能です。

※インプラントのプランニングソフトウェアは、日本国内では株式会社アイキャットの「ランドマーカ®」を使用し、同社のサージカルガイドをご利用ください。(左記)

●お手持ちのレガシー／インタラクティブインプラント埋入用外科キットが利用でき、少ない投資でガイデッドサージェリーが始められます。

※ガイドを利用しての埋入操作はできません。

※ガイドを利用してのCBDドリルの穿孔はできません。

●4本のガイデッドサージェリーハンドルのそれぞれの両端には、8つのドリル径(φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm)に対応したガイデッドサージェリードリルアダプターが装着されており、レガシー／インタラクティブインプラントのドリルシーケンスに対応します。

