

vol.13
2025.9~

IMPLANT
DIRECT™
SIMPLY SMARTER

Legacy™ System

Implants | Prosthetics | Instruments

レガシーインプラントシステム カタログ・マニュアル

インプラント | 補綴 | インストルメント

ボーンレベル

SBM・HA



INTERNAL
HEX



Legacy 1

SBM



Legacy 2

SBM

HA



Legacy 3

SBM




株式会社 インプラテックス

いつも、となりに



インプラテックス
Implant Direct社製品
保証プログラム

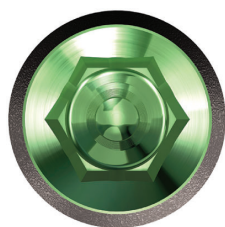

Legacy 3.5mmD Platform



Legacy™ System

レガシー システム

インプラントダイレクト レガシーシステム

製品カタログ & マニュアル

目次

目次/Implant Direct社について/カラーコードについて	2
特徴とデザイン	3
レガシー1 パッケージ/仕様/レガシーシステム共通注意事項/インプラント	4-5
レガシー2 パッケージ・仕様/インプラント	6-7
レガシー2 アバットメントセット パッケージ・仕様/セット内容	8-9
レガシー3 パッケージ・仕様/インプラント	10-11
補綴コンポーネントチャート	12-13
レガシーインプラント 歯肉プロファイルシステム	14
カバースクリュー・ヒーリングカラー・トランスファー・アナログ	15
ヒーリングカラー・トランスファー【ナロー(ストレート系)用】 取寄品	16
ヒーリングカラー・トランスファー【コンケブ用】 取寄品	17
ワイドラボ・カントウアー・チタンベース・ゴールドアバットメント	18
ストレートアバットメント 専用トランスファー/アナログ	19
テンポラリーアバットメント・スクリュー	20
スクリュー固定式アバットメント	21
ボールアバットメント/ロケーター®アバットメント	22
ロケーター®アバットメントコンポーネント・器具	23
スキャンアダプター/外科 補綴用器具	24-25
ガイドッドサージェリー	26-27
サージカルドリル(ブラックドリル)	28
インプラント埋入ドリルチャート	29
サージカルトレイコンテンツ	30
サージカルキット	31
ドリルストップキット	32
ドリルストップ 取寄品	33
埋入手術手順	34
チェアサイドでのアバットメントの形成手順・印象採得手順	35
ボールアタッチメントの取り込み方/インプラント 臨床レポート集 他	36-37
補綴コンポーネント用途一覧/サイズ詳細・カット限界の目安	38-39

Implant Direct 社について

IMPLANT
DIRECT™

SIMPLY SMARTER

Implant Direct社は2006年にGerald A. Niznick氏により創立されました。

同氏はインプラントにおいてインターナルコネクションを含む、米国特許を35も取得し、その業績に対し、米国内をはじめ世界的にも高い信頼と評価を集めています。米国カリフォルニア州に本拠地を構えるImplant Direct社は米国歯科医療分野大手Envista社のNobel Biocare systemsに属しています。

使用するインプラントのメーカーが世界規模であるということは、患者様が他国においてもメンテナンスを受けることが可能であること、安定した商品供給が受けられること等はもちろん、患者様に安心してインプラント治療を選択いただける大切なポイントにもなります。また、その製品は、患者様の負担軽減とDr.の施術のしやすさを配慮した専用パーツ・器具を多数ラインナップしています。



Implant Direct社米国工場内部



研修センター

カラーコードについて

コンポーネントや専用ツールの選択を容易にします。


インプラント直径	インプラントの直径 ドリル・サージカルトレイ のカラーコード	プラットフォームサイズの カラーコード インプラント上部パーツ選択時に使用
3.2mmD		プラットフォーム直径 3.0mmD
3.7mmD		プラットフォーム直径 3.5mmD
4.2mmD		プラットフォーム直径 4.5mmD
4.7mmD		
5.2mmD		
5.7mmD & 7.0mmD		プラットフォーム直径 5.7mmD

プラットフォーム
識別ラベルインプラント直径
識別ラベル


特徴とデザイン

特徴

- ・ ボーンレベルインプラント、チタン合金製。
- ・ インプラント周囲の骨吸収を抑えるネック部デザイン。
- ・ バットレス(鋸刃)スレッドで垂直的咬合圧を分散(レガシー2・レガシー3)。
- ・ プラットフォームはリードインベベルインターナルヘックスタイプ。
- ・ インプラントの形状、サイズ、さらに補綴パーツの豊富なバリエーションが適用範囲を拡大。
- ・ $\phi 3.2\text{mmD}$ のナロータイプ、 6mmL のショートタイプもラインナップ(レガシー2・レガシー3)。
- ・ オールインワンパッケージ(多機能キャリア・カバースクリュー・エクステンダー同梱)による、高いコストパフォーマンス。

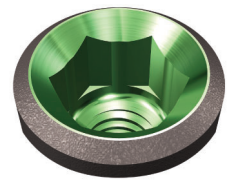

リードインベベルインターナルヘックス

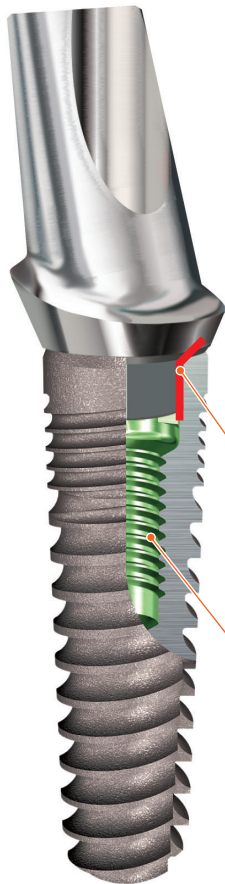


プレジジョンフィット

ベベル面での接触を含む、精度の高い連結構造を有する。

内部構造の高い接触率
スレッド同士の接触率が高く、
緩み防止・破折防止となる。

表面性状

- ・ 骨内に埋入されるボディ表面は全てSBM(可溶性ハイドロキシアパタイト粒子をプラスト)処理。ネック部にもSBM処理を施し、骨吸収を抑制する。
- ・ 高品質のHA(ハイドロキシアパタイト)を露出のリスクを抑えた部位にコーティング($40\mu\text{m}$ ・ネック部はSBM処理)し、より安全性を高める(レガシー2HAコートタイプ)。

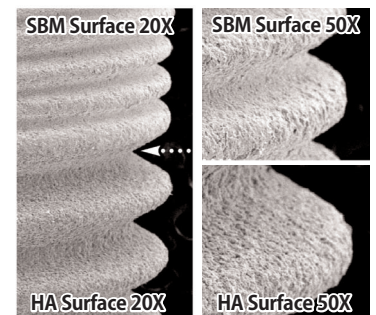


インプラントデザイン

- ・ 頭頂の 1mm 下方よりはじまるミニスレッドにより、埋入ストレスを軽減するとともに、骨吸収を抑制。
- ・ レガシー2,3は次第に深くなるバットレス(鋸刃)スレッドが、初期固定を増大させる。レガシー1は標準的なVスレッドを付与。
- ・ レガシー2とレガシー1,3ではボディのテーパ形状が異なり、骨質等に応じた選択が可能。
- ・ 埋入操作を容易にするカッティンググループ。

レガシー1


標準的なVスレッド

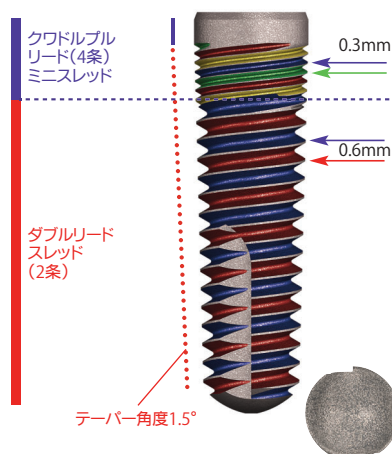

レガシー1はスレッドの内側と外側が同角度のテーパ加工となる。

レガシー2


バットレススレッド

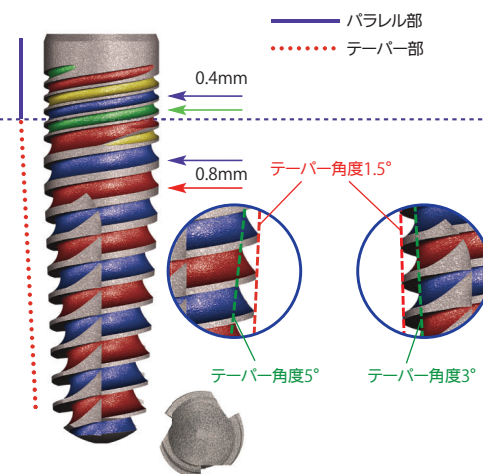

レガシー2およびレガシー3ではスレッドの内側と外側にテーパ角度で 3.5° および 1.5° の差を持たせ、先端のスレッドの深さを大きくすることで、骨への固定を高める。

レガシー3


バットレススレッド

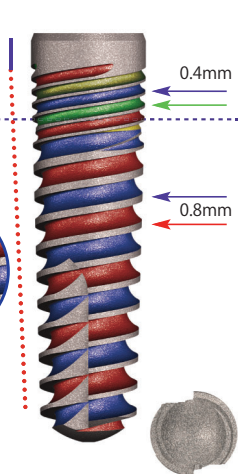

レガシーシステム共通注意事項




内バイアルは下図のように側面の半分が開放されています。インプラント体に触れないよう、ご注意ください。

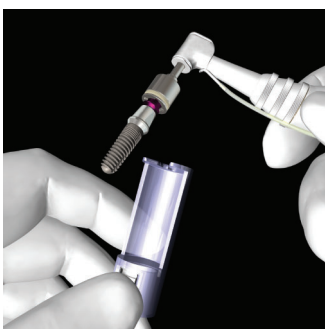

ショートインプラントの注意点:

6mmLのショートインプラント(レガシー2、レガシー3)付属のカバースクリューは、他ボディサイズのカバースクリューより短くなっています(下図参照)。他のボディサイズのカバースクリューは**使用できません**。

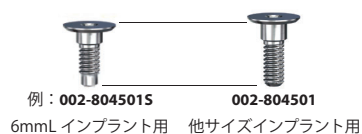



レガシー1 パッケージ

4.5mmD
Platform
804713
13mm
Length

レガシー1パッケージ

構成



- ① インプラント体
- ② キャリアー
- ③ カバースクリュー
- ④ エクステンダー (2mmH)

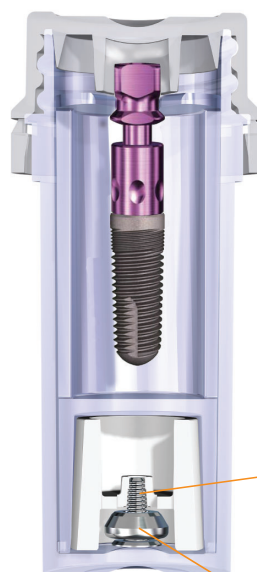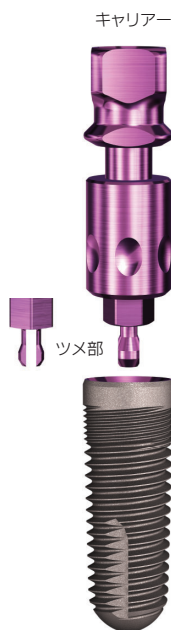


レガシー1 仕様

SBM


3.7mmD ボディ

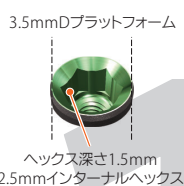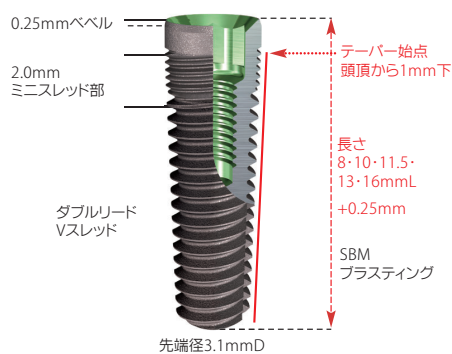



4.2mmD ボディ

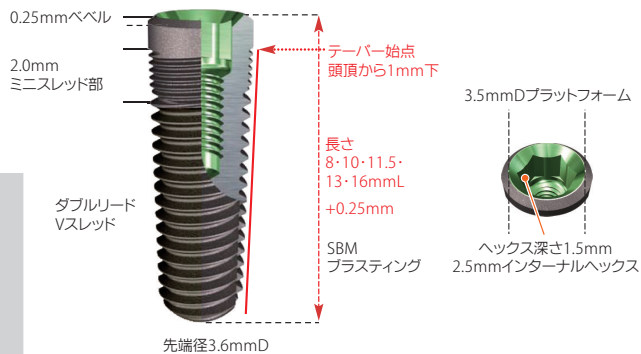

4.7mmD ボディ

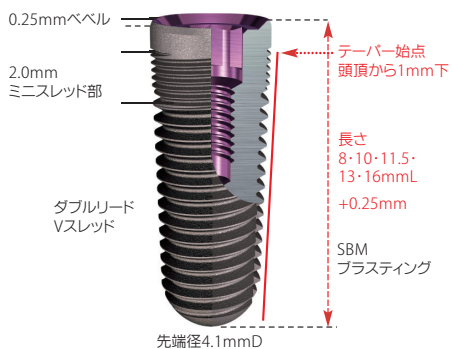

5.7mmD ボディ

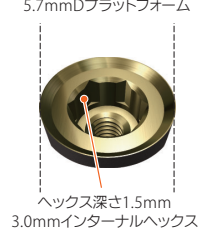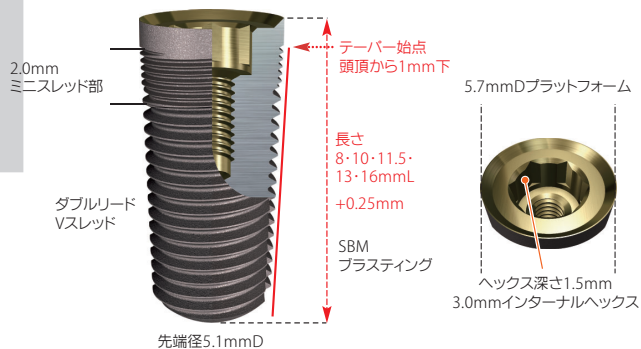

レガシー1 インプラント

各22,000円

SBM

3.7mmD ボディ

キャリアー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属

滅菌済

商品コード	直径	長さ	プラットフォーム
001-803708	3.7mmD	8mmL	3.5mmD
001-803710	3.7mmD	10mmL	3.5mmD
001-803711	3.7mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-803713	3.7mmD	13mmL	3.5mmD
001-803716	3.7mmD	16mmL	3.5mmD


8mmL

10mmL

11.5mmL

13mmL

16mmL

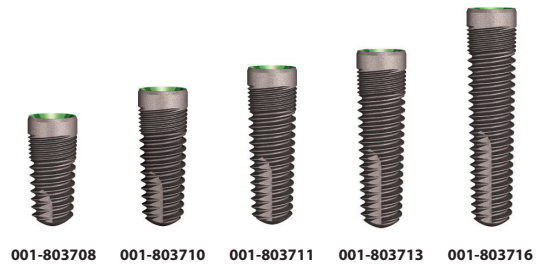

001-803708

001-803710

001-803711

001-803713

001-803716

4.2mmD ボディ

キャリアー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属

滅菌済

商品コード	直径	長さ	プラットフォーム
001-804208	4.2mmD	8mmL	3.5mmD
001-804210	4.2mmD	10mmL	3.5mmD
001-804211	4.2mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-804213	4.2mmD	13mmL	3.5mmD
001-804216	4.2mmD	16mmL	3.5mmD


8mmL

10mmL

11.5mmL

13mmL

16mmL

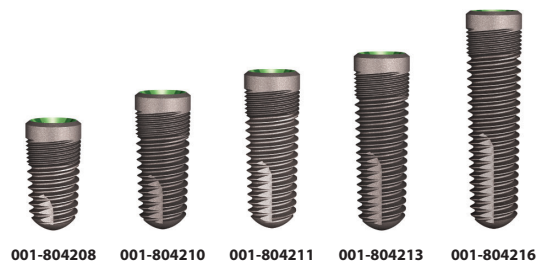

001-804208

001-804210

001-804211

001-804213

001-804216

4.7mmD ボディ

キャリアー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属

滅菌済

商品コード	直径	長さ	プラットフォーム
001-804708	4.7mmD	8mmL	4.5mmD
001-804710	4.7mmD	10mmL	4.5mmD
001-804711	4.7mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-804713	4.7mmD	13mmL	4.5mmD
001-804716	4.7mmD	16mmL	4.5mmD


8mmL

10mmL

11.5mmL

13mmL

16mmL

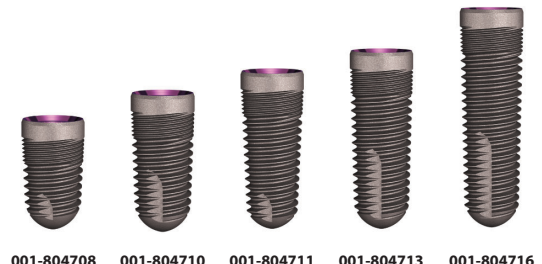

001-804708

001-804710

001-804711

001-804713

001-804716

5.7mmD ボディ

キャリアー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属

滅菌済

商品コード	直径	長さ	プラットフォーム
001-805708	5.7mmD	8mmL	5.7mmD
001-805710	5.7mmD	10mmL	5.7mmD
001-805711	5.7mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-805713	5.7mmD	13mmL	5.7mmD

8mmL

10mmL

11.5mmL

13mmL



001-805708

001-805710

001-805711

001-805713

インプラント治療説明用リーフレット

商品コード	品名	価格
900-00001	患者様説明用リーフレット (100部) 名入れ可 (無料)	5,000円

仕様: A4 3つ折り両面印刷

医院様名や医院様ロゴマークなどをお入れし、きれいなオフセット印刷仕上げでご用意いたします。
(名入れ無しの場合も仕様・価格は同じです。)100部単位でのご注文となります。(納期2週間ほど)

※弊社ホームページからPDFデータをダウンロードしてご利用いただけます。(無料)

インプラント Q&A

- インプラントとは何ですか?
- インプラントのメリット・デメリット
- インプラントの手術方法
- インプラントのメンテナンス
- インプラントの保険適用
- インプラントの費用
- インプラントの保証

治療の流れ

1. コンサルティング・診断検査
2. 手術前
3. 手術
4. 術後ケア
5. 術後ケア
6. 術後ケア
7. 術後ケア

ご存知ですか?
インプラントは、
特別な治療ではありません。


印刷スペース

IMPLANT DIRECT


900-00001

イメージ


下図(イラスト)は左半分がHA、右半分がSBMインプラントのイメージです。
記載のサイズは6mmLインプラントは除きます。

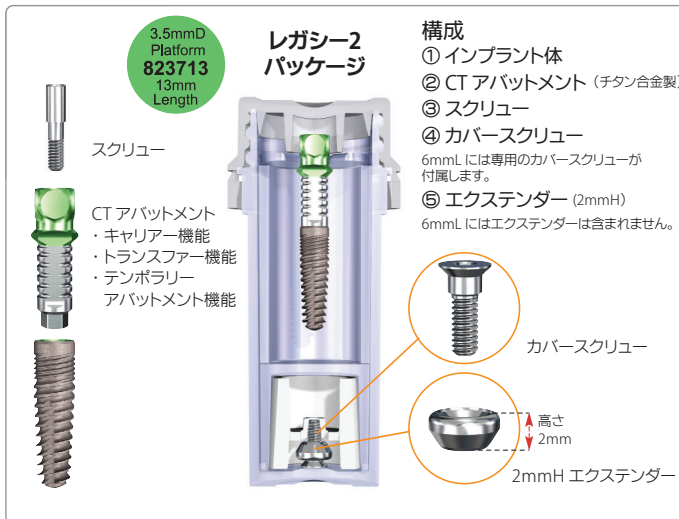


3.2mmD ボディ

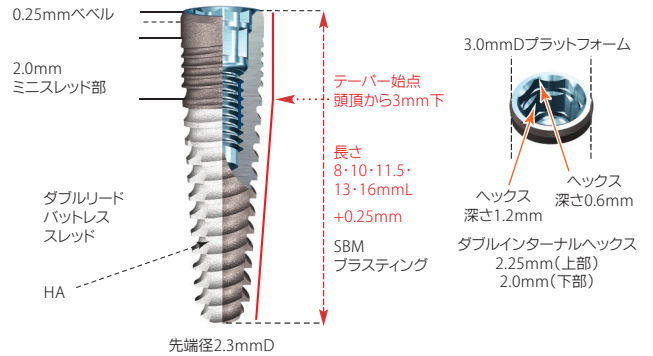


3.7mmD ボディ

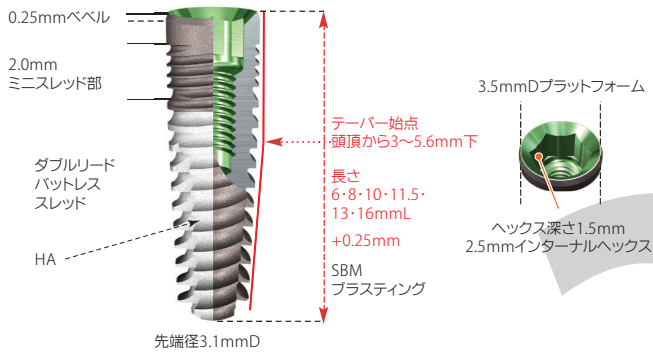


4.2mmD ボディ

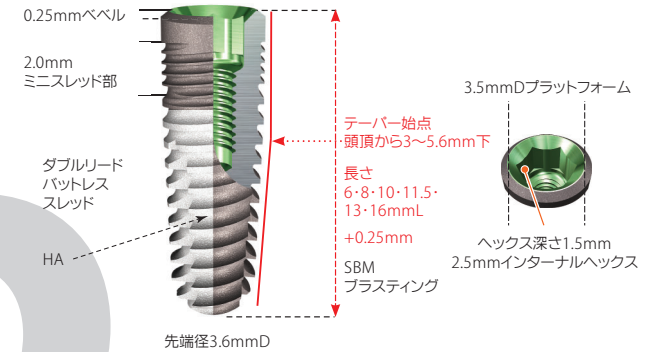


4.7mmD ボディ

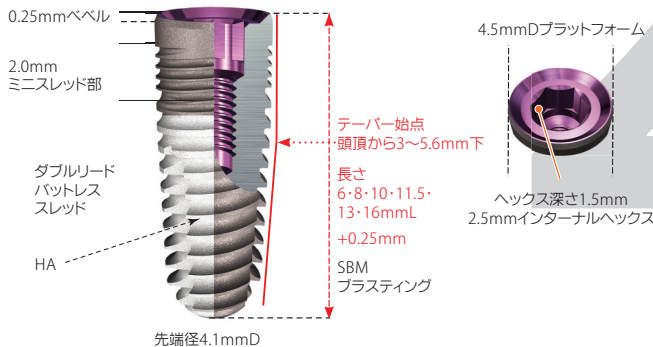


5.2mmD ボディ

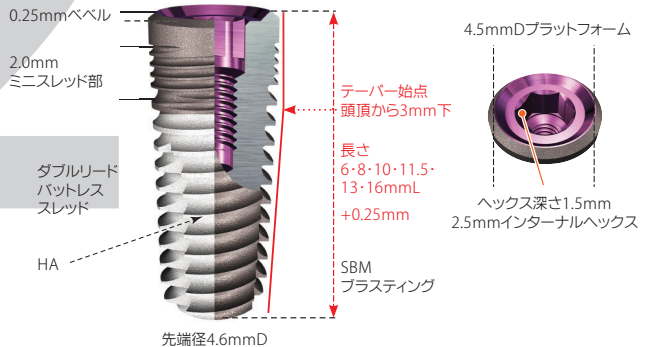

5.7mmD ボディ

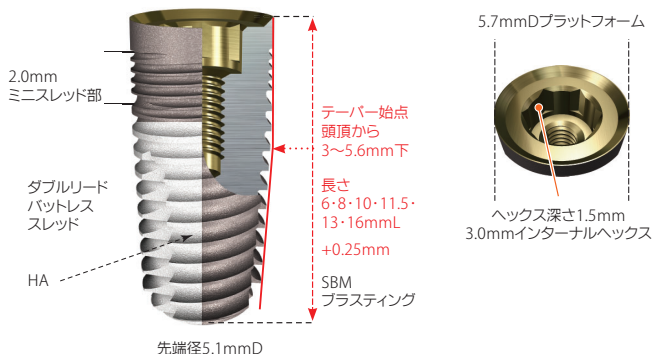

7.0mmD ボディ

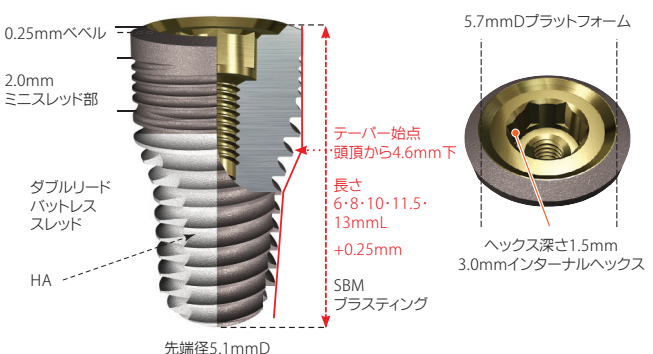

Narrow Implant(3.2mmD)の適用

- ・複数歯連結冠、ブリッジ または オーバーデンチャー固定
 - ・単独歯欠損への使用は下顎の中切歯、側切歯及び上顎の側切歯相当部位にのみ適用
- ※ 臼歯部に埋入したナローインプラントへは、アングルドアバットメントの使用は推奨しない。

Short Implant(6mmL)の適用

- ・2 回法
- ・他のインプラントとの連結
- ・できるだけ太いインプラントの使用

⚠ 6mmL専用以外のカバースクリューは使用できません。

レガシー2 インプラント

SBM各25,000円/HA各29,000円

SBM


HA

3.2mmD ボディ

CTアパットメント、ナロー用フィクセーションスクリュー-M、
カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-823208	001-833208	3.2mmD	8mmL	3.0mmD
001-823210	001-833210	3.2mmD	10mmL	3.0mmD
001-823211	001-833211	3.2mmD	11.5mmL	3.0mmD
001-823213	001-833213	3.2mmD	13mmL	3.0mmD
001-823216	001-833216	3.2mmD	16mmL	3.0mmD

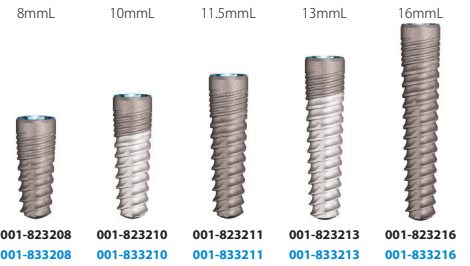

3.7mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリュー-M、
カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-823706	001-833706	3.7mmD	6mmL	3.5mmD
001-823708	001-833708	3.7mmD	8mmL	3.5mmD
001-823710	001-833710	3.7mmD	10mmL	3.5mmD
001-823711	001-833711	3.7mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-823713	001-833713	3.7mmD	13mmL	3.5mmD
001-823716	001-833716	3.7mmD	16mmL	3.5mmD




4.2mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリュー-M、
カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-824206	001-834206	4.2mmD	6mmL	3.5mmD
001-824208	001-834208	4.2mmD	8mmL	3.5mmD
001-824210	001-834210	4.2mmD	10mmL	3.5mmD
001-824211	001-834211	4.2mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-824213	001-834213	4.2mmD	13mmL	3.5mmD
001-824216	001-834216	4.2mmD	16mmL	3.5mmD

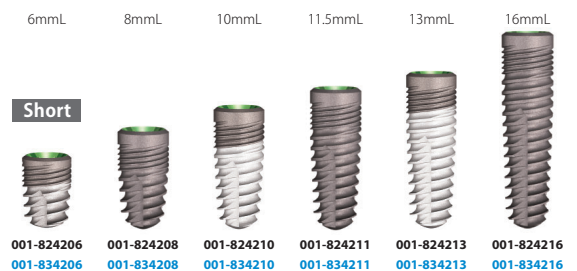


4.7mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリュー-M、
カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-824706	001-834706	4.7mmD	6mmL	4.5mmD
001-824708	001-834708	4.7mmD	8mmL	4.5mmD
001-824710	001-834710	4.7mmD	10mmL	4.5mmD
001-824711	001-834711	4.7mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-824713	001-834713	4.7mmD	13mmL	4.5mmD
001-824716	001-834716	4.7mmD	16mmL	4.5mmD

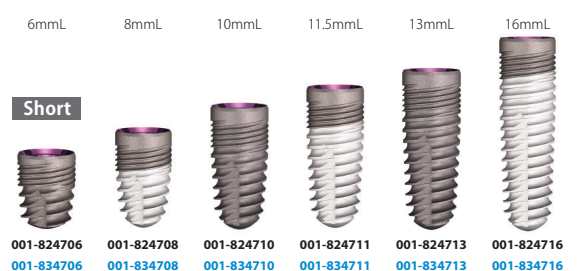


5.2mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリュー-M、
カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-825206	001-835206	5.2mmD	6mmL	4.5mmD
001-825208	001-835208	5.2mmD	8mmL	4.5mmD
001-825210	001-835210	5.2mmD	10mmL	4.5mmD
001-825211	001-835211	5.2mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-825213	001-835213	5.2mmD	13mmL	4.5mmD
001-825216	001-835216	5.2mmD	16mmL	4.5mmD

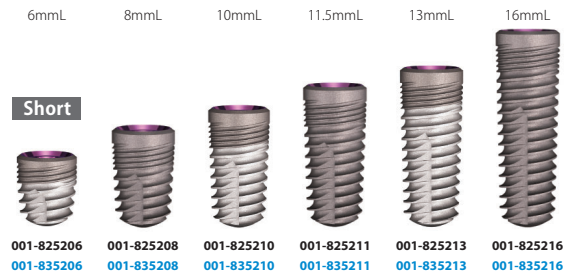

5.7mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリュー-M、
カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-825706	001-835706	5.7mmD	6mmL	5.7mmD
001-825708	001-835708	5.7mmD	8mmL	5.7mmD
001-825710	001-835710	5.7mmD	10mmL	5.7mmD
001-825711	001-835711	5.7mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-825713		5.7mmD	13mmL	5.7mmD
001-825716		5.7mmD	16mmL	5.7mmD



7.0mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリュー-M、
カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-827006		7.0mmD	6mmL	5.7mmD
001-827008	001-837008	7.0mmD	8mmL	5.7mmD
001-827010	001-837010	7.0mmD	10mmL	5.7mmD
001-827011	001-837011	7.0mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-827013	001-837013	7.0mmD	13mmL	5.7mmD



- ・エクステンダーは各ボディサイズの 6mmL インプラントには付属しません。
- ・インプラント体のイラストは SBM、HA を交互に掲載しております。

レガシー2 アバットメントセット パッケージ

レガシー2インプラント

(ご参考：単品通常価格 SBM タイプ：25,000 円、HA タイプ：29,000 円)

ストレートアバットメント

(ご参考：単品通常価格 14,600 円)



CT アバットメント
・キャリア機能
・トランスファー機能
・テンポラリー
アバットメント機能



④



⑤



⑥



⑧



⑨

セット構成

- ① インプラント体 (SBM または HA)
- ② CT アバットメント
- ③ スクリュー
- ④ カバースクリュー
6mmL には専用のカバースクリューが付属します。
- ⑤ エクステンダー (2mmH)
6mmL にはエクステンダーは含まれません。

- ⑥ ストレートアバットメント (カラー部高さ 2mm)
- ⑦ スクリュー
- ⑧ ストレートアバットメントトランスファー
- ⑨ ストレートアバットメント用キャップ

・①～⑦はチタン合金製です。
・図はプラットフォーム 3.5mmD の構成例です。

セット価格

SBMインプラント 各29,000円

HAインプラント 各33,000円

レガシー2インプラント + ストレートアバットメントの組み合わせ

レガシー 2 アバットメントセット

アナログ (別売品)

レガシー 2 インプラント SBM / HA 共通	+	ストレートアバットメント カラー部高さ 2mm	プラットフォーム	ストレートアバットメント 加工時	ストレートアバットメント 未加工時
 3.2mmD ボディ	+	 単品商品コード：002-853022	 プラットフォーム直径 3.0mmD	 インプラントアナログ チタン 002-853006D	 ストレートアバットメント アナログ 002-8537 ※
 3.7mmD ボディ  4.2mmD ボディ	+	 単品商品コード：002-803522	 プラットフォーム直径 3.5mmD	 002-803506D	 002-3047 ※
 4.7mmD ボディ  5.2mmD ボディ	+	 単品商品コード：002-804522	 プラットフォーム直径 4.5mmD	 002-804506D	 002-3057 ※
 5.7mmD ボディ  7.0mmD ボディ	+	 単品商品コード：002-805722	 プラットフォーム直径 5.7mmD	 002-805706D	 002-3065 ※

※ストレートアバットメントのパーツ(アナログ・トランスファー)色はプラットフォームのカラーコードとは異なります。ご注意ください。●ストレートアバットメントを未加工でワックスアップもしくは補綴物を作成する際は「キャストブルーコーピング(別売品)」をご使用ください。●ストレートアバットメントの詳細はP.19をご参照ください。●上記記載の商品コードは単品の場合となります。セット品のご注文用の商品コードは右ページをご覧ください。

⚠ レガシー2アバットメントセット(以下「セット品」)における交換の際のご注意

本セットは特別価格設定商品のため、交換につきましては下記に限定しております。あらかじめご了承ください。



⇒ 交換可

○ セット品のサイズ交換は可能です。

- ※「セット品」の組合せからご選択いただけます。異なるプラットフォームの組合せはできません。
- ※「セット品」をご返送される場合は、必ずご注文時のインプラント体とアバットメントのセット組合せでご返送ください。



⇒ 交換可

○ インプラント体のみでのサイズ交換は可能です。

- ※インプラント体を交換される場合は、インプラント体のみご返送ください。アバットメントの返送は不要です。



⇒ 交換不可

✗ アバットメントのみでの交換はできません。

- ※セット品のアバットメントのカラー部高さは2mmとなります。他の高さをご希望の場合は別途お買い求めください。
- ・インプラント体の表面性状(SBM/HA)の変更はできません。
- ・その他の交換条件・返品条件は当社規定に準じます。(末ページに記載)

レガシー2 アバットメントセット

セット品価格:SBM各29,000円/HA各33,000円


SBM

HA

3.2mmD ボディ

CTアバットメント、ナロー用フィクセーションスクリュー-M、カバースクリュー、2mmHエクステンダー*
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、ナロー用フィクセーションスクリュー-S、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 **滅菌済**


セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2000-S	001-2100-S	3.2mmD	8mmL	3.0mmD
001-2001-S	001-2101-S	3.2mmD	10mmL	3.0mmD
001-2002-S	001-2102-S	3.2mmD	11.5mmL	3.0mmD
001-2003-S	001-2103-S	3.2mmD	13mmL	3.0mmD
001-2004-S	001-2104-S	3.2mmD	16mmL	3.0mmD

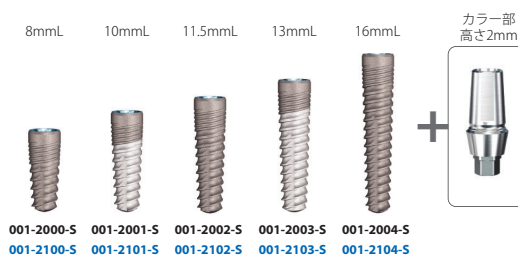

3.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリュー-M、カバースクリュー、2mmHエクステンダー*
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリュー-S、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 **滅菌済**

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2005-S	001-2105-S	3.7mmD	6mmL	3.5mmD
001-2006-S	001-2106-S	3.7mmD	8mmL	3.5mmD
001-2007-S	001-2107-S	3.7mmD	10mmL	3.5mmD
001-2008-S	001-2108-S	3.7mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-2009-S	001-2109-S	3.7mmD	13mmL	3.5mmD
001-2010-S	001-2110-S	3.7mmD	16mmL	3.5mmD

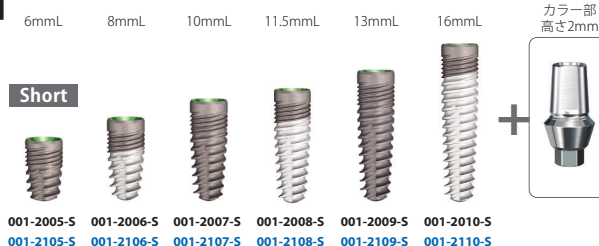

4.2mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリュー-M、カバースクリュー、2mmHエクステンダー*
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリュー-S、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 **滅菌済**

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2011-S	001-2111-S	4.2mmD	6mmL	3.5mmD
001-2012-S	001-2112-S	4.2mmD	8mmL	3.5mmD
001-2013-S	001-2113-S	4.2mmD	10mmL	3.5mmD
001-2014-S	001-2114-S	4.2mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-2015-S	001-2115-S	4.2mmD	13mmL	3.5mmD
001-2016-S	001-2116-S	4.2mmD	16mmL	3.5mmD



4.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリュー-M、カバースクリュー、2mmHエクステンダー*
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリュー-S、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 **滅菌済**

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2017-S	001-2117-S	4.7mmD	6mmL	4.5mmD
001-2018-S	001-2118-S	4.7mmD	8mmL	4.5mmD
001-2019-S	001-2119-S	4.7mmD	10mmL	4.5mmD
001-2020-S	001-2120-S	4.7mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-2021-S	001-2121-S	4.7mmD	13mmL	4.5mmD
001-2022-S	001-2122-S	4.7mmD	16mmL	4.5mmD



5.2mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリュー-M、カバースクリュー、2mmHエクステンダー*
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリュー-S、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 **滅菌済**


セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2023-S	001-2123-S	5.2mmD	6mmL	4.5mmD
001-2024-S	001-2124-S	5.2mmD	8mmL	4.5mmD
001-2025-S	001-2125-S	5.2mmD	10mmL	4.5mmD
001-2026-S	001-2126-S	5.2mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-2027-S	001-2127-S	5.2mmD	13mmL	4.5mmD
001-2028-S	001-2128-S	5.2mmD	16mmL	4.5mmD



5.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリュー-M、カバースクリュー、2mmHエクステンダー*
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリュー-S、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 **滅菌済**

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2029-S	001-2129-S	5.7mmD	6mmL	5.7mmD
001-2030-S	001-2130-S	5.7mmD	8mmL	5.7mmD
001-2031-S	001-2131-S	5.7mmD	10mmL	5.7mmD
001-2032-S	001-2132-S	5.7mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-2033-S		5.7mmD	13mmL	5.7mmD
001-2034-S		5.7mmD	16mmL	5.7mmD

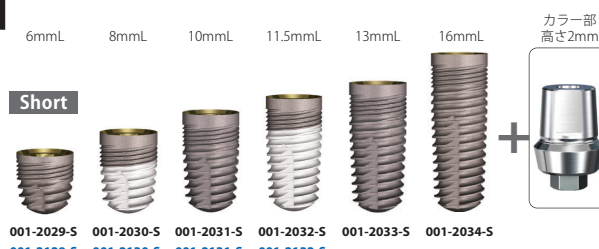

7.0mmD ボディ








CTアバットメント、フィクセーションスクリュー-M、カバースクリュー、2mmHエクステンダー*
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリュー-S、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 **滅菌済**

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2035-S		7.0mmD	6mmL	5.7mmD
001-2036-S	001-2136-S	7.0mmD	8mmL	5.7mmD
001-2037-S	001-2137-S	7.0mmD	10mmL	5.7mmD
001-2038-S	001-2138-S	7.0mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-2039-S	001-2139-S	7.0mmD	13mmL	5.7mmD



・エクステンダーは各ボディサイズの6mmLインプラントには付属なし。
・インプラント体のイラストはSBM、HAを交互に掲載。

記載のサイズは6mmLインプラントは除きます。

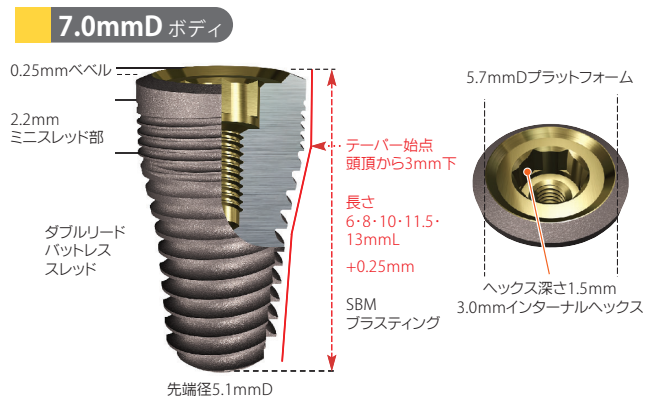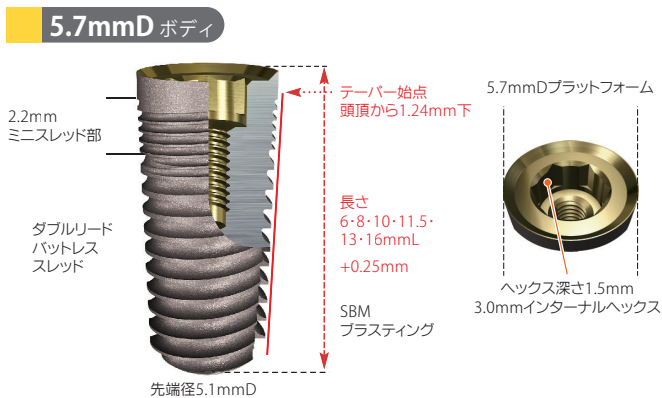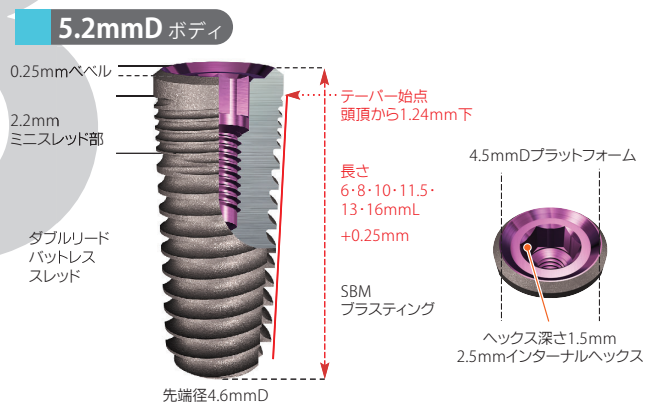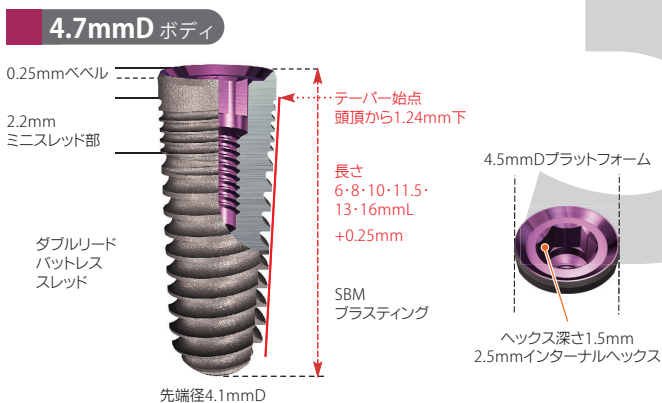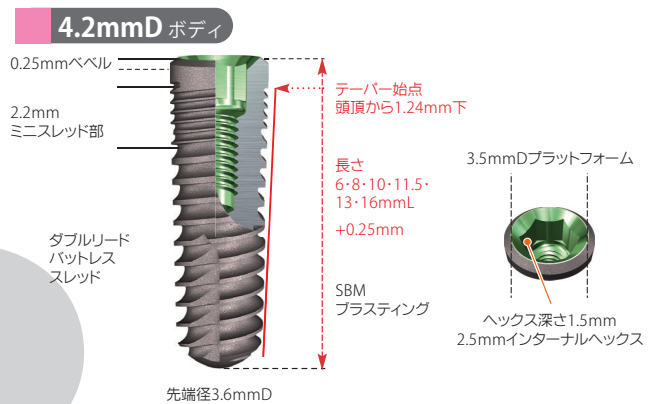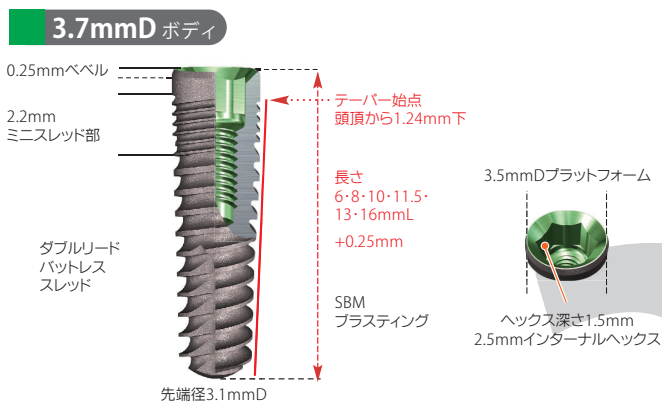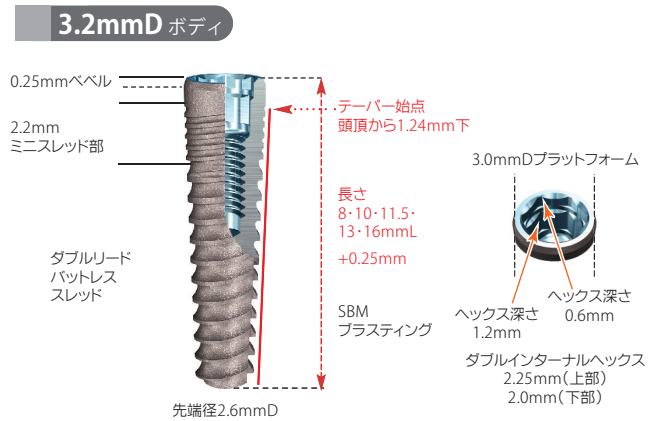

Narrow Implant(3.2mmD)の適用

- ・複数歯連結冠、ブリッジ または オーバーデンチャー固定
 - ・単独歯欠損への使用は下顎の中切歯、側切歯及び上顎の側切歯相当部位にのみ適用
- ※ 臼歯部に埋入したナローインプラントへは、アングルドアバットメントの使用は推奨しない。

Short Implant(6mmL)の適用

- ・2 回法
- ・他のインプラントとの連結
- ・できるだけ太いインプラントの使用

⚠ 6mmL専用以外のカバースクリューは使用できません。

レガシー3 インプラント

SBM各28,500円

SBM

3.2mmD ボディ

CTアパットメント、ナロー用フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-853208	3.2mmD	8mmL	3.0mmD
001-853210	3.2mmD	10mmL	3.0mmD
001-853211	3.2mmD	11.5mmL	3.0mmD
001-853213	3.2mmD	13mmL	3.0mmD
001-853216	3.2mmD	16mmL	3.0mmD




001-853208 001-853210 001-853211 001-853213 001-853216

3.7mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-853706	3.7mmD	6mmL	3.5mmD
001-853708	3.7mmD	8mmL	3.5mmD
001-853710	3.7mmD	10mmL	3.5mmD
001-853711	3.7mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-853713	3.7mmD	13mmL	3.5mmD
001-853716	3.7mmD	16mmL	3.5mmD

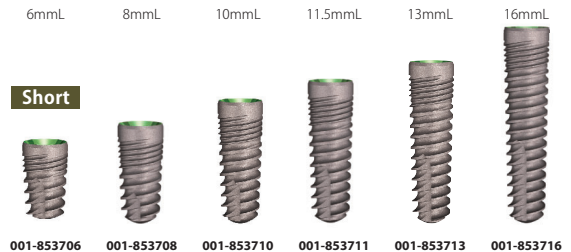


001-853706 001-853708 001-853710 001-853711 001-853713 001-853716

4.2mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-854206	4.2mmD	6mmL	3.5mmD
001-854208	4.2mmD	8mmL	3.5mmD
001-854210	4.2mmD	10mmL	3.5mmD
001-854211	4.2mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-854213	4.2mmD	13mmL	3.5mmD
001-854216	4.2mmD	16mmL	3.5mmD

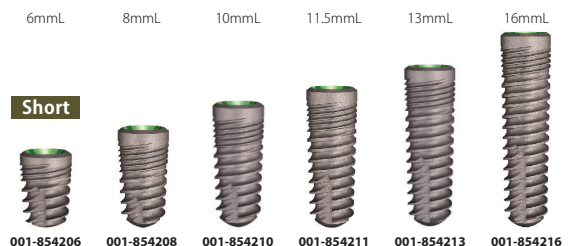


001-854206 001-854208 001-854210 001-854211 001-854213 001-854216

4.7mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-854706	4.7mmD	6mmL	4.5mmD
001-854708	4.7mmD	8mmL	4.5mmD
001-854710	4.7mmD	10mmL	4.5mmD
001-854711	4.7mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-854713	4.7mmD	13mmL	4.5mmD
001-854716	4.7mmD	16mmL	4.5mmD

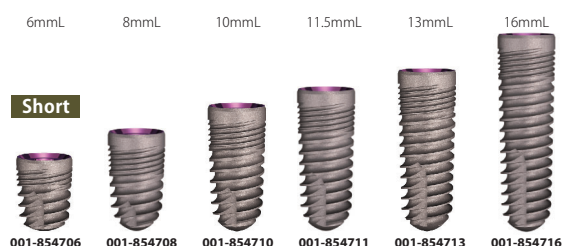


001-854706 001-854708 001-854710 001-854711 001-854713 001-854716

5.2mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-855206	5.2mmD	6mmL	4.5mmD
001-855208	5.2mmD	8mmL	4.5mmD
001-855210	5.2mmD	10mmL	4.5mmD
001-855211	5.2mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-855213	5.2mmD	13mmL	4.5mmD
001-855216	5.2mmD	16mmL	4.5mmD

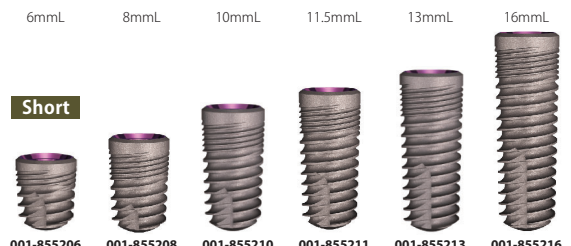


001-855206 001-855208 001-855210 001-855211 001-855213 001-855216

5.7mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-855706	5.7mmD	6mmL	5.7mmD
001-855708	5.7mmD	8mmL	5.7mmD
001-855710	5.7mmD	10mmL	5.7mmD
001-855711	5.7mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-855713	5.7mmD	13mmL	5.7mmD
001-855716	5.7mmD	16mmL	5.7mmD

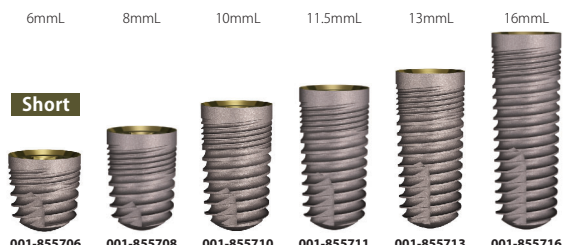


001-855706 001-855708 001-855710 001-855711 001-855713 001-855716

7.0mmD ボディ

CTアパットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属

滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-857006	7.0mmD	6mmL	5.7mmD
001-857008	7.0mmD	8mmL	5.7mmD
001-857010	7.0mmD	10mmL	5.7mmD
001-857011	7.0mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-857013	7.0mmD	13mmL	5.7mmD

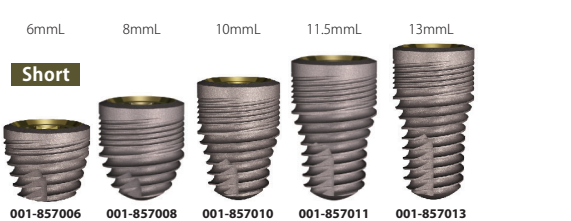

001-857006 001-857008 001-857010 001-857011 001-857013


・エクステンダーは各ボディサイズの 6mmL インプラントには付属しません。

補綴コンポーネントチャート

CTアバットメント

3.2mmDインプラント

3.0mmDプラットフォーム

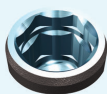


レガシー2
付属品




レガシー3
付属品

3.7 & 4.2mmDインプラント

3.5mmDプラットフォーム

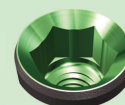

カバースクリュー
ヒーリングカラー
インプラントトランスファー
インプラントアナログ
スキャンアダプター

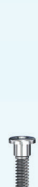


002-853001



002-853013
002-853015



002-853005

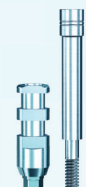


002-853008



002-853006D 003-873009PT
(デジタル対応品)



(歯肉プロファイルが選択できます
⇒P.14~17)

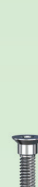

002-803501



002-803513
002-803515



002-803505



002-803508

※6mmL
インプラント用

カントウアーアバットメント
ストレート&角度付き(15°)



002-853031
002-853032



002-853051
002-853052

ワイドラボアバットメント



002-803531
002-803532



002-803551
002-803552

ストレートアバットメント
キャップ&トランスファー
アナログ



002-853021



002-853022



002-853023



002-303726



002-853702



002-8537



002-803521



002-803522



002-803523



002-304726



002-304702

各種アバットメント



002-853030CB



002-853040
002-853041*
※ノンエンゲージ



002-853047
002-873047*
※コンケーブ



002-853049



002-803530CB



002-803540
002-803541*
※ノンエンゲージ

ロケター®アバットメント



002-853091-L



002-853092-L



002-853093-L



002-853094-L



002-853095-L



002-803590-L



002-803591-L



002-803592-L



002-803593-L

スクリュー固定式
アバットメント
ストレート&角度付き(15°・30°)



002-853062155
002-853063155



002-853063305
002-853064305



002-853061



002-853062



002-853064



002-803562155
002-803563155
002-803564155



002-803563305
002-803564305
002-803565305

ボールアバットメント




002-803572

補綴コンポーネントチャート


4.7 & 5.2mmDインプラント

4.5mmDプラットフォーム

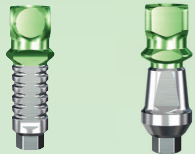

レガシー2
付属品

レガシー3
付属品

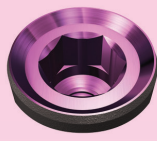

レガシー2
付属品



レガシー3
付属品



002-803506D



003-873509PT



002-804501
002-804501S*
※6mmL
インプラント用



002-804513
002-804515



002-804505



002-804508




002-804506D



003-874509PT

5.7 & 7.0mmDインプラント

5.7mmDプラットフォーム

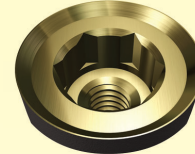

レガシー2
付属品



レガシー3
付属品



002-805701
002-805701S*
※6mmL
インプラント用



002-805713
002-805715



002-805705



002-805708



002-805706D



003-875709PT



002-804531
002-804532



002-804551
002-804552



002-HLA4-5
002-HLA4-6



002-805731
002-805732



002-805751
002-805752



002-HLA5-7



002-3047



002-804521



002-804522



002-804523



002-305702



002-3057



002-805721



002-805722



002-805723



002-306502



002-3065



002-803547
002-873547*
※コンケープ



002-803549



002-804530CB



002-804540
002-804541*
※ノンエンゲージ



002-804547
002-874547*
※コンケープ



002-804549



002-805740



002-805747
002-875747*
※コンケープ



002-805749



002-803594-L



002-803595-L



002-804590-L



002-804591-L



002-804592-L



002-804593-L



002-804594-L



002-804595-L



002-805791-L



002-805792-L



002-805793-L



002-805794-L



002-805795-L



002-803561



002-803562



002-803564



002-80456215S



002-80456330S



002-804561



002-804562



002-804564



002-80456315S



002-80456430S



002-80456415S



002-80456530S



002-803574



002-804572



002-804574



002-805761



002-805762



002-805764



002-805772











002-805774

レガシーインプラント 歯肉プロファイルシステム

～ 歯肉形状と一連のパーツシステムのご案内 ～

レガシーインプラントシステムでは3種類の歯肉プロファイルが選択できます。
治癒時に希望する歯肉形状に合った一連のパーツ(ヒーリングカラー・トランスファー)をご選択ください。

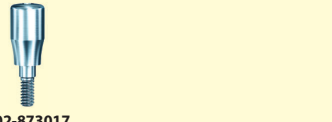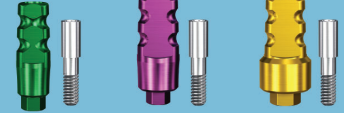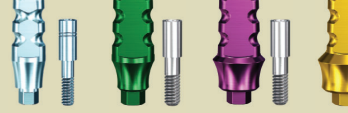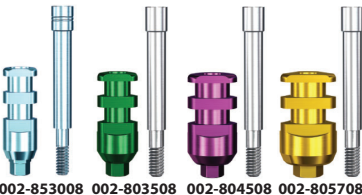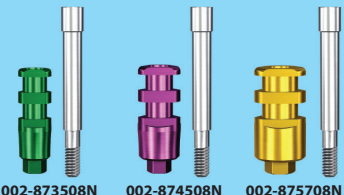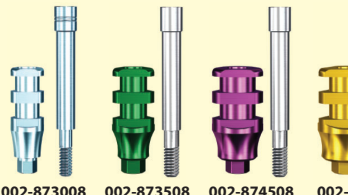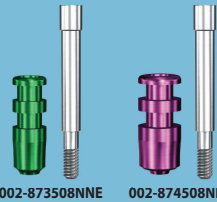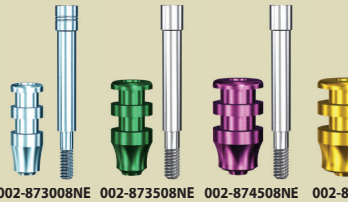	レギュラータイプ	ナロー(ストレート系)タイプ	コンケーブタイプ
	 ⇒P.15	 ⇒P.16	 ⇒P.17
		お取り寄せ品※	お取り寄せ品※
		※ ナロー(ストレート系)タイプ、コンケーブタイプはお取り寄せ品となります。ご注文からお届けまでに2～4週間ほどかかる場合がございます。お急ぎの際は、事前に納期をご確認ください。	
ヒーリングカラー	 002-853013 002-803513 002-804513 002-805713  002-853015 002-803515 002-804515 002-805715	 002-873513N 002-874513N 002-875713N  002-873515N 002-874515N 002-875715N  002-873517N 002-874517N 002-875717N	 002-873013 002-873513 002-874513 002-875713  002-873015 002-873515 002-874515 002-875715  002-873017
インプラント トランスファー クローズド トレイ式	 002-853005 002-803505 002-804505 002-805705	 002-873505N 002-874505N 002-875705N	 002-873005 002-873505 002-874505 002-875705
インプラント トランスファー オープントレイ式	 002-853008 002-803508 002-804508 002-805708	 002-873508N 002-874508N 002-875708N	 002-873008 002-873508 002-874508 002-875708
インプラント トランスファー オープントレイ式 ノンエンゲージ		 002-873508NNE 002-874508NNE	 002-873008NE 002-873508NE 002-874508NE 002-875708NE
インプラント アナログ	インプラントアナログは共通です。(⇒P.15)		
使用する アバットメント例	既製チタンアバットメント、 ゴールド鑄接など  002-803532 002-803552 002-803540	カスタムメイドアバットメント、 ロケーターアバットメントなど  002-803592-L	カスタムメイドアバットメントなど 補綴物の歯肉貫通部形状は形成された 歯肉プロファイルに合わせて設計ください。

カバースクリュー・ヒーリングカラー・トランスファー・アナログ

各歯肉プロファイルシステム共通

カバースクリュー

1.25mmヘックスドライバー使用 滅菌済

商品コード	商品コード(6mmL用)	プラットフォーム
002-853001	-	3.0mmD
002-803501	002-803501S	3.5mmD
002-804501	002-804501S	4.5mmD
002-805701	002-805701S	5.7mmD

⚠ 6mmLインプラントには、必ず商品コード末尾に「S」がついた6mmL用をご使用ください。他ボディサイズのカバースクリューは使用できません。

各3,000円



レギュラータイプ

ヒーリングカラー

1.25mmヘックスドライバー使用 滅菌済

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-853013	3.0mmD	3.8mm	3mm
002-853015	3.0mmD	3.8mm	5mm
002-803513	3.5mmD	4.8mm	3mm
002-803515	3.5mmD	4.8mm	5mm
002-804513	4.5mmD	5.8mm	3mm
002-804515	4.5mmD	5.8mm	5mm
002-805713	5.7mmD	6.6mm	3mm
002-805715	5.7mmD	6.6mm	5mm

各4,700円



※スクリュー固定式アバットメント(P.21)で補綴設計される場合は、歯肉治癒期間にヒーリングカラーを使用せず、スクリュー固定式アバットメントを使用することをお勧めします。


レギュラータイプ

インプラントトランスファー
クローズドトレイ式

専用スクリュー1個付属 1.25mmヘックスドライバー使用 未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-853005	3.0mmD	3.8mm	002-100041
002-803505	3.5mmD	4.7mm	002-100006
002-804505	4.5mmD	5.7mm	002-100006
002-805705	5.7mmD	6.6mm	002-100006

各5,200円

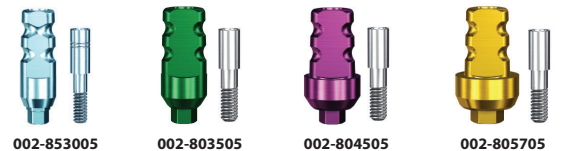


レギュラータイプ

インプラントトランスファー
オープントレイ式

専用スクリュー1個付属 1.25mmヘックスドライバー使用 未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-853008	3.0mmD	3.8mm	002-100026
002-803508	3.5mmD	4.7mm	002-100010
002-804508	4.5mmD	5.7mm	002-100010
002-805708	5.7mmD	6.6mm	002-100010

各5,200円

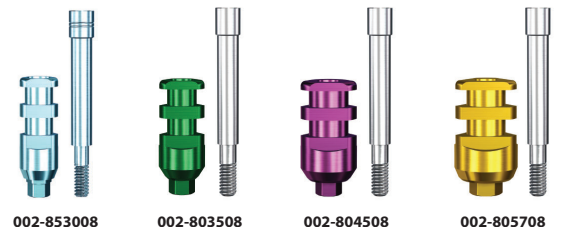

各歯肉プロファイルシステム共通


インプラントアナログチタン

石膏模型・3Dプリンタ模型 どちらでも使用可

未滅菌

商品コード	プラットフォーム
002-853006D	3.0mmD
002-803506D	3.5mmD
002-804506D	4.5mmD
002-805706D	5.7mmD

各2,900円

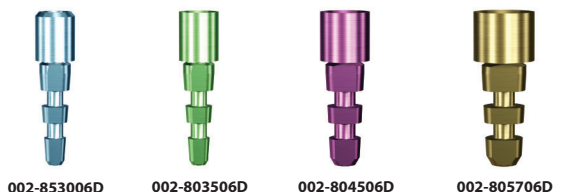

ヒーリングカラー・トランスファー 【ナロー(ストレート系)】

ナロー(ストレート系)タイプ

カバースクリューおよびインプラントアナログは
各歯肉プロファイルシステムで共通となります。
P.15をご参照ください。

(取寄品) ご注文からお届けまでに
2~4週間ほどかかる場合がございます。
お急ぎの際は、事前に納期をご確認ください。



ナロー / コンケープ

ヒーリングカラー ナロー(ストレート系)

1.25mmヘックスドライバー使用

滅菌済

(取寄品)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-873513N	3.5mmD	3.8mm	3mm
002-873515N	3.5mmD	3.8mm	5mm
002-873517N	3.5mmD	3.8mm	7mm
002-874513N	4.5mmD	4.8mm	3mm
002-874515N	4.5mmD	4.8mm	5mm
002-874517N	4.5mmD	4.8mm	7mm
002-875713N	5.7mmD	5.8mm	3mm
002-875715N	5.7mmD	5.8mm	5mm
002-875717N	5.7mmD	5.8mm	7mm

各5,200円



インプラントトランスファー

クローズドトレイ式 ナロー(ストレート系)

専用スクリュー1個付属

1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

(取寄品)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873505N	3.5mmD	3.8mm	002-100006
002-874505N	4.5mmD	4.7mm	002-100006
002-875705N	5.7mmD	5.7mm	002-100006

各5,200円



インプラントトランスファー

オープントレイ式 ナロー(ストレート系)

専用スクリュー1個付属

1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

(取寄品)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873508N	3.5mmD	3.8mm	002-100010
002-874508N	4.5mmD	4.7mm	002-100010
002-875708N	5.7mmD	5.7mm	002-100010

各5,200円



インプラントトランスファー

オープントレイ式ノンエンゲージ ナロー(ストレート系)

専用スクリュー1個付属 1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

(取寄品)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873508NNE	3.5mmD	3.8mm	002-100010
002-874508NNE	4.5mmD	4.7mm	002-100010

各5,200円



カバースクリュー・インプラントアナログは各歯肉プロファイルシステム共通 ⇒ P.15

ヒーリングカラー・トランスファー 【コンケーブ】

コンケーブタイプ

カバースクリューおよびインプラントアナログは
各歯肉プロファイルシステムで共通となります。
P.15をご参照ください。

(取寄品) お取り寄せ品について：
ご注文からお届けまでに
2～4週間ほどかかる場合がございます。
お急ぎの際は、事前に納期をご確認ください。



コンケーブ

ヒーリングカラー コンケーブ

1.25mmヘックスドライバー使用 滅菌済

(取寄品)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-873013	3.0mmD	3.8mm	3mm
002-873015	3.0mmD	3.8mm	5mm
002-873017	3.0mmD	3.8mm	7mm
002-873513	3.5mmD	4.8mm	3mm
002-873515	3.5mmD	4.8mm	5mm
002-874513	4.5mmD	5.8mm	3mm
002-874515	4.5mmD	5.8mm	5mm
002-875713	5.7mmD	6.6mm	3mm
002-875715	5.7mmD	6.6mm	5mm

各5,200円

インプラントトランスファー
クローズドトレイ式 コンケーブ専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

(取寄品)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873005	3.0mmD	3.8mm	002-100041
002-873505	3.5mmD	4.7mm	002-100006
002-874505	4.5mmD	5.7mm	002-100006
002-875705	5.7mmD	6.6mm	002-100006

各5,200円


インプラントトランスファー
オープントレイ式 コンケーブ専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

(取寄品)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873008	3.0mmD	3.8mm	002-100026
002-873508	3.5mmD	4.7mm	002-100010
002-874508	4.5mmD	5.7mm	002-100010
002-875708	5.7mmD	6.6mm	002-100010

各5,200円

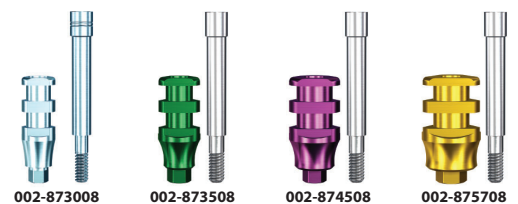インプラントトランスファー
オープントレイ式ノンエンゲージ コンケーブ


専用スクリュー1個付属 1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

(取寄品)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873008NE	3.0mmD	3.8mm	002-100026
002-873508NE	3.5mmD	4.7mm	002-100010
002-874508NE	4.5mmD	5.7mm	002-100010
002-875708NE	5.7mmD	6.6mm	002-100010

各5,200円

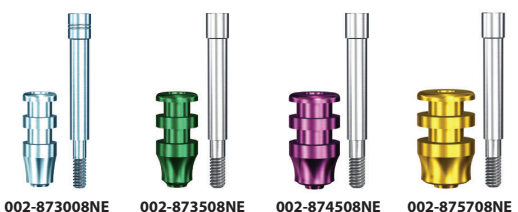

カバースクリュー・インプラントアナログは各歯肉プロファイルシステム共通 ⇒P.15

ワイドラボ・カントウアー・チタンベース・ゴールドアバットメント

ワイドラボアバットメント

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックストドライバー使用 **未滅菌**

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-HLA4-5	4.5mmD	5.5mm	1mm	002-100001
002-HLA4-6	4.5mmD	6.5mm	2.3mm	002-100001
002-HLA5-7	5.7mmD	7.2mm	2.3mm	002-100001

各11,900円



カントウアーアバットメント(ストレート)

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックストドライバー使用 **未滅菌**

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ(唇側)	専用スクリュー
002-853031	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100020
002-853032	3.0mmD	3.7mm	2mm	002-100020
002-803531	3.5mmD	4.5mm	1mm	002-100001
002-803532	3.5mmD	4.5mm	2mm	002-100001
002-804531	4.5mmD	5.4mm	1mm	002-100001
002-804532	4.5mmD	5.4mm	2mm	002-100001
002-805731	5.7mmD	6.5mm	1mm	002-100001
002-805732	5.7mmD	6.5mm	2mm	002-100001

※舌側は+1.5mm 各14,600円



カントウアーアバットメント15°(角度付き)

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックストドライバー使用 **未滅菌**

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ(唇側)	専用スクリュー
002-853051	3.0mmD	4.8mm	0.75mm	002-100020
002-853052	3.0mmD	4.5mm	2mm	002-100020
002-803551	3.5mmD	4.7mm	0.75mm	002-100001
002-803552	3.5mmD	5.0mm	2mm	002-100001
002-804551	4.5mmD	5.6mm	0.75mm	002-100001
002-804552	4.5mmD	5.9mm	2mm	002-100001
002-805751	5.7mmD	6.8mm	0.75mm	002-100001
002-805752	5.7mmD	7.0mm	2mm	002-100001

※舌側は+1.5mm 各17,300円



チタンベースアバットメント

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックストドライバー使用 **未滅菌**

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853030CB	3.0mmD	3.7mm	0.3mm	002-100020
002-803530CB	3.5mmD	4.1mm	0.3mm	002-100001
002-804530CB	4.5mmD	5.1mm	0.4mm	002-100001

各8,800円



ゴールドアバットメント

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックストドライバー使用 **未滅菌**

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853040	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100020
002-803540	3.5mmD	4.7mm	1mm	002-100001
002-804540	4.5mmD	5.7mm	1mm	002-100001
002-805740	5.7mmD	6.5mm	1mm	002-100001

用途：スクリューリテイン単冠、カスタムメイドアバットメントに使用

各25,800円



ゴールドアバットメント(ノンエンゲージ)

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックストドライバー使用 **未滅菌**

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853041	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100020
002-803541	3.5mmD	4.7mm	1mm	002-100001
002-804541	4.5mmD	5.7mm	1mm	002-100001

用途：スクリューリテイン連結冠、ブリッジに使用

各25,800円



ストレートアバットメント 専用トランスファー／アナログ

ストレートアバットメント

トランスファー・アバットメント用キャップ
専用スクリュー各1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	アバットメント直径	カラー部高さ	使用アナログ	専用スクリュー
002-853021	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-8537	002-100020
002-853022	3.0mmD	3.7mm	2mm	002-8537	002-100020
002-853023	3.0mmD	3.7mm	3mm	002-8537	002-100020
002-803521	3.5mmD	4.7mm	1mm	002-3047	002-100001
002-803522	3.5mmD	4.7mm	2mm	002-3047	002-100001
002-803523	3.5mmD	4.7mm	3mm	002-3047	002-100001
002-804521	4.5mmD	5.7mm	1mm	002-3057	002-100001
002-804522	4.5mmD	5.7mm	2mm	002-3057	002-100001
002-804523	4.5mmD	5.7mm	3mm	002-3057	002-100001
002-805721	5.7mmD	6.5mm	1mm	002-3065	002-100001
002-805722	5.7mmD	6.5mm	2mm	002-3065	002-100001
002-805723	5.7mmD	6.5mm	3mm	002-3065	002-100001

アバットメント軸面下部のアンダーカットは、トランスファー、アバットメントキャップを保持する為のものです。専用キャストブルコーピングを使用しない場合は、この部分をリリースしてください。

各14,600円

付属品



002-853021



002-803521



002-804521



002-805721



002-853022



002-803522



002-804522



002-805722



002-853023



002-803523



002-804523



002-805723

ストレートアバットメントアナログ

ストレートアバットメントコーピング付属

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	アバットメント直径
002-8537	3.0mmD	3.7mm
002-3047	3.5mmD	4.7mm
002-3057	4.5mmD	5.7mm
002-3065	5.7mmD	6.5mm

各5,200円



002-8537



002-3047



002-3057



002-3065

※パーツ色がプラットフォームのカラーコードと異なりますのでご注意ください。

ストレートアバットメントトランスファー

未滅菌

商品コード	アバットメント直径
002-853702	3.7mm
002-304702	4.7mm
002-305702	5.7mm
002-306502	6.5mm

各2イリ 4,400円



002-853702



002-304702



002-305702



002-306502

※パーツ色がプラットフォームのカラーコードと異なりますのでご注意ください。

ストレートアバットメント用キャップ (暫間期間のアバットメント頭部のカバー)

未滅菌

商品コード	アバットメント直径
002-303726	3.7mm
002-304726	4.7mm
002-305726	5.7mm
002-306526	6.5mm

各2イリ 4,500円



002-303726



002-304726



002-305726



002-306526

ストレートアバットメントキャストブルコーピング (ワックスアップ用)

未滅菌

商品コード	アバットメント直径
002-303728	3.7mm
002-304728	4.7mm
002-305728	5.7mm
002-306528	6.5mm

各2イリ 4,500円



002-303728



002-304728



002-305728



002-306528

テンポラリーアバットメント・スクリュー

プラスチックテンポラリーアバットメント

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用 **未滅菌**

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853047	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100041
002-803547	3.5mmD	4.7mm	1mm	002-100006
002-804547	4.5mmD	5.7mm	1mm	002-100006
002-805747	5.7mmD	6.5mm	1mm	002-100006

※口腔内使用期間:28日以内

各5,200円




プラスチックテンポラリーアバットメントコンケーブ

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用 **未滅菌**

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-873047	3.0mmD	3.7mm	2mm	002-100041
002-873547	3.5mmD	4.7mm	2mm	002-100006
002-874547	4.5mmD	5.7mm	2mm	002-100006
002-875747	5.7mmD	6.5mm	2mm	002-100006

※口腔内使用期間:28日以内

各5,200円

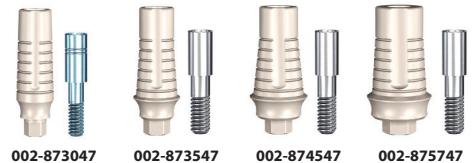

チタンテンポラリーアバットメント(NE) (ノンエンゲージ)

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用 **未滅菌**

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853049	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100020
002-803549	3.5mmD	4.7mm	1mm	002-100001
002-804549	4.5mmD	5.0mm	1mm	002-100001
002-805749	5.7mmD	5.7mm	1mm	002-100001

各5,200円



スクリュー


1.25mmヘックスドライバー使用 **未滅菌**

商品コード	品名 & 用途
-------	---------

プラットフォーム: 3.0mmD用

002-100020S	ナロー用フィクセーションスクリューXS スクリュー固定式アバットメント角度付き (15°・30°) 用
002-100020	ナロー用フィクセーションスクリューS アバットメント用
002-100041	ナロー用フィクセーションスクリューM インプラントランスファークローズドトレイ式&プラスチックテンポラリーアバットメント用
002-100026	インプラントランスファースクリューD1.6オープン インプラントランスファオープントレイ式&ワキシング用
002-100026XL	ワキシングスクリューD1.6 (在庫のみ) ワキシング用ロングタイプ


各2イリ 5,800円

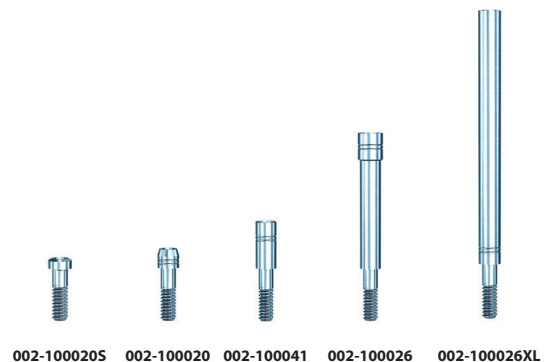

プラットフォーム: 3.5mmD用 4.5mmD用 5.7mmD用

002-100001S	フィクセーションスクリューXS スクリュー固定式アバットメント角度付き (15°・30°) 用
002-100001	フィクセーションスクリューS アバットメント用
002-100006	フィクセーションスクリューM インプラントランスファークローズドトレイ式&プラスチックテンポラリーアバットメント用
002-100010	インプラントランスファースクリューD1.8オープン インプラントランスファオープントレイ式&ワキシング用

各2イリ 5,800円

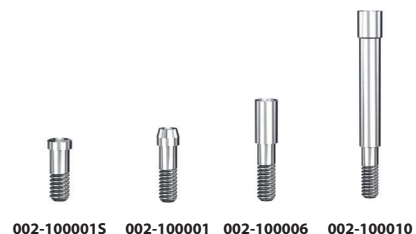

スクリュー固定式アバットメント

※スクリュー固定式アバットメントを使用した補綴設計にする場合、歯肉治癒期間にヒーリングカラーを使用せず、スクリュー固定式アバットメントとキャップを使用することをお勧めします。


スクリュー固定式アバットメント

PLトランスファー、アバットメント用キャップ各1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-853061	3.0mmD	5.0mm	1mm
002-853062	3.0mmD	5.0mm	2mm
002-853064	3.0mmD	5.0mm	4mm
002-803561	3.5mmD	5.0mm	1mm
002-803562	3.5mmD	5.0mm	2mm
002-803564	3.5mmD	5.0mm	4mm
002-804561	4.5mmD	5.0mm	1mm
002-804562	4.5mmD	5.0mm	2mm
002-804564	4.5mmD	5.0mm	4mm
002-805761	5.7mmD	5.7mm	1mm
002-805762	5.7mmD	5.7mm	2mm
002-805764	5.7mmD	5.7mm	4mm

各11,500円

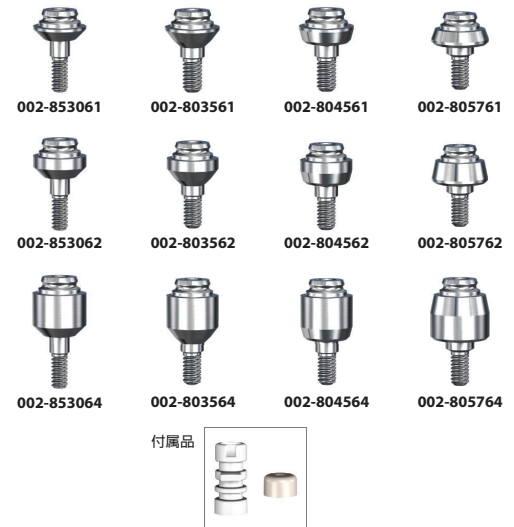

スクリュー固定式アバットメント角度付き(15°・30°)

PLトランスファー、アバットメント用キャップ
専用スクリュー各1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

プラットフォーム	カラー部高さ(高位)	15°	30°	専用スクリュー
3.0mmD	2.5mm	002-85306215S	—	002-100020S
3.0mmD	3.5mm	002-85306315S	002-85306330S	002-100020S
3.0mmD	4.5mm	—	002-85306430S	002-100020S
3.5mmD	2mm	002-80356215S	—	002-100001S
3.5mmD	3mm	002-80356315S	002-80356330S	002-100001S
3.5mmD	4mm	002-80356415S	002-80356430S	002-100001S
3.5mmD	5mm	—	002-80356530S	002-100001S
4.5mmD	2mm	002-80456215S	—	002-100001S
4.5mmD	3mm	002-80456315S	002-80456330S	002-100001S
4.5mmD	4mm	002-80456415S	002-80456430S	002-100001S
4.5mmD	5mm	—	002-80456530S	002-100001S

※低位は 15°:-1.0mm
30°:-2.5mm

各18,700円




スクリュー固定式アバットメント、角度付き(15°・30°)は、下記コンポーネントと組み合わせ使用します。

スクリュー固定式アバットメント印象用パーツ他

1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

商品コード	品名	価格
002-100006D	スクリュー固定式アバットメントアナログ チタン	3,700円
002-100062	スクリュー固定式アバットメントトランスファー (オープン)	5,200円
002-100063	スクリュー固定式アバットメントトランスファー (クローズ)	5,200円
002-100068	スクリュー固定式アバットメントPLトランスファー	2イリ 4,500円
002-400013	スクリュー固定式アバットメント用キャップ	2イリ 4,500円
002-100014	SRAトランスファースクリューオープンD1.8	2イリ 4,500円
002-100015	SRAトランスファースクリュークローズD1.8	2イリ 4,500円
003-100009P	スキャンアダプタースクリュー固定アバットメント用	3,600円

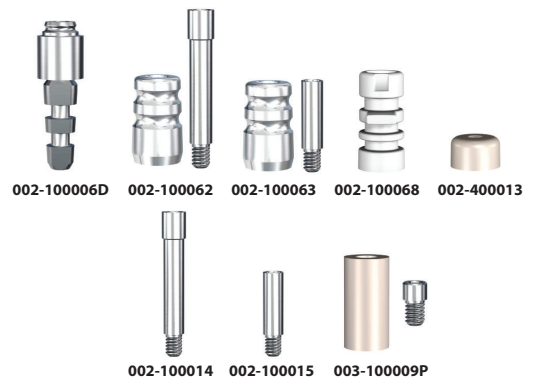

スクリュー固定式アバットメント共通コンポーネント

1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

商品コード	品名	価格
002-100005	コーピングスクリュー (交換用)	2イリ 4,500円
002-100067	ゴールド&プラスチックコーピング	16,000円
002-100069	チタンテンポラリーコーピング	5,200円

角度付きスクリュー固定式アバットメント用ボールトップ

002-100070S	アングルド用ボールトップ	5,200円
002-100081	ボールアタッチメントハウジング	2イリ 4,400円
002-100082	ボールアタッチメントナイロンライナー	2イリ 2,300円
002-100088	ボールアタッチメントフィメールセット	3,350円

※ボールアタッチメントの設置工程で使用する器具はP.22に掲載



組合せ図



ボールアバットメント

ボールアバットメント

ボールアバットメントトランスファー、
ボールアバットメント用キャップ各1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用

未減価

※ボールアバットメント注文の際は、
ボールアタッチメントフィメールセットをあわせてご注文ください。

商品コード	プラットフォーム	カラー部高さ
002-803572	3.5mmD	2mm
002-803574	3.5mmD	4mm
002-804572	4.5mmD	2mm
002-804574	4.5mmD	4mm
002-805772	5.7mmD	2mm
002-805774	5.7mmD	4mm

各13,000円



ボールアバットメントコンポーネント

未減価

商品コード	品名	価格
002-100081	ボールアタッチメントハウジング	2イリ 4,400円
002-100082	ボールアタッチメントナイロンライナー	2イリ 2,300円
002-100088	ボールアタッチメントフィメールセット	各1イリ 3,350円
002-100083	ナイロンライナートランスファー	2イリ 2,300円
002-100084	ボールアバットメントトランスファー	2イリ 4,400円
002-100085	ボールアバットメントアナログ	3,000円
002-100087	ボールアバットメント用キャップ	2イリ 4,400円
003-100086	ボールアバットメントツールセット	13,000円

ボールアタッチメント
フィメールセット
002-100088

002-100081 002-100082

ボールアバットメントツール
セットの使用法はこちら



ロケーター®アバットメント

ロケーター®アバットメント

ロケータードライバー・コアツール使用

未減価

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-853091-L	3.0mmD	3.7mm	0.75mm
002-853092-L	3.0mmD	3.7mm	2mm
002-853093-L	3.0mmD	3.7mm	3mm
002-853094-L	3.0mmD	3.7mm	4mm
002-853095-L	3.0mmD	3.7mm	5mm
002-803590-L	3.5mmD	3.7mm	0mm
002-803591-L	3.5mmD	3.7mm	1mm
002-803592-L	3.5mmD	3.7mm	2mm ※
002-803593-L	3.5mmD	3.7mm	3mm ※
002-803594-L	3.5mmD	3.7mm	4mm ※
002-803595-L	3.5mmD	3.7mm	5mm ※
002-804590-L	4.5mmD	4.5mm	0mm
002-804591-L	4.5mmD	4.5mm	1mm
002-804592-L	4.5mmD	4.5mm	2mm
002-804593-L	4.5mmD	4.5mm	3mm
002-804594-L	4.5mmD	4.5mm	4mm
002-804595-L	4.5mmD	4.5mm	5mm
002-805791-L	5.7mmD	5.7mm	1mm
002-805792-L	5.7mmD	5.7mm	2mm
002-805793-L	5.7mmD	5.7mm	3mm
002-805794-L	5.7mmD	5.7mm	4mm
002-805795-L	5.7mmD	5.7mm	5mm

各18,700円



※3.5mmD用のカラー部高さ2~5mmLは、0.5mm高くなります。

ロケーターの詳細・
術式マニュアルはこちら




ロケーター®アバットメントコンポーネント・器具

ロケーター®アバットメントコンポーネント

未滅菌

商品コード	品名	開き角	維持力	価格
002-100092BL4	リプレイスメール ブルー 4イリ	20° 以下	0.68kgf	2,900円
002-100092PL4	リプレイスメール ピンク 4イリ	20° 以下	1.36kgf	2,900円
002-100092CL4	リプレイスメール クリア 4イリ	20° 以下	2.27kgf	2,900円
002-100092ZL4	リプレイスメール グレー 4イリ	40° 以下	0.00kgf	2,900円
002-100092RL4	リプレイスメール レッド 4イリ	40° 以下	0.45kgf	2,900円
002-100092EL4	リプレイスメール オレンジ 4イリ	40° 以下	0.91kgf	2,900円
002-100092GL4	リプレイスメール グリーン 4イリ	40° 以下	1.82kgf	2,900円
002-100093L4	リプレイスプロセッシングメール 黒 4イリ			2,900円
002-100091L4	デンチャーキャップセット 4イリ リプレイスプロセッシングメール 黒 組込済			7,000円
890-00001	ロケーターブロックアウトスパーサー (20個入) 厚み0.5mm			2,900円
002-1000100L4	プロセシングスパーサー 4イリ 高さ3.3mm、外径6.35mm			3,800円
002-100985IL2	メールプロセシングパック※ 2イリ 20° 以下 ブルー・ピンク・クリア			7,800円
002-100985L2	EXTメールプロセシングパック※ 2イリ 40° 以下 レッド・オレンジ・グリーン			7,800円

※ブロックアウトスパーサー・デンチャーキャップセット・各リプレイスメールが入っています。

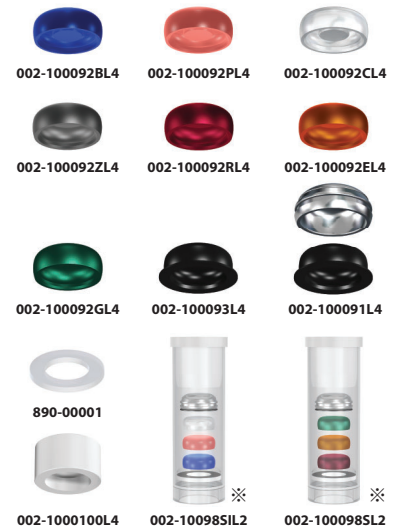

ロケーター®アバットメントトランスファー、アナログ、アラインメントツール

未滅菌


商品コード	品名	価格
002-100094L4	インプレッションコーピング 4イリ リプレイスプロセッシングメール 黒 組込済	8,800円
002-100095L4	フィメールアナログ 4mmD 4イリ	8,800円
003-100097L4	パラレルポスト 4イリ	2,800円
003-100099L	アングルメジャメントガイド	3,000円



ロケーター®インスツルメント

未滅菌

商品コード	品名	価格
003-LDD	ロケータードライバー29mmCA	6,000円
003-LDDS	ロケータードライバー23mmCA	6,000円
003-LDT	ロケータースクエアドライバー21mmレンチ	6,000円
003-LDTS	ロケータースクエアドライバー15mmレンチ	6,000円
003-100096L	ロケーターコアツール	10,600円
003-100096LEA	ロケーターアバットメントドライバー	5,200円
003-TW30	トルクレンチ30Ncm	25,000円

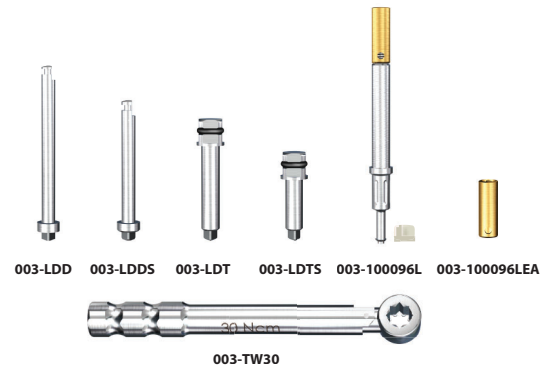

ロケーターコアツール



患者説明用ロケーター®模型

商品コード	品名	価格
040-80031	ロケーターオーバーデンチャー模型 下顎2本	64,000円



040-80031

患者説明用ロケーター®リーフレット

商品コード	品名	価格
900-00003	ロケーター説明用リーフレット 100部 名入れ可 (無料)	5,000円

仕様: A4 3つ折り両面印刷

医院様名や医院様ロゴマークなどをお入れし、きれいなオフセット印刷仕上げでご用意いたします。
(名入れ無しの場合も仕様・価格は同じです。)100部単位でのご注文となります。(納期2週間ほど)

※弊社ホームページからPDFデータをダウンロードしてご利用いただけます。(無料)

900-00003
イメージ

スキャンアダプター・外科 補綴用器具


スキャンアダプター

専用スクリュー1個付属 未滅菌

商品コード	プラットフォーム	品名
003-873009PT	3.0mmD	スキャンアダプター レガシー P3.0
003-873509PT	3.5mmD	スキャンアダプター レガシー P3.5
003-874509PT	4.5mmD	スキャンアダプター レガシー P4.5
003-875709PT	5.7mmD	スキャンアダプター レガシー P5.7

各5,200円

用途: 模型上のアナログ、もしくは口腔内のインプラントに接続し、スキャナーでスキャンし、その形状データとライブラリのデータを重ね合わせることで、インプラントの位置関係を特定

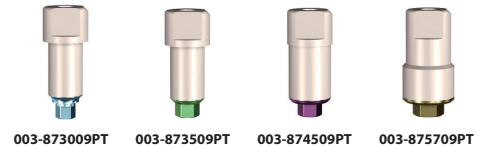


スキャンアダプターのライブラリはこちら


インプラント埋入用 ツール

パーツの落下防止機能付 未滅菌

商品コード	品名	マーキング
プラットフォーム 3.0mmD用		
003-HT2.0LG	2.0mmヘックスインサージョンドライバー L (全長30mm)	2-4-6-8-10mm
003-HT2.0SG	2.0mmヘックスインサージョンドライバー S (全長18mm)	2-4mm
003-HD2.0SG	2.0mmヘックスインサージョンドライバーCA (全長25mm)	2-4mm
プラットフォーム 3.5mmD用		
プラットフォーム 4.5mmD用		
003-HT2.5LG	2.5mmヘックスインサージョンドライバー L (全長30mm)	2-4-6-8-10mm
003-HT2.5SG	2.5mmヘックスインサージョンドライバー S (全長18mm)	2-4mm
003-HD2.5SG	2.5mmヘックスインサージョンドライバーCA (全長25mm)	2-4mm
プラットフォーム 5.7mmD用		
003-HT3.0LG	3.0mmヘックスインサージョンドライバー L (全長30mm)	2-4-6-8-10mm
003-HT3.0SG	3.0mmヘックスインサージョンドライバー S (全長18mm)	2-4mm
003-HD3.0SG	3.0mmヘックスインサージョンドライバーCA (全長25mm)	2-4mm
		各11,900円
003-SSHM	インサージョンハンドドライバー	22,700円
003-FMD	フィクスチャーマウントツールCA	16,000円

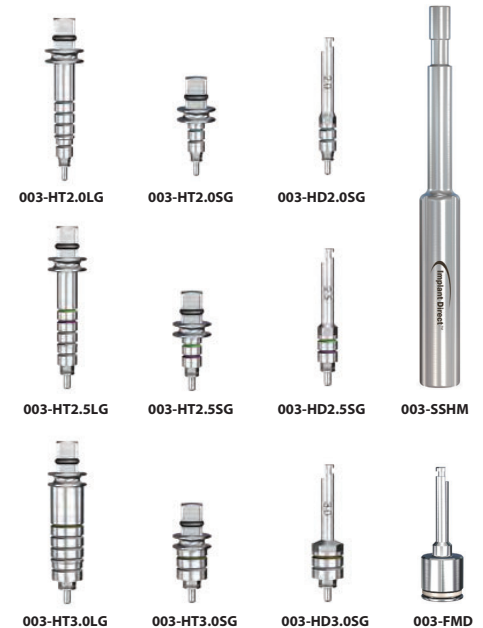

全サイズのインプラント運搬に使用

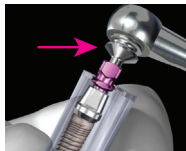

2.5mmヘックスインサージョンドライバー 2.5mmヘックスツールCA

キャリア/トランスファーの頭部に挿入し、バイアルからの運搬、インプラントの途中までの埋入に対応する。



003-FMD

フィクスチャーマウントツールCA

コントラに装着し、インプラントのバイアルからの運搬および埋入途中まで使用する。

パーツ着脱用 ヘックスドライバー

パーツの落下防止機能付 未滅菌

商品コード	品名
003-THT1.25	1.25mmテーパードヘックスドライバー L (全長28mm)
003-THT1.25S	1.25mmテーパードヘックスドライバー S (全長23mm)

各7,900円

用途: カバースクリュー/ヒーリングカラーのキャリアと着脱
アバットメントスクリュー、スクリュー固定式上部構造のスクリューのキャリア 等
先端にテーパーが付与されており、口腔内でのパーツの落下を防止する。



アバットメント締結用 ヘックスドライバー

未滅菌

商品コード	品名
003-HT1.25L	1.25mmヘックスドライバーエクストラロング (最終締結用/全長27mm)
003-HT1.25	1.25mmヘックスドライバーL (最終締結用/全長22mm)
003-HT1.25S	1.25mmヘックスドライバーS (最終締結用/全長18mm)
003-HD1.25	1.25mmヘックスツールCA (最終締結用/全長28mm)

各7,900円

用途: アバットメントスクリュー、スクリュー固定式上部構造のスクリューの最終締結
4mmスクエアを有したツールは、トルクレンチとの併用が可能。



外科 補綴用器具

レンチ器具

未滅菌

商品コード	品名	価格
003-R	ラチェットレンチ (外科用)	25,000円
003-TWE	トルクレンチ 10-90Ncm (外科補綴用)	57,300円
※003-TWEには、003-C8521、003-C9141の2種ドライバーが付属		
040-07005	トルクレンチ20Ncm (補綴用)	39,000円
003-TW30	トルクレンチ30Ncm (補綴用)	25,000円
003-C8521	4×4mmドライバー (4X4 ⇒ TWEレンチに装着/手回しも可)	17,300円
003-C9141	3mmヘックスドライバー (CA ⇒ TWEレンチに装着/手回しも可)	17,300円

トルクレンチ 10-90Ncm(ラチェット機能付)

用途: ラチェット機能付。

ゲージ針で埋入および締結トルクを計測します。


4×4mmドライバー、3mmヘックスドライバー2種が付属します。

↑
トルクレンチに取り付けたアダプター(回転ダイヤル付)

その他器具

未滅菌


商品コード	品名	価格
003-PAR	パラレリングツール2.8/2.3	3,000円
003-LDRILL	ロケータードリル2.3	6,000円
003-DE	ドリルエクステンダー (17mm延長)	11,900円
003-ABH	アバットメントホルダー (補綴用)	17,100円

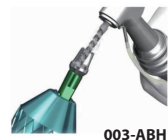

アバットメントホルダー

用途: パーツの切削・研磨時の把持用ハンドル


各種アナログを装着し、その先に取り付けたパーツの切削・研磨する際のハンドルとして使用する。

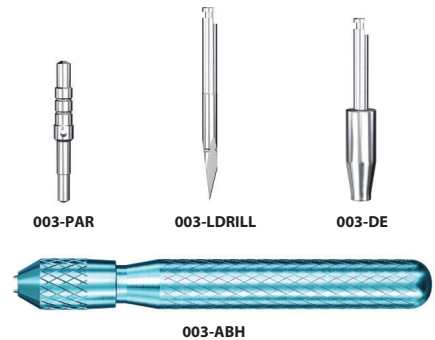

除去用レスキューツール

未滅菌

商品コード	品名	価格
003-IXT	IXTインプラントリムーバルツール	11,900円
003-SXT	SXTスクリューリムーバルツール	11,900円

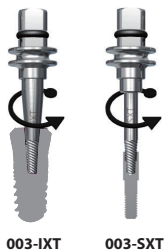

IXTインプラントリムーバルツール

用途: インプラント除去の際、ネック部のインターナルヘックス/オクタゴンにドライバーが嵌合しないケースで使用
レンチにて反時計回しにインプラント内にねじ込んで使用する。

SXTスクリューリムーバルツール

用途: アバットメントスクリュー頭部のドライバーホールにドライバーが嵌合しないケースでのアバットメントスクリューの除去
3.3mmDインプラント除去の際、ネック部のインターナルヘックスにドライバーが嵌合しないケースで使用レンチにて反時計回しにスクリュー頭部のドライバーホールにねじ込んで使用する。
最大90Ncmまで。

オプション

未滅菌

商品コード	品名	価格
040-25001	ヘーベル・メルトン アバットメントホルダー チタン	25,000円

ヘーベル・メルトン アバットメントホルダー チタン

補綴用パーツのピックアップ、装着に使用します。

把持状態で固定され、落下を防止します。(チタン製)



040-25001

ガイドッドサージェリー

GS=ガイドッドサージェリー 単位はmm

ガイドッドサージェリーハンドルキットLG/IA

未滅菌


商品コード	品名	価格
003-G-HK	ガイドッドサージェリーハンドルキットLG/IA	211,000円

ガイドッドサージェリーハンドルキットLG/IA

用途: レガシー / インタラクティブインプラントシステム外科用ドリルに適合

セット構成

- ① ガイドッドサージェリー ハンドル 2.3-2.8
- ② ガイドッドサージェリー ハンドル 3.4-3.8
- ③ ガイドッドサージェリー ハンドル 4.4-4.8
- ④ ガイドッドサージェリー ハンドル 5.1-5.4
- ⑤ ガイドッドサージェリー ドリルアダプター 8種 各1個
(φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm)
- ⑥ ガイドッドサージェリー ツール
- ⑦ ガイドッドサージェリー スペーサー 4個
- ⑧ ガイドッドサージェリー トレイ

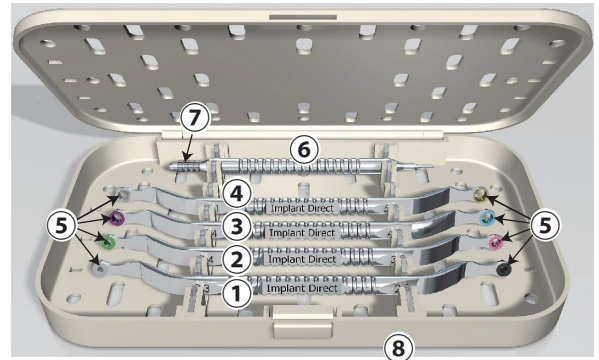

単品

未滅菌

商品コード	品名
003-GS	ガイドッドサージェリー スペーサー (2イリ)
003-GS2.3	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター-2.3 (2イリ)
003-GS2.8	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター-2.8 (2イリ)
003-GS3.4	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター-3.4 (2イリ)
003-GS3.8	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター-3.8 (2イリ)
003-GS4.4	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター-4.4 (2イリ)
003-GS4.8	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター-4.8 (2イリ)
003-GS5.1	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター-5.1 (2イリ)
003-GS5.4	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター-5.4 (2イリ)


各4,700円

GSドリルアダプター

金属製のドリルアダプターはドリルの位置と角度をコントロールします。予めハンドルに装着されています。
全8種 (φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm)

GSハンドル

外科手技中に、サージカルガイドスリーブへGSドリルアダプターを保持するためのハンドルです。
各ハンドルの両端には2つのGSドリルアダプター (全8種) が装着されています。

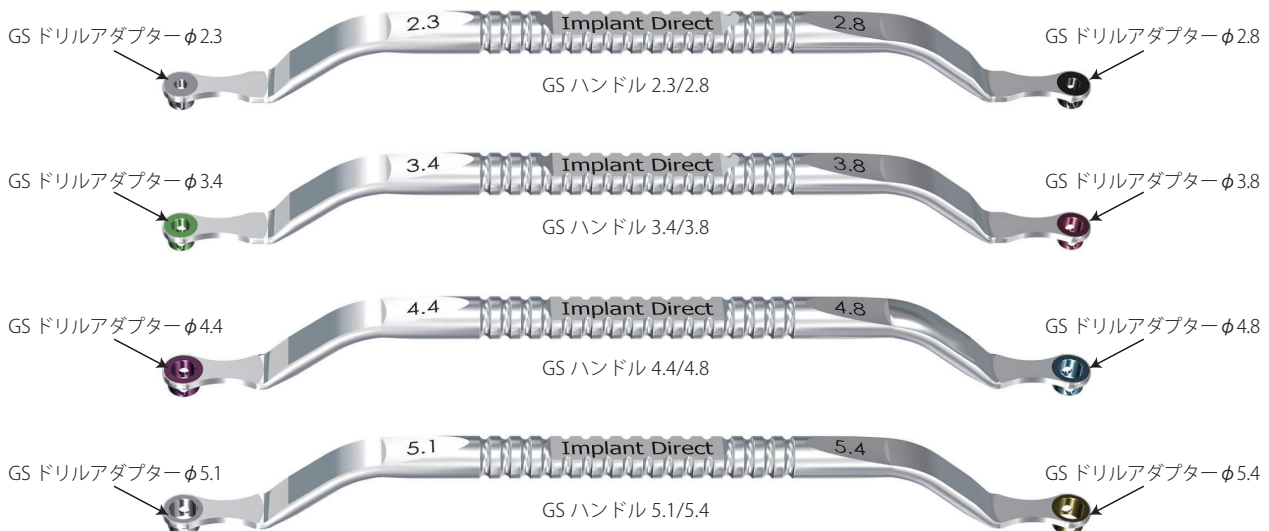

GSツール

GSハンドルへのGSドリルアダプターの脱着に使用します。
GSドリルアダプターからGSスペーサーを取り外す際にも使用します。



GSスペーサー

金属製のリングで、小径のGSドリルアダプターを大径のサージカルガイドスリーブに適合させるためのツールです。
右図のようにGSツール先端にはめ込んで収納します。



ガイドッドサージェリーのポイント

- ブラックドリルと併せてお使いいただくことで、インプラントのプランニングソフトウェア※で設計した埋入計画通りの方向・深度でのインプラント窩の形成が可能です。
※インプラントのプランニングソフトウェアは、日本国内では株式会社アイキャットの「ランドマーカ―®」を使用し、同社のサージカルガイドをご利用ください。

- 4本のガイドッドサージェリーハンドルのそれぞれの両端には、8つのドリル径（φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm）に対応したガイドッドサージェリードリルアダプターが装着されており、レガシー / インタラクティブインプラントのドリルシーケンスに対応します。

※ガイドを利用したの埋入操作はできません。

※ガイドを利用したの CBD ドリルの穿孔はできません。


※6～8 番へ 8mmインプラントを埋入する場合、ガイド高さが高くなり器具が口腔内に入らないことがあります。

※13mm長のインプラントの埋入で、骨状況によりガイドの厚みや必要なスリーブ長が確保できないことがあります。



■ドリルはImplant Direct社 ブラックドリルをご使用ください。

- ⚠旧タイプのドリルではご使用いただけません。
※旧タイプのドリルにはハブが無く、サージカルガイドのサージカルガイドスリーブで止まりません。

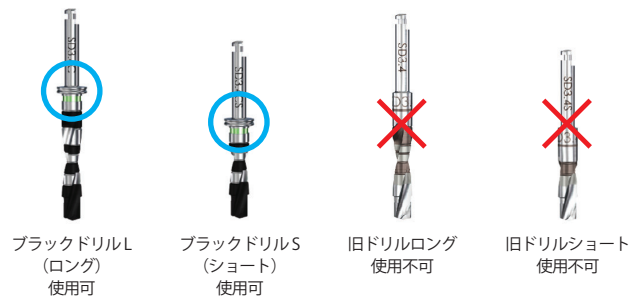

ドリル長と穿孔できるインプラント長の関係

ブラックドリル L ⇒ 対応インプラント：8mmL、10mmL、11.5mmL、13mmL

ブラックドリル S ⇒ 対応インプラント：6mmL

- ⚠非対応インプラント長：16mmL
※本システムは 16mmL インプラントの穿孔には対応していません。

ブラックドリル L (ロング)	ブラックドリル S (ショート)
対応インプラント	対応インプラント
8mmL	6mmL
10mmL	
11.5mmL	
13mmL	

オプション

未滅菌

商品コード	品名	
310-15000	T's BS フラットドリル GS	12,000円

T'sボーンスプレディングフラットドリル ガイテッドサージェリー用
起始点周囲をフラットにします。

使用方法

- ① φ2.3mmドリル使用前に、ガイドッドサージェリーハンドルのφ2.8を使用し、T's BS フラットドリル GSを使って1～3mm穿孔し、起始点周囲（φ2.8mmの範囲）をフラットにする。
- ② ガイテッドサージェリーハンドルのφ2.3を使用し、φ2.3mmドリルでドリルのハブまで穿孔する。
- ③ ガイテッドサージェリーハンドルのφ2.8を使用し、φ2.8mmドリルでドリルのハブまで穿孔する。
- ④ 以下同様に、必要なドリル径まで拡大・穿孔する。



※旧タイプのドリルの詳細は、右記QRコードからご確認いただけます。
在庫が無くなり次第取扱い終了となります。



サージカルドリル（ブラックドリル）

ドリルのカラーコードは、レガシーサージカルトレイ（右図の外科トレイ）のカラーコードとリンクしています。



3.2mmDインプラント用

未滅菌

商品コード	直径	マーキング
003-SD2.3C	2.3/2.0mmD	6-16mm
003-SD2.3CS	2.3/2.0mmD	6-13mm（ショートタイプ）
003-SD2.8C	2.8/2.3mmD	6-16mm
003-SD2.8CS	2.8/2.3mmD	6-13mm（ショートタイプ）

各15,200円

003-CBD3.2C

3.0/3.9mmD

コーティカルボンドドリル
硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用
16,200円



3.7mmDインプラント用

未滅菌


商品コード	直径	マーキング
003-SD3.4C	3.4/2.8mmD	6-16mm
003-SD3.4CS	3.4/2.8mmD	6-13mm（ショートタイプ）

各15,200円

003-CBD3.7C

3.6/4.9mmD

コーティカルボンドドリル
硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用
16,200円

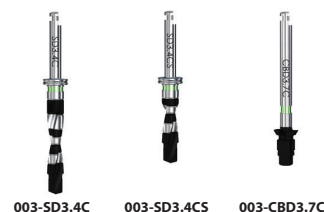

4.2mmDインプラント用

未滅菌


商品コード	直径	マーキング
003-SD3.8C	3.8/3.4mmD	6-16mm
003-SD3.8CS	3.8/3.4mmD	6-13mm（ショートタイプ）

各15,200円

003-CBD4.2C

4.1/4.9mmD

コーティカルボンドドリル
硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用
16,200円

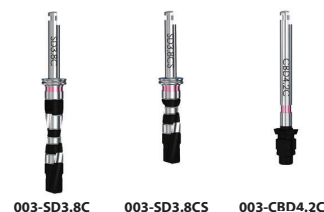

4.7mmDインプラント用

未滅菌


商品コード	直径	マーキング
003-SD4.4C	4.4/3.8mmD	6-16mm
003-SD4.4CS	4.4/3.8mmD	6-13mm（ショートタイプ）

各15,200円

003-CBD4.7C

4.6/5.9mmD

コーティカルボンドドリル
硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用
16,200円

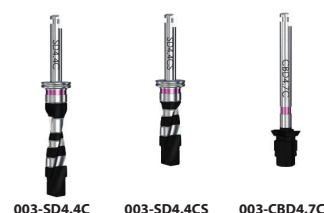

5.2mmDインプラント用

未滅菌

商品コード	直径	マーキング
003-SD4.8C	4.8/4.4mmD	6-16mm
003-SD4.8CS	4.8/4.4mmD	6-13mm（ショートタイプ）

各15,200円

003-CBD5.2C

5.1/5.9mmD

コーティカルボンドドリル
硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用
16,200円



5.7mmD & 7.0mmDインプラント用

未滅菌

商品コード	直径	マーキング
003-D5.1C	5.1mmD	6-16mm
003-D5.1CS	5.1mmD	6-13mm（ショートタイプ）
003-SD5.4C	5.4/4.8mmD	6-16mm
003-SD5.4CS	5.4/4.8mmD	6-13mm（ショートタイプ）

各15,200円

003-CBD5.7C

5.7/6.7mmD


コーティカルボンドドリル
硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用
コーティカルボンドドリル
深めの埋入もしくは非常に硬骨質でのインプラント窩
およびカウンターシンク形成用

※7.0mmDインプラントを大き目の抜歯窩に埋入する場合は、**CBD7.0Cドリル**を使用しない場合もあります。

各16,200円



ドリルスコアライン

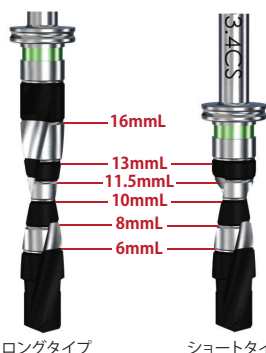

ロングタイプ

ショートタイプ

10mmL
スコアライン

10mmL

スコアラインの距離は、先端・肩間
の約2/3からです。

ドリルの回転数は600～1,250rpmを
推奨いたします。

注意: 深度ラインのパターンが旧タイプのドリルとは異なるので、旧タイプのドリルとの混合使用は避けください。


インプラント埋入ドリルチャート

	Soft Bone ファイナル		Dense Bone ファイナル		骨孔浅部拡大・形成
3.2mmD 			Soft Bone ファイナル  003-SD2.3C 2.3/2.0mmD	Dense Bone ファイナル  003-SD2.8C 2.8/2.3mmD	オプション (骨孔浅部拡大・形成)  003-CBD3.2C
3.7mmD 	オプション  003-SD2.3C 2.3/2.0mmD		Soft Bone ファイナル  003-SD2.8C 2.8/2.3mmD	Dense Bone ファイナル  003-SD3.4C 3.4/2.8mmD	オプション (骨孔浅部拡大・形成)  003-CBD3.7C
4.2mmD 	オプション  003-SD2.3C 2.3/2.0mmD		Soft Bone ファイナル  003-SD3.4C 3.4/2.8mmD	Dense Bone ファイナル  003-SD3.8C 3.8/3.4mmD	オプション (骨孔浅部拡大・形成)  003-CBD4.2C
4.7mmD 	オプション  003-SD2.3C 2.3/2.0mmD		Soft Bone ファイナル  003-SD3.8C 3.8/3.4mmD	Dense Bone ファイナル  003-SD4.4C 4.4/3.8mmD	オプション (骨孔浅部拡大・形成)  003-CBD4.7C
5.2mmD 	オプション  003-SD2.3C 2.3/2.0mmD		Soft Bone ファイナル  003-SD4.4C 4.4/3.8mmD	Dense Bone ファイナル  003-SD4.8C 4.8/4.4mmD	オプション (骨孔浅部拡大・形成)  003-CBD5.2C
5.7&7.0mmD 	オプション  003-SD2.3C 2.3/2.0mmD		Soft Bone ファイナル  003-D5.1C 5.1mmD	Dense Bone ファイナル  003-SD5.4C 5.4/4.8mmD	オプション (骨孔浅部拡大・形成) 5.7mmD用  003-CBD5.7C 7.0mmD用  003-CBD7.0C


※ 青字の「オプション」のステップは、骨質が脆弱な症例では省くことがあります。

※ 7.0mmDインプラントを大き目の抜歯窩に埋入する場合は、**CBD7.0C**ドリルを使用しない場合もあります。


CBDドリル

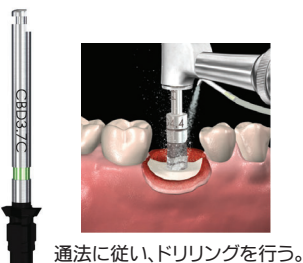


〔硬骨質の場合〕

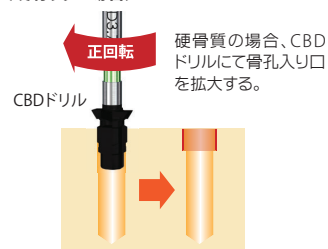

〔アバットメント基底部分を骨縁下に設置する場合〕

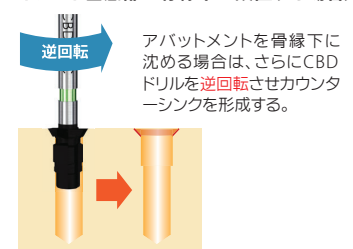

サージカルトレイコンテンツ

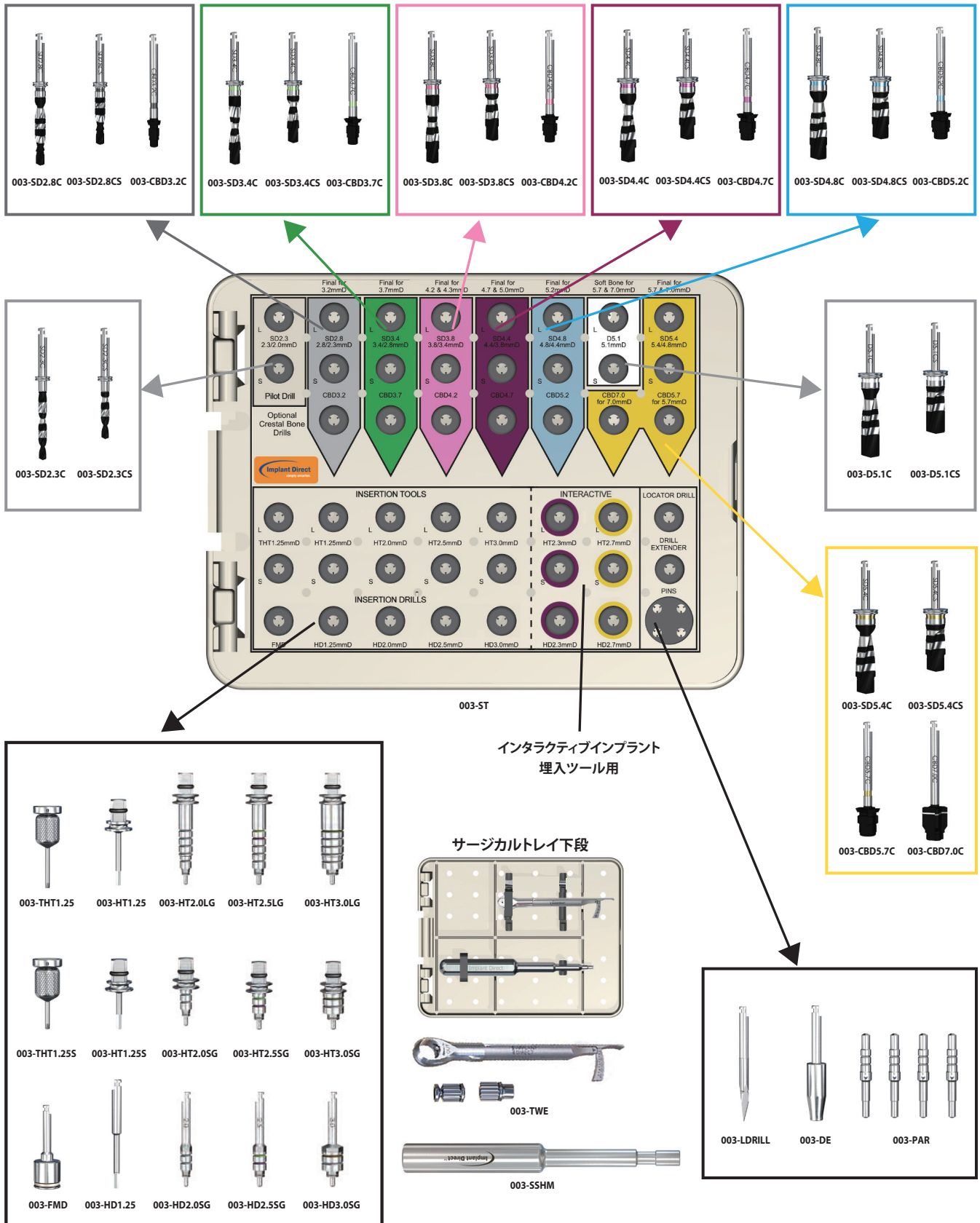

サージカルトレイ (003-ST) :

外科手術に使用するドリル、インサクションツール、ドライバー等の専用インストルメントを収納し、オートクレーブ滅菌*が可能なオーガナイザーです。スタッフによる器具類の管理を簡便にします。ドリルは埋入するインプラントの直径にリンクし、カラーコード化しているため、手術時のサイズ認識に有効です。


推奨滅菌条件: 高圧蒸気滅菌 132℃ 15分間

サージカルキット

レガシー用外科キット・トレイ

未滅菌

商品コード	品名	価格
004-00011	レガシー 外科コンプリートキット	548,700円
004-00012	レガシー 外科ベーシックキット	330,500円
003-ST	レガシーサージカルトレイ	58,400円

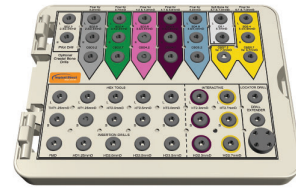

003-ST

商品コード	商品名	単品価格	コンプリート キット	ベーシック キット
003-ST	レガシーサージカルトレイ	58,400円	●	●
003-SD2.3C	ブラックステップドリル2.3/2.0L	15,200円	●	●
003-SD2.3CS	ブラックステップドリル2.3/2.0S	15,200円	●	●
003-SD2.8C	ブラックステップドリル2.8/2.3L	15,200円	●	●
003-SD2.8CS	ブラックステップドリル2.8/2.3S	15,200円	●	●
003-CBD3.2C	ブラックコーティカルボンドリル3.2用	16,200円	●	
003-SD3.4C	ブラックステップドリル3.4/2.8L	15,200円	●	●
003-SD3.4CS	ブラックステップドリル3.4/2.8S	15,200円	●	●
003-CBD3.7C	ブラックコーティカルボンドリル3.7用	16,200円	●	●
003-SD3.8C	ブラックステップドリル3.8/3.4L	15,200円	●	●
003-SD3.8CS	ブラックステップドリル3.8/3.4S	15,200円	●	●
003-CBD4.2C	ブラックコーティカルボンドリル4.2用	16,200円	●	●
003-SD4.4C	ブラックステップドリル4.4/3.8L	15,200円	●	
003-SD4.4CS	ブラックステップドリル4.4/3.8S	15,200円	●	
003-CBD4.7C	ブラックコーティカルボンドリル4.7用	16,200円	●	
003-SD4.8C	ブラックステップドリル4.8/4.4L	15,200円	●	
003-SD4.8CS	ブラックステップドリル4.8/4.4S	15,200円	●	
003-CBD5.2C	ブラックコーティカルボンドリル5.2用	16,200円	●	
003-D5.1C	ブラックストレートドリル5.1L	15,200円	●	
003-D5.1CS	ブラックストレートドリル5.1S	15,200円	●	
003-SD5.4C	ブラックステップドリル5.4/4.8L	15,200円	●	
003-SD5.4CS	ブラックステップドリル5.4/4.8S	15,200円	●	
003-CBD5.7C	ブラックコーティカルボンドリル5.7用	16,200円	●	
003-CBD7.0C	ブラックコーティカルボンドリル7.0用 ※	16,200円	●	
003-THT1.25	1.25mmテーパードヘックスドライバー	7,900円	●	●
003-THT1.25S	1.25mmテーパードヘックスドライバーS	7,900円	●	●
003-HT1.25	1.25mmヘックスドライバー	7,900円	●	●
003-HT1.25S	1.25mmヘックスドライバーS	7,900円	●	●
003-HT2.0LG	2.0mmヘックスインサージョンドライバー	11,900円	●	
003-HT2.0SG	2.0mmヘックスインサージョンドライバーS	11,900円	●	
003-HT2.5LG	2.5mmヘックスインサージョンドライバー	11,900円	●	●
003-HT2.5SG	2.5mmヘックスインサージョンドライバーS	11,900円	●	●
003-HT3.0LG	3.0mmヘックスインサージョンドライバー	11,900円	●	
003-HT3.0SG	3.0mmヘックスインサージョンドライバーS	11,900円	●	
003-HD1.25	1.25mmヘックスツールCA	7,900円	●	●
003-HD2.0SG	2.0mmヘックスインサージョンドライバーCA	11,900円	●	
003-HD2.5SG	2.5mmヘックスインサージョンドライバーCA	11,900円	●	●
003-HD3.0SG	3.0mmヘックスインサージョンドライバーCA	11,900円	●	
003-FMD	フィクスチャマウントツールCA	16,000円	●	●
003-LDRILL	ロケタードリル2.3	6,000円	●	●
003-DE	ドリルエクステンダー	11,900円	●	
003-TWE	トルクレンチ 10-90Ncm ※003-C8521 4×4mmドライバー付属	57,300円	●	●
003-PAR	パラリングツール2.8/2.3	3,000円	●(キットは4本入り)	●(キットは2本入り)
003-SSHM	インサージョンハンドドライバー	22,700円	●	
004-00011	レガシー 外科コンプリートキット		548,700円	
004-00012	レガシー 外科ベーシックキット			330,500円

単品価格計(参考)▶ 671,300円 372,900円

※ブラックコーティカルボンドリル 7.0 用はコンプリートキットに含まれません。
7.0mmD インプラントを大きい目の抜歯窩に埋入する場合は、CBD7.0C ドリルを使用しない場合もあります。

ドリルストップキット

シンプルで直感的なシステムと一貫性のある正確な深度制御で、より安定した治療を術者・患者様に提供します。

【特徴】

- ドリルストップは 6, 8, 10, 11.5, 13, 16mm の各インプラント長に対応します。
穿孔深度の正確な制御を提供し、過度な穿孔の危険性を減らします。
 - 生物学的適合性材料であるチタン製で、最高 30 回の使用と滅菌工程に対応します。
 - 側面に開口部があるため、効率よくドリルに注水できます。
 - 術中の簡便・正確な器具選択のため、ドリルストップキットとブラックドリルは、それぞれカラーコード化されています。
 - ドリルストップは、クリップデザインにより着脱が容易です。
 - 各ドリルストップは、ブラックドリルの 2 種の直径に対応した 4 種類
(N: ナロー, R: レギュラー, W: ワイド, XW: エクストラワイド) が用意されます。
- ※ドリルストップはブラックドリル専用です。



ドリルストップ キット

商品コード	品名	対応穿孔深度	内容	価格
003-CDSKL	ドリルストップキット ロング用	6mm - 16mm	ロングドリル用ドリルストップ 24個、ロング用トレイ(003-DSKL)	260,000円
003-CDSKS	ドリルストップキット ショート用	6mm - 13mm	ショートドリル用ドリルストップ 20個、ショート用トレイ(003-DSKS)	240,000円



003-CDSKL



003-CDSKS

ドリルストップキット用トレイ


商品コード	品名	価格
003-DSKL	ドリルストップキットトレイ ロング用	98,000円
003-DSKS	ドリルストップキットトレイ ショート用	98,000円



003-DSKL




003-DSKS

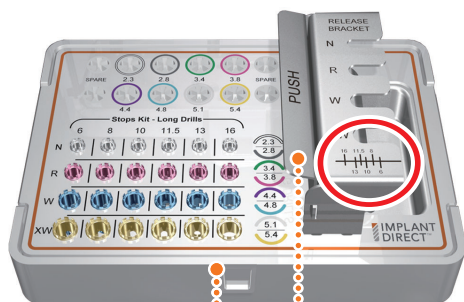


使用方法


- コンパクトな設計で、ドリルストップとブラックドリルの保管・管理に便利です。
ドリルストップとブラックドリルは、収納したまま滅菌可能です。
- ロングドリル用とショートドリル用の 2 種を選択できます。ロングドリル用は 6~16mm、ショートドリル用は、6~13mm の穿孔深度に対応します。
- ドリルストップキットは、ドリルストップのサイズ・長さの確認のため、下記の 3 通りの方法が用意されています。
 - ・ストップおよびキットトレイに記載された数値
 - ・トレイ側面からのブラケットによる長さの識別マークの付与
 - ・リリースブラケットにあるドリルデプススレー (図の ○ 部)

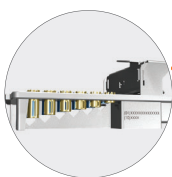

側面より長さを確認できます。

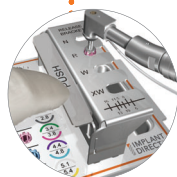

PUSHボタンでストップの取り外しができます。

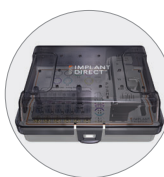

専用トレイにより安全に保管できます。



ステンレス製のトレイは取り外しが可能で、使用後のドリルストップの収集エリアとして機能します。

ドリルストップ (単品)

(取寄品) お取り寄せ品について：ご注文からお届けまでに2〜4週間ほどかかる場合がございます。お急ぎの際は、事前に納期をご確認ください。

ロングドリル用 ナロー／レギュラー

未滅菌 (取寄品)

商品コード	穿孔深度	対応ドリル直径
003-DSN06	6mm	2.3、2.8mmD
003-DSN08	8mm	2.3、2.8mmD
003-DSN10	10mm	2.3、2.8mmD
003-DSN11	11.5mm	2.3、2.8mmD
003-DSN13	13mm	2.3、2.8mmD
003-DSN16	16mm	2.3、2.8mmD
003-DSR06	6mm	3.4、3.8mmD
003-DSR08	8mm	3.4、3.8mmD
003-DSR10	10mm	3.4、3.8mmD
003-DSR11	11.5mm	3.4、3.8mmD
003-DSR13	13mm	3.4、3.8mmD
003-DSR16	16mm	3.4、3.8mmD



各 7,400円

ロングドリル用 ワイド／エクストラワイド

未滅菌 (取寄品)

商品コード	穿孔深度	対応ドリル直径
003-DSW06	6mm	4.4、4.8mmD
003-DSW08	8mm	4.4、4.8mmD
003-DSW10	10mm	4.4、4.8mmD
003-DSW11	11.5mm	4.4、4.8mmD
003-DSW13	13mm	4.4、4.8mmD
003-DSW16	16mm	4.4、4.8mmD
003-DSXW06	6mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW08	8mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW10	10mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW11	11.5mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW13	13mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW16	16mm	5.1、5.4mmD




各 7,400円

ドリルストップ「ロング」用キット (003-CDSKL) に含まれます。

ショートドリル用 ナロー／レギュラー

未滅菌 (取寄品)

商品コード	穿孔深度	対応ドリル直径
003-DSN06S	6mm	2.3、2.8mmD
003-DSN08S	8mm	2.3、2.8mmD
003-DSN10S	10mm	2.3、2.8mmD
003-DSN11S	11.5mm	2.3、2.8mmD
003-DSN13S	13mm	2.3、2.8mmD
003-DSR06S	6mm	3.4、3.8mmD
003-DSR08S	8mm	3.4、3.8mmD
003-DSR10S	10mm	3.4、3.8mmD
003-DSR11S	11.5mm	3.4、3.8mmD
003-DSR13S	13mm	3.4、3.8mmD

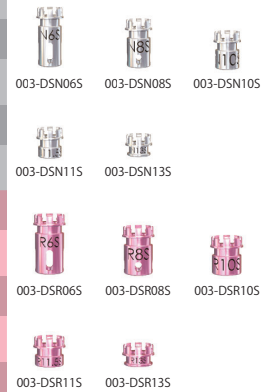


各 7,400円

ショートドリル用 ワイド／エクストラワイド

未滅菌 (取寄品)

商品コード	穿孔深度	対応ドリル直径
003-DSW06S	6mm	4.4、4.8mmD
003-DSW08S	8mm	4.4、4.8mmD
003-DSW10S	10mm	4.4、4.8mmD
003-DSW11S	11.5mm	4.4、4.8mmD
003-DSW13S	13mm	4.4、4.8mmD
003-DSXW06S	6mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW08S	8mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW10S	10mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW11S	11.5mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW13S	13mm	5.1、5.4mmD

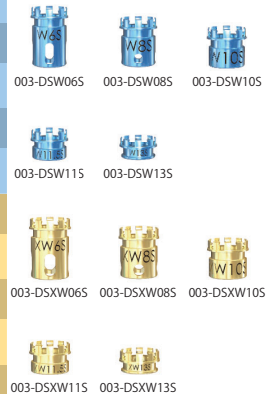

各 7,400円


ドリルストップ「ショート」用キット (003-CDSKS) に含まれます。

ドリルストップ 記載文字・カラーコード 対応ドリル直径


N	= ナロー	2.3mmD、2.8mmD
R	= レギュラー	3.4mmD、3.8mmD
W	= ワイド	4.4mmD、4.8mmD
XW	= エクストラワイド	5.1mmD、5.4mmD



ブラックドリルにドリル
ストップを装着

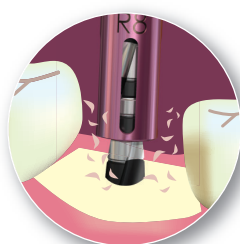

ドリルストップ使用に
よる適正な深度での穿孔

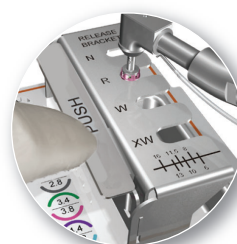

リリースブラケットにより
ワンタッチで取り外し




次番手へとスムーズに移行

埋入手術手順



開封前に商品箱・ラベル表示にてサイズ等に相違ないか確認する。インプラントは2重バイアルに梱包されている。(内部は滅菌済)

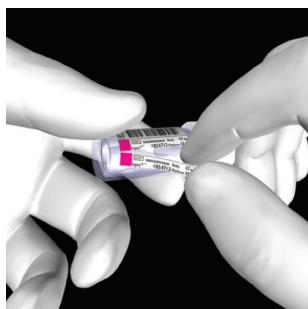

外バイアルのインプラント情報が記載されたラベルを剥がし、カルテに貼付する。




外バイアルのキャップを反時計回しで開封する。



内バイアルを清潔域にスライドさせ落とす。



内バイアルは側面の半分が開封されているので、インプラント体に触れないよう注意すること。

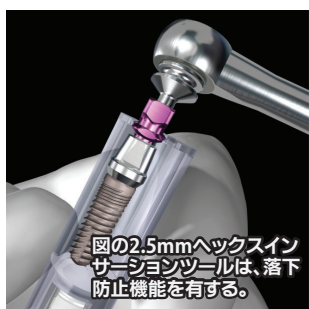


図の2.5mmヘクスインサージョンツールは、落下防止機能を有する。

キャリア/トランスファー頭部をインサージョンツールで把持し、内バイアルからインプラントを取り出す。



インプラント窩へキャリアーし、噛み込み防止のために、ある程度の固定が得られるまで埋入し、キャリアーを取り外す。

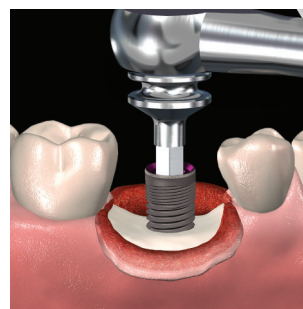

インプラント径に適合したヘクスインサージョンドライバーを挿入し、所定の深度まで埋入する。




埋入を完了する。


※角度付きアバットメントを使用する際は下記の“埋入のポイント”を参照




内バイアル底部に、2mmHのエクステンダーとカバースクリューが収納されている。1.25mmテーパードヘクスドライバーで取り外す。

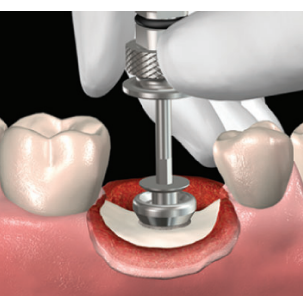

【1回法】付属の2mmHエクステンダー、もしくは別売りのヒーリングカラーを装着し、縫合する。

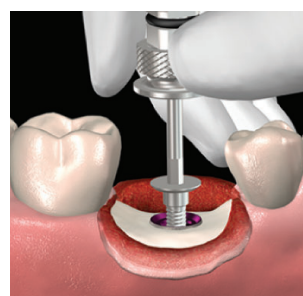

【2回法】カバースクリューをインプラント体に装着し、縫合する。

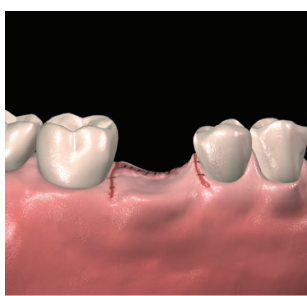


角度付きアバットメントを使用する際の埋入のポイント

インプラント内部のヘクス面の向きは、インサージョンドライバーのヘクス面で確認できます(図1)。

また、角度付きアバットメントのマーatinの低い面(唇側面)は、アバットメントのヘクス面の向きに設定されています(図2)。

インプラント埋入を終える際、インサージョンドライバーのヘクス面を目安にし、内部ヘクス面の位置を調整することで、角度付きアバットメントの向きを、隣在歯の唇側面を考慮した補綴的・審美的に望ましい向きに設定することができます(図3)。

図 1.

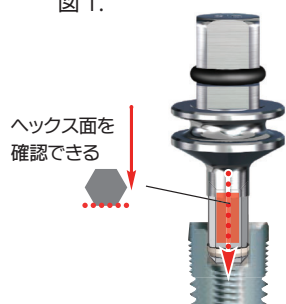

ヘクス面を確認できる

図 2.




マーatinの低い面(唇側面)

角度付きアバットメントのヘクス面


図 3.




チェアサイドでのアバットメントの形成手順

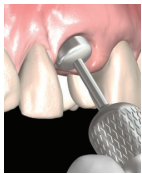


1.25ヘックスドライバーを用いて、ヒーリングカラーを除去する。

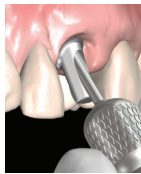

1.25ヘックスドライバーを用いて、アバットメントを装着する。

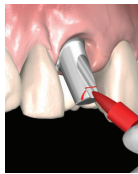


適切な形成を行うよう、削合部位をマーキングする。

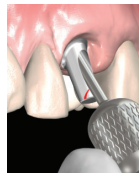


1.25ヘックスドライバーを用いて、アバットメントを除去する。




アナログにアバットメントを装着し、適切な支台歯形状に形成する。

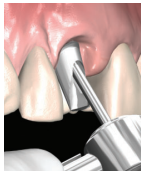


トルクレンチを用い、30Ncmにて形成したアバットメントを装着する。

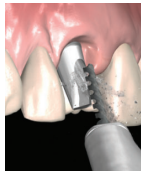


高速かつ十分な注水下にてマージンを調整する。

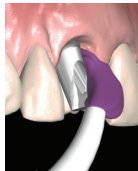

通法に従い、印象採得を行う。

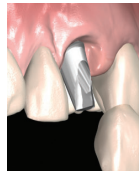

形成したアバットメントにプロビジョナルをセメンティングする。

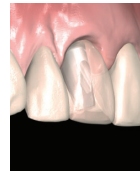


装着されたプロビジョナル。

印象採得手順

インダイレクト(クローズドトレイ)法




トランスファー (クローズドトレイ用) アナログ

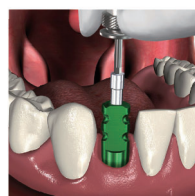


トランスファー側方の切りかけ面を唇頬側に向け、インプラント内部のヘックスに確実に合うように装着する。頭部のホールを寒天印象材・ワックス等で封鎖し、印象材の侵入を防止する。(印象材の侵入は正確な印象採得の妨げとなる)




シリコン印象材(ライトボディ)をトランスファー周囲に塗布し覆う。

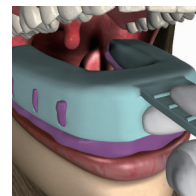


シリコン印象材(ヘビーボディ)で印象トレイを満たし、フルアーチの印象を採得する。印象採得後、トランスファーをインプラントから取り外し、採得した印象と合わせて技工所へ送る。

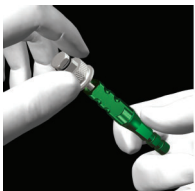


トランスファーをインプラントアナログと連結する。

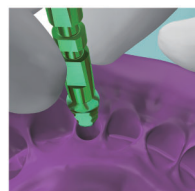


トランスファー頭部を、印象内の切りかけ面に注意し、相当する位置・方向に差し込む。最終的な位置まで沈み込むよう確実に押し込む。

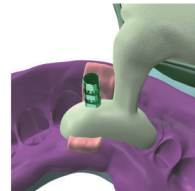


アナログ周囲に人工歯肉材を築盛し、石膏を注入する。

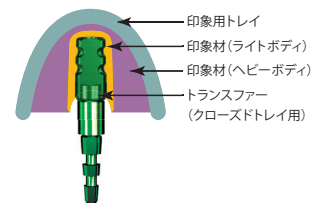

ダイレクト(オープントレイ)法

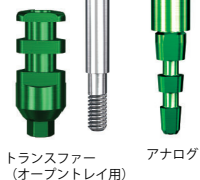


トランスファー (オープントレイ用) アナログ

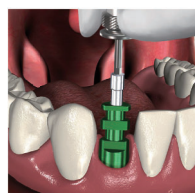


口腔内のインプラントにトランスファーを装着する。




シリコン印象材(ライトボディ)をトランスファー周囲に塗布し覆う。

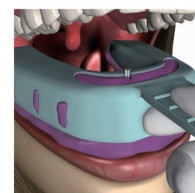


シリコン印象材(ヘビーボディ)で印象トレイを満たし、フルアーチの印象を採得する。トレイ天蓋を貫通したトランスファー頭部の余剰印象材を取り除く。硬化後、トレイの外側からスクリューを緩め、トレイとともにトランスファーを取り外し、技工所へ送る。

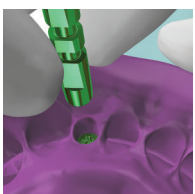

印象内のトランスファーにインプラントアナログを連結する。その際、アナログが回転しないようにピンセットで把持する。

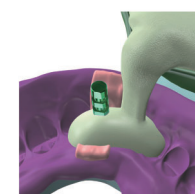

トランスファー周囲に人工歯肉材を築盛し、石膏を注入する。

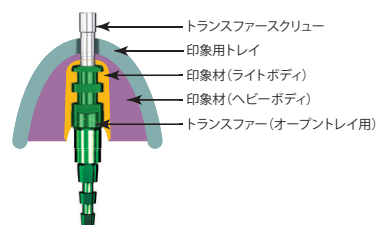

ダイレクト(オープントレイ)法では、トレイの外にスクリューが貫通するため、トレイの外側から着脱操作できる構造となる。

ボールアタッチメントの取り込み方


ラボサイドでの取り込み(トランスファー模型上でデンチャーを製作)




トルクレンチを用い、30Ncmでボールアタッチメントを締結する。
※図は埋入即時の締結



埋入即時の場合は、付属のコンフォートキャップを頭部に押し込んで装着し、周囲を縫合する。

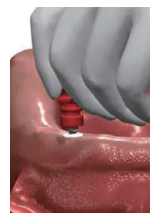

印象採得&模型製作のため、付属の専用トランスファーを頭部に取り付け。

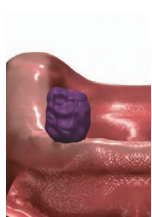

トランスファーをシリコン印象材のライトボディで取り込む。




ヘビーボディで満たした印象トレーで印象を採得する。



トレーを除去し、ボールアタッチメント頭部に、コンフォートキャップを再度取り付ける。




印象内のトランスファーに専用アナログを装着する。

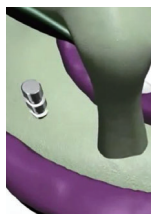


石膏を注入する。




石膏硬化後、アナログからトランスファーを除去しアナログ模型を完成させる。

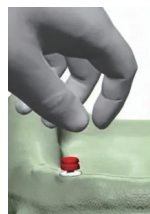


ナイロンライナートランスファーを頭部に装着する。

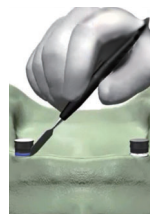

ハウジング同士が平行になるように装着し、シリコンまたはワックスで下部のアンダーカットを封鎖する。
※ハウジングは28度まで傾斜可能。

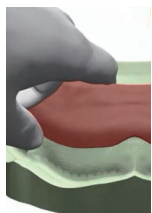

光重合レジンハウジングにのせ、重合させる。(ハウジングを基礎床に取り込む。

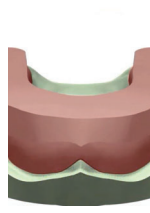


基礎床に咬合堤を築盛する。



頭部に残ったナイロンライナートランスファーをハウジングに戻す。



咬合採得のため、口腔内に咬合床を装着し咬合を採得する。人工歯排列を行い、口腔内で試適・調整して義歯を製作する。

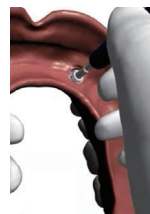

ナイロンライナートランスファーを除去したハウジングにナイロンライナーを押し込み取り付け。取り付けは一つずつ行い、口腔内で維持力を調整する。



最終調整を行い、義歯を完成させる。

チェアサイドでの取り込み



口腔内にキャップアタッチメントが取り付けられる位置を確認し、床内面を削合する。アタッチメント頭部にナイロンライナートランスファーを装着する。



削合した床内面の穴に即時重合レジン少量流し込み、義歯を口腔内の正しい位置に装着する。ハウジングが義歯床内に取り込まれる。



ナイロンライナートランスファーを除去したハウジングにナイロンライナーを押し込み取り付け。取り付けは一つずつ行い、口腔内で維持力を調整する。



最終調整を行い、義歯を完成させる。

インプラント 臨床レポート集

Implant Direct 社インプラントをご使用の先生方による臨床レポートをご覧ください。

【URL】 <https://www.itx.co.jp/implant/report/>

インプラント 臨床レポート集

2021年4月（イントララクティブインプラント）

「ガイドシステムを選択する本当のメリット」
植田幹久先生（北海道 植田歯科医院）

2020年4月（レガシーシステム）

「ガイドシステムを利用したインプラント治療」
大山 高太郎先生（東京都 大山歯科医院）

2019年1月（イントララクティブインプラント）

「イントララクティブインプラントによるリカバリー症例」
須田 善行先生（札幌市 医療法人社団 星美会 さっぽろ石山通り歯科）



臨床レポート一覧は
こちら

外科 補綴 テクニカル Q&A

Legacy™インプラントを使用される際のテクニカル Q&A（よくあるご質問）をまとめました。【URL】 <https://www.itx.co.jp/implant/technical/>
外科や補綴の技術的なワンポイント情報を確認いただける一覧（PDF）です。

外科

Q：レガシーインプラント埋入時のマウントを外すタイミングは？

A：レガシーインプラント1,2,3には、機能豊富なマウントが搭載されています。
埋入時にはインプラントのキャリアの機能が発揮されますが、
ある程度骨孔にインプラントが固定された時点での除去をお勧めいたします。
外した後のインプラント上部には、ヘックスインサージョンツールを挿入し所定の深さまで埋入します。
同ツールはマウントよりも長く、インプラント上部が見えやすいため、深さの確認が容易になります。
また、先端のヘックス部は先鋭型ですので破折等のトラブルを防ぎます。下図はレガシー2の例です。



マウントが連結された状態でキャリアし、ある程度固定されるまで挿入。
マウントをインプラントから除去。
インサージョンツールにて所定の深さまで挿入。

外科

Q：Legacy™インプラントを深めに埋入する際の注意点と、硬組織症例への対処法は？

A：骨が硬いケースまたはインプラントを深めに埋入させざるを得ないケースの場合は、
埋入インプラントの直後に合ったCBDドリルでインプラント埋入高を調整します。

Legacy™インプラントを深めに埋入する際の注意点
CBDドリルを用いたインプラント埋入高調整法



詳細はこちら

スキャンアダプターのライブラリデータ

◆ライブラリデータの入手方法

Implant Direct 社では exocad、DentalWings、3Shape 用のライブラリデータをご用意しています。

各社の WEB サイト・ダウンロード・センターからダウンロードすることができます。

（インプラテックスでは供給できません。）

◆ライブラリデータ内の表記と弊社商品コードの関係

各商品はライブラリデータ内に下線部のように表記されています。

弊社商品コード「003-873509PT」

⇒ライブラリデータ内表記「8735-09PT_Scan」

（例：レガシーインプラントプラットフォーム 3.5mmD 用スキャンアダプター）

【URL】 https://www.itx.co.jp/implant/scan_library/

※Implant Direct 社から供給が終了しているライブラリデータもダウンロードできます。

スキャンアダプターのライブラリデータ

◆ライブラリデータの入手方法

インプラントダイレクト社ではexocad、DentalWings、3Shape用のライブラリデータをご用意しています。
各社のWEBサイト・ダウンロード・センターからダウンロードすることができます。

※Implant Direct社からの供給が終了しているライブラリデータは、下記からダウンロードいただけます。

[ImplantDirect_AnalogLibrary.zip](#)
[ImplantDirect_EU.zip](#)

※ダウンロードしたライブラリデータの保存場所（exocad）は以下となります。
こちらに収納してください。

・「ImplantDirect_EU」：「DentalCADApp」⇒「library」⇒「implant」
・「ImplantDirect_AnalogLibrary」：「DentalCADApp」⇒「library」⇒「modelcreator」⇒「implant」

◆ライブラリデータ内の表記と弊社商品コードの関係

各商品はライブラリデータ内に下線部のように表記されています。

弊社商品コード「003-873509PT」⇒ ライブラリデータ内表記「8735-09PT_Scan」

（例：レガシーインプラントプラットフォーム3.5mmD用スキャンアダプター）



詳細はこちら

ImplantDirect 社製インプラントの MRI 撮影について

非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示されています。

【URL】 https://www.itx.co.jp/implant/legacy_system/#9

本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全に MR 検査を実施することが可能です。（自己認証による。）

- ・ 静磁場強度：1.5T 又は 3.0T
- ・ 静磁場強度の勾配：40T/m (4,000gauss/cm)
- ・ MR 装置が示す最大全身平均 SAR：2W/kg

（通常操作モード 60 分間スキャンング パルスシーケンスごと）

上記条件で 15 分のスキャン時間（パルスシーケンスごと）において本品に生じ得る最大の温度上昇は 1.5℃以下、

本品により 3T の MR 装置において勾配磁場エコー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像から 15mm である。



詳細はこちら

補綴コンポーネント用途一覧

セメント固定式



カントウアー アバットメント

チタン合金製。
前歯部をイメージしたマージン
を付与した、加工の時間と
手間を抑えるデザイン。
カラー部高さと支台角度に選
択肢を用意。



ワイドラボ アバットメント

チタン合金製。
削合による形成を前提にして
おり、加工の自由度が高く、
強度も高い。



ストレートアバットメント

チタン合金製。
アバットメントレベルのトラン
スファアとアナログも用意し、
加工の時間と手間を抑える
デザイン。



CT アバットメント

チタン合金製。
トランスファアとアバットメント
として使用可能。加工の時間と
手間を抑えるデザイン。
※レガシー3に付属




ゴールドアバットメント

金合金製。
銲接により、カスタムメイド
のアバットメントを製作する
タイプ。ラインナップ中、最も
加工の自由度が高く、チタン
製アバットメントでは対応
できない設計に選択。



スクリー固定式

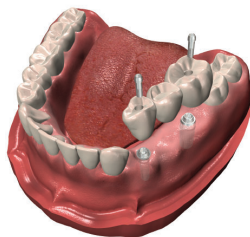

スクリー固定式 アバットメント

チタン合金製(アバットメント)。
アバットメントを介在させ、
それを土台に上部構造(専用
コーピングを加工)をスク
リー固定するタイプ。
カラー部高さと角度に選択肢
を用意。連結冠やブリッジに
適用。



ゴールドアバットメント

金合金製。
銲接を伴い、アバットメント
そのものを補綴物に加工する
UCLAアバットメント。
回転防止機構を有し、単冠に
適用。




ゴールドアバットメント (ノンエンゲージ)

金合金製。
銲接を伴い、アバットメント
そのものを補綴物に加工する
UCLAアバットメント。
連結冠、ブリッジに適用。



オーバーデンチャー

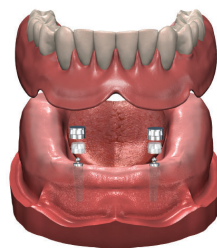

ロケター® オーバーデンチャー

ロケター® アバットメント

チタン合金製(アバットメント)。
ロケターアタッチメントシステム
は、種類豊富なアバットメントと
リプレイスメント、そしてデン
チャーキャップにて構成。
嵌合はピボットテクノロジーで咬
合力を吸収しながら、義歯の脱落
転覆を防ぐ。



ボールオーバーデンチャー

ボールアバットメント

チタン合金製(アバットメント)。
ボールアタッチメントのメールを
アバットメント頭部に付与し、
ナイロンライナーとメタルハウジ
ング(左図上)の二重構造を
有するフィメールが義歯床内面
に設置される構造。



パーオーバーデンチャー

スクリー固定式 アバットメント

チタン合金製(アバットメント)。
アバットメントを介在させ、
それを土台にパー構造(専用
コーピングを加工)がスク
リー固定されるタイプ。



角度付きボールアタッチメント

アングルド用ボルトトップ +スクリー固定式アバット メント角度付き

チタン合金製(アバットメント/ボルトトップ)。
角度付きアバットメントを介在させ、
相互の平行性を補正し、ボルトトップ
を固定。



販売名: Legacy1 インプラント 一般的名称: 歯科用インプラントシステム 高度管理医療機器 承認番号: 226008Z100012000
販売名: Legacy2,3 インプラント 一般的名称: 歯科用インプラントシステム 高度管理医療機器 承認番号: 227008Z100018000
販売名: Legacy HA インプラント 一般的名称: 歯科用骨内インプラント材 高度管理医療機器 承認番号: 228008Z100019000
販売名: インプラントダイレクト オーバーデンチャーアタッチメント 一般的名称: 歯科用精密弾性アタッチメント 管理医療機器 認証番号: 228AL8Z100002000
販売名: ID インプラント用可撤式コンポーネント 一般的名称: 歯科用インプラントアバットメント 高度管理医療機器 承認番号: 226008Z100016000
販売名: アナログ 一般的名称: 歯科インプラント技工用器材 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0001 販売名: 技工用ツール 一般的名称: 歯科インプラント補綴用器具 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0004
販売名: キャスタブルコーピング 一般的名称: 歯科インプラント技工用器材 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0002
販売名: トランスファア 一般的名称: 歯科インプラント技工用器材 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0003
販売名: ガイドピン 一般的名称: 歯科用インプラント手術器具 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0005
販売名: レンチ 一般的名称: 手術用レンチ 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0007 販売名: ドライバーツール 一般的名称: 手術用ネジ回し 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0006
販売名: サージカルキット 一般的名称: 手術用ドリルビット 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0009 販売名: リムーバルツール 一般的名称: 歯科用インプラント手術器具 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0011
販売名: Salvin 手術用レンチ 一般的名称: 手術用レンチ 一般医療機器 届出番号: 1381X00053P00007
販売名: ガイデッドサーージェット 一般的名称: 歯科用インプラント手術器具 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0013
販売名: スキャンアダプター 一般的名称: 歯科インプラント技工用器材 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0014
販売名: Ts BS フラットドリル GS 一般的名称: 歯科用スチールバー 一般医療機器 届出番号: 1382X00094000204
販売名: ドリル 一般的名称: 手術用ドリルビット 一般医療機器 届出番号: 1381X00053AD0008
販売名: Salvin ピンセット 一般的名称: ピンセット 一般医療機器 医療機器届出番号: 1381X00053P00025

補綴コンポーネント サイズ詳細・カット限界の目安


	カラー部高さ	プラットフォーム	カット限界 (A)	高さ (B) (インプラントとの接合部から頭頂部まで)
レガシー 3 付属 CT アバットメント	2.0mm		3.0mmD 用 5.6mm 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用 5.2mm	6.9mm 6.2mm
ストレート カントウアー アバットメント	1.0mm 舌側は +1.5mm		3.0mmD 用 3.0mm 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用 2.7mm	7.4mm 8.7mm
	2.0mm 舌側は +1.5mm		3.0mmD 用 3.1mm 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用 2.7mm	8.4mm 9.7mm
角度付き(15°) カントウアー アバットメント	0.75mm 舌側は +1.5mm		3.0mmD 用 3.1mm 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用 2.7mm	7.7mm 7.8mm
	2.0mm 舌側は +1.5mm		3.0mmD 用 3.1mm 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用 2.7mm	9.0mm 9.0mm
チタンベース アバットメント	0.3mm 0.3mm 0.4mm		3.0mmD 用 2.8mm 3.5mmD 用 2.4mm 4.5mmD 用 2.4mm	5.4mm 5.4mm 5.4mm
ワイドラボ アバットメント	1.0mm		4.5mmD 用 5.7mmD 用 2.7mm	8.7mm
	2.3mm		3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用 2.7mm	8.7mm
ストレート アバットメント	1.0mm		3.0mmD 用 3.1mm 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用 2.7mm	6.5mm 6.5mm
	2.0mm		3.0mmD 用 3.1mm 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用 2.7mm	7.6mm 7.5mm
	3.0mm		3.0mmD 用 3.1mm 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用 2.7mm	8.6mm 8.5mm
ゴールド アバットメント	1.0mm		3.0mmD 用 3.0mm 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用 2.7mm	8.3mm
レガシー 2 付属 テンポラリー アバットメント	—		3.0mmD 用 5.6mm 3.5mmD 用 5.2mm 4.5mmD 用 6.3mm 5.7mmD 用	6.1mm 6.3mm
	1.0mm		3.0mmD 用 6.3mm 3.5mmD 用 5.3mm 4.5mmD 用 10.3mm 5.7mmD 用	10.3mm
テンポラリー アバットメント	2.0mm	コンケーブ	3.0mmD 用 6.3mm 3.5mmD 用 5.3mm 4.5mmD 用 11.1mm 5.7mmD 用	11.1mm
	1.0mm	チタン	3.0mmD 用 3.1mm 3.5mmD 用 2.7mm 4.5mmD 用 9.0mm 5.7mmD 用	9.0mm
スクリュー固定式 アバットメント & コーピング	1.0mm		3.0mmD 用 3.8mm 3.5mmD 用 8.8mm 4.5mmD 用 9.8mm 5.7mmD 用	
	2.0mm		3.0mmD 用 3.8mm 3.5mmD 用 9.8mm 4.5mmD 用 11.8mm 5.7mmD 用	
	4.0mm		3.0mmD 用 3.8mm 3.5mmD 用 11.8mm 4.5mmD 用 5.7mmD 用	

カラー部直径サイズは
各頁の品目をご覧ください。




削合の際は、上部構造との
接触面積にご注意ください。

インプラント接合部から
スクリューホール頭頂部

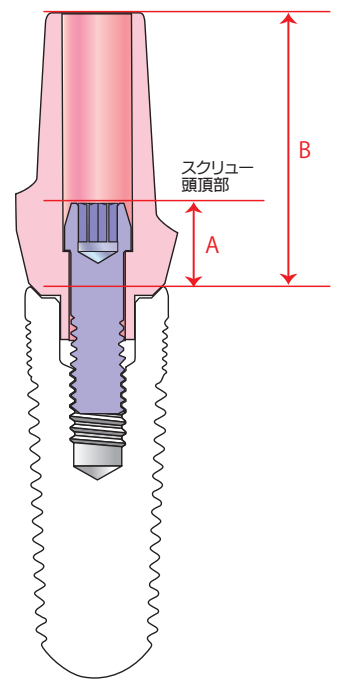

インプラント
接合部から
スクリューホール
頭頂部

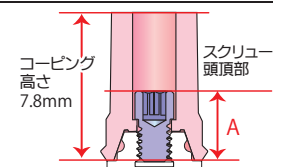

●カット限界(A)のサイズは
「角度付き(15° 30°) 共通

Implant Direct 製品専用FAX注文書

電話 番号	FAX 番号	注文書 記入日	ご使用 予定日
診療所名			
ご芳名			
メールアドレス*			
〒 都 道 市 区 府 県 郡			

商品コード	商品名	注文数	金額
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			

備考 ※送付先が上記と異なる場合はご記入ください。

※メールアドレスをぜひご記入ください。弊社からのご連絡の他、弊社主催セミナーの優待情報・お得な商品情報等を配信いたします。

- 商品の発送
ご注文いただきました商品は宅急便にて発送いたします。午後3時までのご注文は当日発送、午後3時以降のご注文につきましては翌日発送となります。また、ご注文品の在庫がない場合は、弊社より納期をご連絡いたします。あらかじめご了承ください。
- 製品の交換について
製品の交換は、製品到着後6ヶ月以内とさせていただきます。（製品が未開封、パッケージに損傷の無い物、滅菌期限1年以上の物に限りです）
- 製品の返品について
返品は、お買い上げ製品がご注文の品と異なる場合、または破損や汚損している場合に限り、お受けいたします。製品の返品は、製品到着後14日以内とさせていただきます。（製品が未開封、パッケージに損傷の無い物に限りです）
- 配達料
送料は基本的に負担いたしますが、1回のご注文が10,000円未満（税別）の場合は送料をご負担いただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
タイム便・超速便については別途料金が必要となります。
※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。
表示価格は全て消費税別です。表示価格は全て希望小売価格となります。



インプラテックス
Implant Direct社製品保証プログラム

Implant Direct社製品を安心して
お使いいただけるよう、
「インプラテックスImplant Direct社製品
保証プログラム」をご提供しております。
詳細はお問い合わせください。

ご注文は
24時間受付

FAX: 03-5850-8505

(株式会社インプラテックス 東京本社)

●ご記載頂いた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。

製造販売元

IMPLATEX 株式会社 インプラテックス

いつも、となりに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日を除く9:00~17:00にお願いいたします。



メール配信登録で
セミナーご優待!!

メールニュース配信登録は
QRコードから登録フォーム
にお入りください。➡



製造元

**IMPLANT
DIRECT™** (米国)
SIMPLY SMARTER

