

ドリルフローチャート


Legacy™ System

レガシー システム


IMPLANT DIRECT

SIMPLY SMARTER

3.2mmD

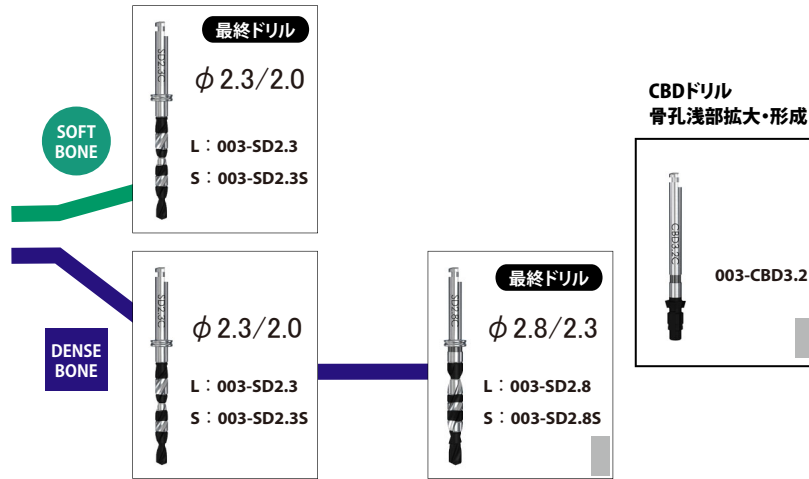


3.7mmD

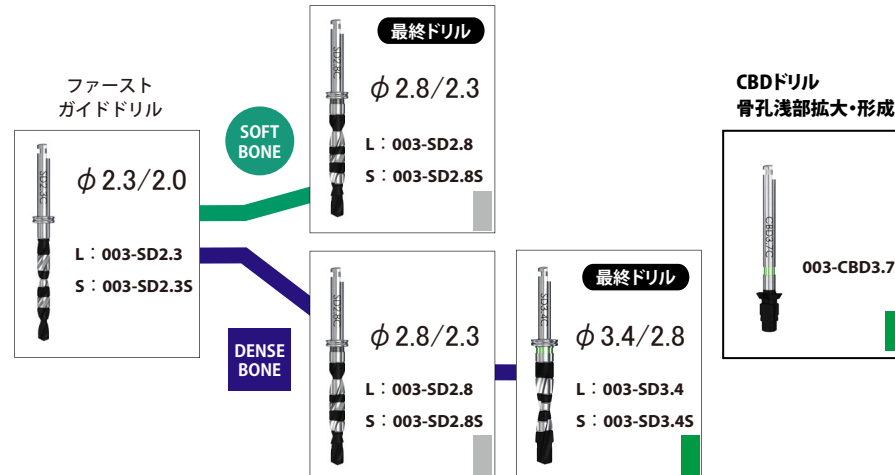

ドリル推奨回転数
600~1,250rpm

4.2mmD

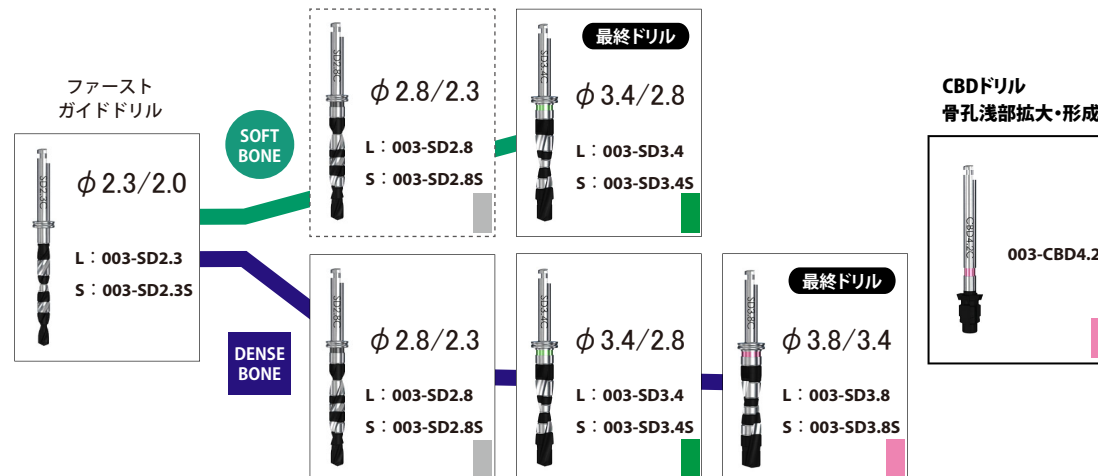

4.7mmD



ファースト
ガイドドリル

φ 2.3/2.0
L : 003-SD2.3
S : 003-SD2.3S

SOFT BONE

DENSE BONE

φ 2.8/2.3 L : 003-SD2.8 S : 003-SD2.8S	φ 3.4/2.8 L : 003-SD3.4 S : 003-SD3.4S	最終ドリル φ 3.8/3.4 L : 003-SD3.8 S : 003-SD3.8S
φ 2.8/2.3 L : 003-SD2.8 S : 003-SD2.8S	φ 3.4/2.8 L : 003-SD3.4 S : 003-SD3.4S	φ 3.8/3.4 L : 003-SD3.8 S : 003-SD3.8S

CBDドリル
骨孔浅部拡大・形成

003-CBD4.7

ドリルフローチャート




レガシー システム

IMPLANT DIRECT

SIMPLY SMARTER

5.2mmD

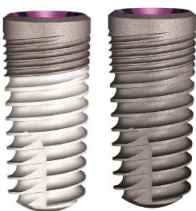

ファースト
ガイドドリル

φ 2.3/2.0
L : 003-SD2.3
S : 003-SD2.3S

SOFT BONE

DENSE BONE

φ 2.8/2.3 L : 003-SD2.8 S : 003-SD2.8S	φ 3.4/2.8 L : 003-SD3.4 S : 003-SD3.4S	φ 3.8/3.4 L : 003-SD3.8 S : 003-SD3.8S	最終ドリル φ 4.4/3.8 L : 003-SD4.4 S : 003-SD4.4S
φ 2.8/2.3 L : 003-SD2.8 S : 003-SD2.8S	φ 3.4/2.8 L : 003-SD3.4 S : 003-SD3.4S	φ 3.8/3.4 L : 003-SD3.8 S : 003-SD3.8S	φ 4.4/3.8 L : 003-SD4.4 S : 003-SD4.4S

CBDドリル
骨孔浅部拡大・形成

003-CBD5.2

ドリル推奨回転数
600~1,250rpm

5.7mmD

7.0mmD



ファースト
ガイドドリル

φ 2.3/2.0
L : 003-SD2.3
S : 003-SD2.3S

SOFT BONE

DENSE BONE

φ 2.8/2.3 L : 003-SD2.8 S : 003-SD2.8S	φ 3.4/2.8 L : 003-SD3.4 S : 003-SD3.4S	φ 3.8/3.4 L : 003-SD3.8 S : 003-SD3.8S	φ 4.4/3.8 L : 003-SD4.4 S : 003-SD4.4S	φ 4.8/4.4 L : 003-SD4.8 S : 003-SD4.8S	最終ドリル φ 5.1 L : 003-SD5.1 S : 003-SD5.1S
φ 2.8/2.3 L : 003-SD2.8 S : 003-SD2.8S	φ 3.4/2.8 L : 003-SD3.4 S : 003-SD3.4S	φ 3.8/3.4 L : 003-SD3.8 S : 003-SD3.8S	φ 4.4/3.8 L : 003-SD4.4 S : 003-SD4.4S	φ 4.8/4.4 L : 003-SD4.8 S : 003-SD4.8S	φ 5.1 L : 003-SD5.1 S : 003-SD5.1S

CBDドリル
骨孔浅部拡大・形成

5.7mmD
インプラント用
003-CBD5.7

7.0mmD ※
インプラント用
003-CBD7.0

※7.0mmDインプラントの埋入
時は、CBD7.0ドリルを使用する
必要性が高くなります。