


サージカルドリル

ドリル掲載ページのカラーコードは、レガシーサージカルトレイ(写真の外科トレイ)のカラーコードとリンクしています。

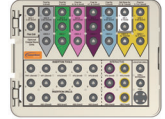

3.2mmDインプラント用

未滅菌


商品コード	直径	マーキング
003-SD2.3	2.3/2.0mmD	6-16mm
003-SD2.3S	2.3/2.0mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SD2.8	2.8/2.3mmD	6-16mm
003-SD2.8S	2.8/2.3mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-CBD3.2	3.0/3.9mmD	コーティカルボンドドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用



3.7mmDインプラント用

未滅菌


商品コード	直径	マーキング
003-SD3.4	3.4/2.8mmD	6-16mm
003-SD3.4S	3.4/2.8mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-CBD3.7	3.6/4.9mmD	コーティカルボンドドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用

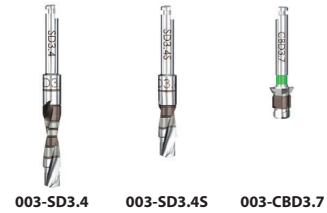

4.2mmDインプラント用

未滅菌


商品コード	直径	マーキング
003-SD3.8	3.8/3.4mmD	6-16mm
003-SD3.8S	3.8/3.4mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-CBD4.2	4.1/4.9mmD	コーティカルボンドドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用

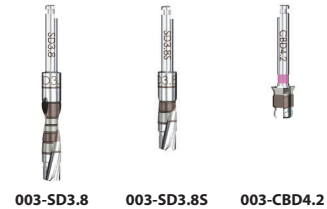

4.7mmDインプラント用

未滅菌


商品コード	直径	マーキング
003-SD4.4	4.4/3.8mmD	6-16mm
003-SD4.4S	4.4/3.8mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-CBD4.7	4.6/5.9mmD	コーティカルボンドドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用

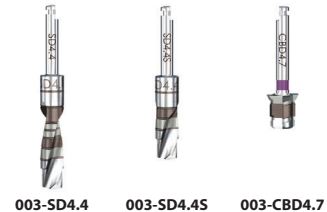

5.2mmDインプラント用

未滅菌


商品コード	直径	マーキング
003-SD4.8	4.8/4.4mmD	6-16mm
003-SD4.8S	4.8/4.4mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-CBD5.2	5.1/5.9mmD	コーティカルボンドドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用

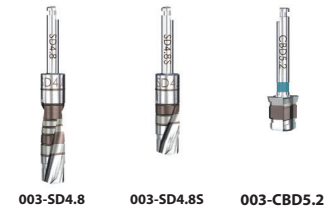

5.7mmD & 7.0mmDインプラント用


未滅菌

商品コード	直径	マーキング
003-D5.1	5.1mmD	6-16mm
003-D5.1S	5.1mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SD5.4	5.4/4.8mmD	6-16mm
003-SD5.4S	5.4/4.8mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-CBD5.7	5.7/6.7mmD	コーティカルボンドドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用
003-CBD7.0 ※	5.4/7.0mmD	コーティカルボンドドリル 深めの埋入もしくは非常に硬骨質でのインプラント窩 およびカウンターシンク形成用

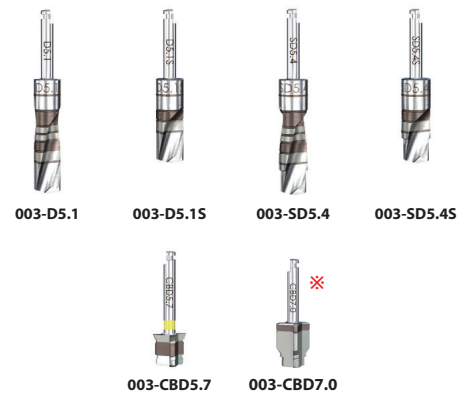

※7.0mmDインプラントを大き目の抜歯窩に埋入する場合は、**CBD7.0ドリル**を使用しない場合もあります。

ドリルスコアライン

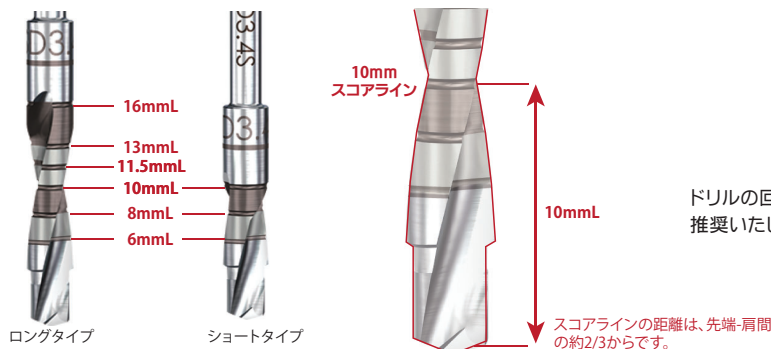

ドリルの回転数は600~1,250rpmを推奨いたします。

インプラント埋入ドリルチャート

3.2mmD



Soft Bone ファイナル		Dense Bone ファイナル	骨孔浅部拡大・形成
Soft Bone ファイナル		Dense Bone ファイナル	オプション (骨孔浅部拡大・形成)
003-SD2.3 2.3/2.0mmD		003-SD2.8 2.8/2.3mmD	003-CBD3.2

3.7mmD



003-SD2.3 2.3/2.0mmD	Soft Bone ファイナル 003-SD2.8 2.8/2.3mmD	Dense Bone ファイナル 003-SD3.4 3.4/2.8mmD	オプション (骨孔浅部拡大・形成) 003-CBD3.7
-------------------------	--	---	------------------------------------

4.2mmD



オプション		Soft Bone ファイナル	Dense Bone ファイナル	オプション (骨孔浅部拡大・形成)
003-SD2.3 2.3/2.0mmD	003-SD2.8 2.8/2.3mmD	003-SD3.4 3.4/2.8mmD	003-SD3.8 3.8/3.4mmD	003-CBD4.2

4.7mmD



オプション			Soft Bone ファイナル	Dense Bone ファイナル	オプション (骨孔浅部拡大・形成)
003-SD2.3 2.3/2.0mmD	003-SD2.8 2.8/2.3mmD	003-SD3.4 3.4/2.8mmD	003-SD3.8 3.8/3.4mmD	003-SD4.4 4.4/3.8mmD	003-CBD4.7

5.2mmD



オプション		オプション		Soft Bone ファイナル	Dense Bone ファイナル	オプション (骨孔浅部拡大・形成)
003-SD2.3 2.3/2.0mmD	003-SD2.8 2.8/2.3mmD	003-SD3.4 3.4/2.8mmD	003-SD3.8 3.8/3.4mmD	003-SD4.4 4.4/3.8mmD	003-SD4.8 4.8/4.4mmD	003-CBD5.2

5.7&7.0mmD



オプション		オプション		オプション		Soft Bone ファイナル	Dense Bone ファイナル	オプション (骨孔浅部拡大・形成) 5.7mmD用 7.0mmD用
003-SD2.3 2.3/2.0mmD	003-SD2.8 2.8/2.3mmD	003-SD3.4 3.4/2.8mmD	003-SD3.8 3.8/3.4mmD	003-SD4.4 4.4/3.8mmD	003-SD4.8 4.8/4.4mmD	003-D5.1 5.1mmD	003-SD5.4 5.4/4.8mmD	003-CBD5.7 003-CBD7.0

※ 青字の「オプション」のステップは、骨質が脆弱な症例では省くことがあります。


※ 7.0mmDインプラントを大きな抜歯窩に埋入する場合は、CBD7.0ドリルを使用しない場合もあります。

CBDドリル



通法に従い、ドリリングを行う。

〔硬骨質の場合〕

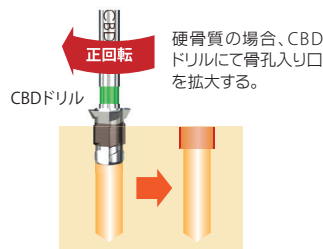

〔アバットメント基底部を骨縁下に設置する場合〕

