

Next Premium Implant




SwishActive™

スウィッシュアクティブ

SwishActive

製品カタログ & マニュアル

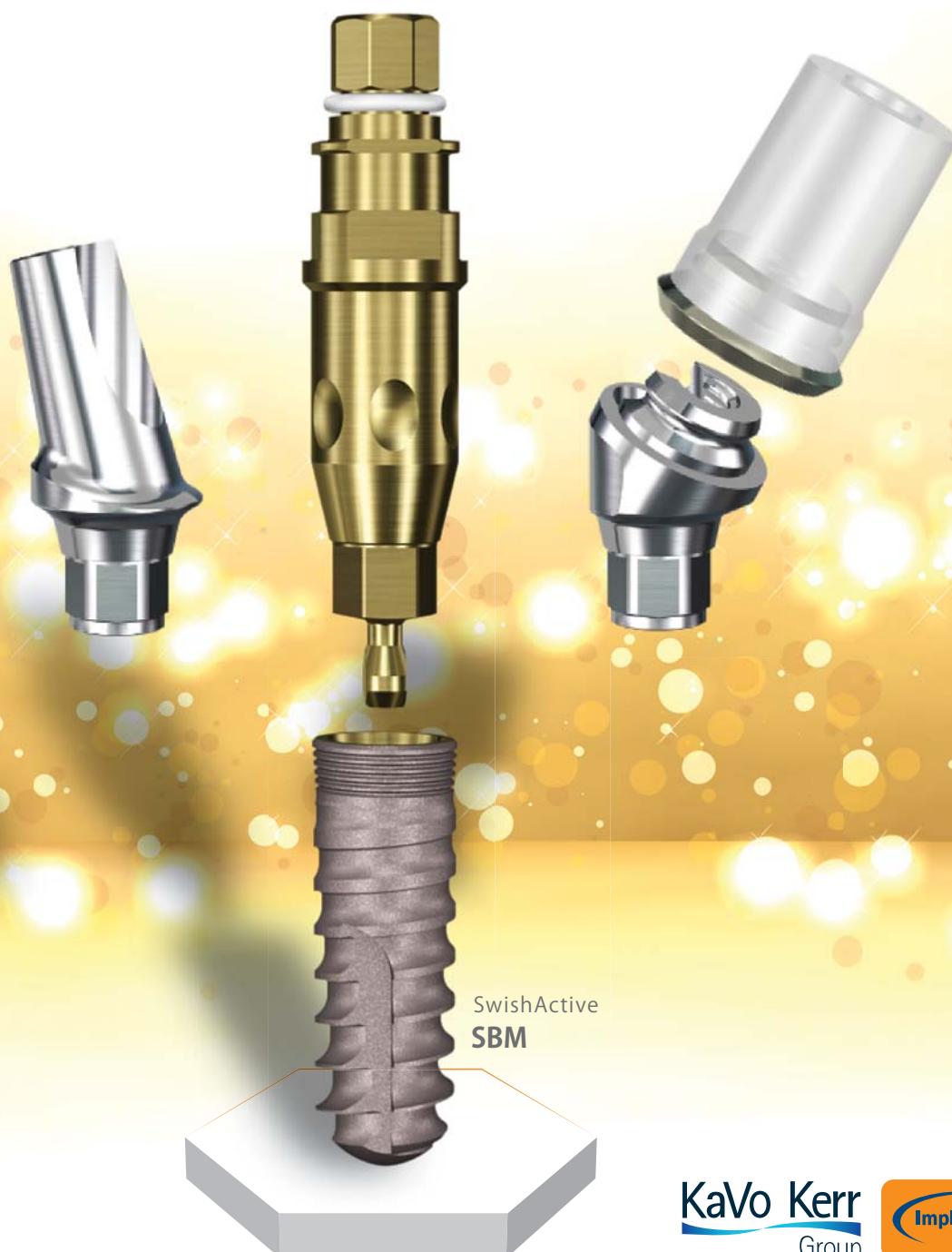



SwishActive 3.4mmD Platform


**SwishActive™**

スウィッシュアクティブ

インプラントダイレクト スウィッシュアクティブ

製品カタログ & マニュアル**目次**

目次／カラーコードについて	2
Implant Direct社とは／インプラントの特徴とデザイン／表面性状	3
パッケージ／仕様	4
インプラント／カバースクリュー	5
補綴コンポーネントチャート	6-7
ヒーリングカラー・トランスファー・アナログ	8
カントウアーアバットメント・チタンベースアバットメント	9
スクリュー・CTアバットメント	10
フルカントウアー・ゴールド・テンポラリーアバットメント	11
スクリュー固定式アバットメント	12-13
外科用器具	14-15
サージカルドリル	16
インプラント埋入ドリルチャート	17
サージカルトレイコンテンツ	18
サージカルキット	19
埋入手術手順	20
チェアサイドでのアバットメントの形成手順／印象採得手順	21
補綴コンポーネント用途一覧	22
補綴コンポーネント サイズ詳細・カット限界の目安	23
注文書	24

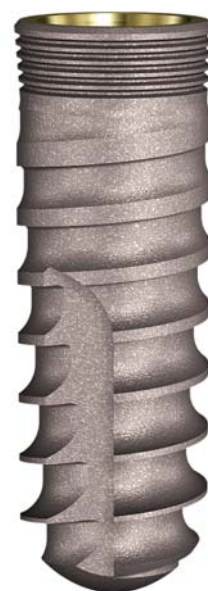**カラーコードについて** コンポーネントや専用ツールの選択を容易にするようカラーコード化されています。

インプラント直径	コンポーネント選択のための カラーコード ※インプラント体内部や印象用パーツに採用	ドリル選択のためのカラーコード ※ドリルチャートやサージカルトレイに採用
3.3mmD	 プラットフォーム直径 3.0mmD 	
4.1mmD	 プラットフォーム直径 3.4mmD 	
4.8mmD		



ナロープラットフォーム



レギュラープラットフォーム

Implant Direct社とは

Implant Direct社は2004年にDr. Gerald A. Niznickにより創立されました。同氏はインプラントにおいてインターナルコネクションを含む35件の米国特許を取得し、その業績に対し、米国をはじめ世界的にも高い信頼と評価を集めています。

米国カリフォルニア州に本拠地、スイスに欧州本部を構えており、産業界大手ダナハー社のデンタル部門であるKaVo Kerrグループに属します。KaVo Kerrグループは世界市場において非常に大きな規模を誇ります。

また、Implant Direct社は、創立からわずか10年ほどで世界シェアを大きくのばし、世界の60を超える国々に製品を安定

供給しています。売上の成長率も他社が低迷もしくはマイナス成長の中、好調を維持しており、今注目のインプラントメーカーです。

「インプラント治療の臨床成功と、インプラント価格は比例するものではない」という企業ポリシーのもと、高品質の製品（インプラント体はもとより各パーツ、器具）を経済的な価格で提供していることが、広く先生方に支持され、同社の成長要因の一つとなっています。



The Implant Direct Joint Venture is part of the KaVo Kerr Group

施設

Implant Direct社は米国カリフォルニア州に本社及び工場を有し、最新鋭加工機とハイレベルな品質管理者、熟練の機械工、優秀なスタッフによる高品質・高精度の24時間稼働の生産

体制を持ちます。また、臨床施設を併設した研修センターがあり、日本を含む各国からの受講者を受け入れ、最先端のインプラント治療を学ぶ場として活用されています。



工場内部



研修センター





研修センター内部

インプラントの特徴とデザイン

- ・ボーンレベルインプラント
- ・骨のダウングロースを抑えるネック部デザイン
- ・初期固定性を増大させる、次第に深くなるシングルリードバットレス(鋸刃)スレッド
- ・埋入操作を容易にするカッピンググループ
- ・表面性状はSBM(溶解性メチアによるプラスティング)処理
- ・接合様式はインターナル ヘックス コニカル コネクション(CC)
- ・歯肉形態をトータルマネジメントする、ヒーリング・補綴コンポーネンツ
- ・エマージェンスプロファイルは審美性の高い軟組織形態を形成するコンケーブ形状
- ・コンケーブ形状の歯肉貫通部は、プラットフォームシフティングの採用により、ダウングロースの抑制が期待される

バットレススレッド

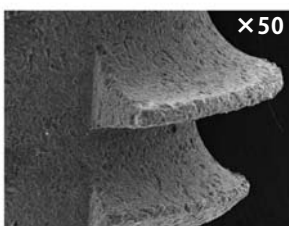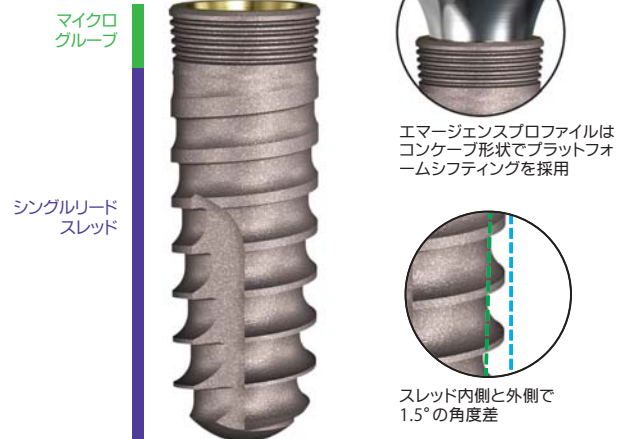

インプラント表面のSEM像
ネック部のマイクログループ部、ミニスレッド部にもSBM処理を施している。

表面性状

スウィッシュアクティブインプラントは、骨内に埋入される表面を可溶性ハイドロキシアパタイト粒子でプラスティングし、粗造な構造に加工することで骨との接触率を高めています。



パッケージ



構成

- ① インプラント体
 - ② キャリアー / トランスファー (チタン製)
 - ③ カバースクリュー
 - ④ エクステンダー (2mmH) 6mmLにはエクステンダーは含まれません
- ③カバースクリューのスクリューホールはTri-Grip™ 構造となっており、1.25mmヘックスドライバー・Unigrip ScrewDriver・SCS Driverが使用可能です。

スウィッシュアクティブパッケージの注意事項




内バイアルは下図のように側面の半分が開放されています。インプラント体に触れないよう、ご注意ください。



6mmLインプラントの注意点:


ボディサイズが6mmLのインプラントに付属のカバースクリューは、他ボディサイズのカバースクリューより短くなっています(下図参照)。他のボディサイズのカバースクリューは6mmLのインプラントには使用できません。

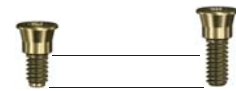


例:002-653401S 6mmL インプラント用
002-653401 他サイズインプラント用

仕様


3.3mmD ボディ

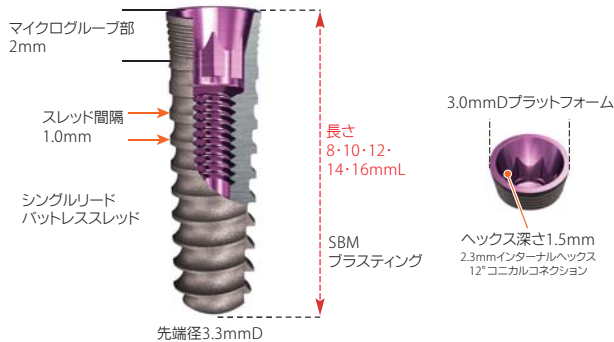

4.1mmD ボディ

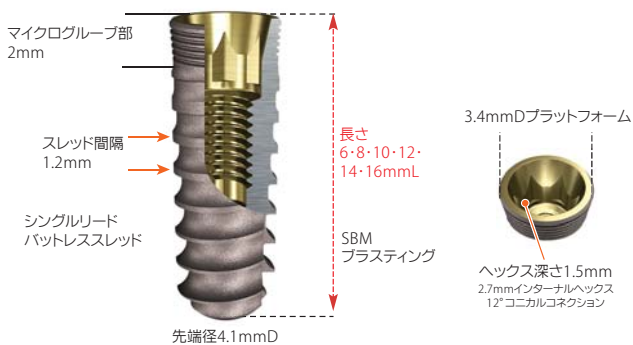

4.8mmD ボディ

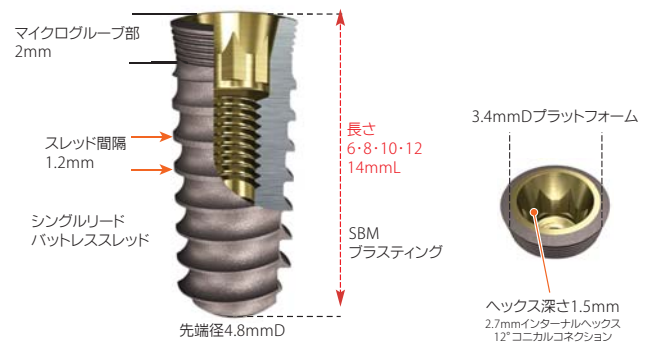

表記の図・サイズはボディサイズ 12mmL のものです。

●3.3mmDインプラントの適用

- ・複数歯連結冠、ブリッジ または オーバーデンチャー固定
 - ・単独歯欠損への使用は下顎の中切歯、側切歯及び上顎の側切歯相当部位にのみ適用
- ※ 臼歯部に埋入した3.3mmDインプラントへは、アングルドアバットメントの使用は推奨しない。

●6mmLインプラントの適用

- ・2 回法
- ・他のインプラントとの連結
- ・できるだけ太いインプラントの使用

※6mmL用以外のカバースクリューは使用できません。

インプラント

SBM

3.3mmD ボディ



滅菌済

キャリアートランスファー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属

商品コード	直径	長さ	プラットフォーム
001-943308	3.3mmD	8mmL	3.0mmD
001-943310	3.3mmD	10mmL	3.0mmD
001-943312	3.3mmD	12mmL	3.0mmD
001-943314	3.3mmD	14mmL	3.0mmD
001-943316	3.3mmD	16mmL	3.0mmD



4.1mmD ボディ



滅菌済

キャリアートランスファー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属(6mmLにはエクステンダーは付属しません)

商品コード	直径	長さ	プラットフォーム
001-944106	4.1mmD	6mmL	3.4mmD
001-944108	4.1mmD	8mmL	3.4mmD
001-944110	4.1mmD	10mmL	3.4mmD
001-944112	4.1mmD	12mmL	3.4mmD
001-944114	4.1mmD	14mmL	3.4mmD
001-944116	4.1mmD	16mmL	3.4mmD



4.8mmD ボディ



滅菌済

キャリアートランスファー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属(6mmLにはエクステンダーは付属しません)

商品コード	直径	長さ	プラットフォーム
001-944806	4.8mmD	6mmL	3.4mmD
001-944808	4.8mmD	8mmL	3.4mmD
001-944810	4.8mmD	10mmL	3.4mmD
001-944812	4.8mmD	12mmL	3.4mmD
001-944814	4.8mmD	14mmL	3.4mmD



カバースクリュー

カバースクリュー

Tri-Grip™ 構造で1.25mmヘックスドライバー・Unigrip ScrewDriver・SCS Driverが使用可能

滅菌済

商品コード	プラットフォーム
002-653001	3.0mmD
002-653001S (6mmL用)	3.0mmD
002-653401	3.4mmD
002-653401S (6mmL用)	3.4mmD



※6mmLインプラントには、必ず商品コード末尾に「S」がついた6mmL用をご使用ください。他サイズのカバースクリューは使用できません。

付属するキャリアートランスファーについて

埋入時



カラーコード化されている。キャリアーとして使用できる。




ティンプリはインプラント内部のヘックス面とリンクしている。

印象採得時



印象材を塗布し覆う。

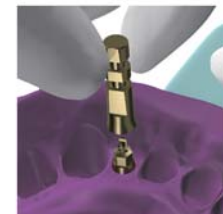

印象内のトランスファーにインプラントアナログを連結する。

補綴コンポーネントチャート

3.0mmDプラットフォーム

NP



3.3mmD

インプラント直径

キャリア/
トランスファー
CTアバットメント
カバースクリュー
インプラントアナログ



付属



002-653002N(オプション)



002-653001



002-653001S※



002-653006



002-653002(オプション)

インプラント
トランスファー



002-653005N



002-653008N



002-653005



002-653008

ヒーリング
カラー



002-653012N
販売終了



002-653013N



002-653015N



002-653012
販売終了



002-653013



002-653015

ストレート&
角度付き
カントウアー
アバットメント



002-653031N



002-653032N



002-653033N



002-653031



002-653032



002-653033



002-653051N



002-653052N



002-653053N



002-653051



002-653052



002-653053

各種アバットメント



002-653040N



002-653047N



002-653030CB



002-653040



002-653041



002-653049



002-653030L



002-653047

スクリュー固定式
アバットメント



002-653061



002-65306215S
002-65306330S



002-65306315S
002-65306430S



002-653062




002-653063
002-653064
002-653065

補綴コンポーネントチャート



4.1mmD

3.4mmDプラットフォーム

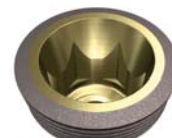

4.8mmD



付属



002-653402N(オプション)



002-653401



002-653401S※



002-653406



002-653402(オプション)



002-653405N



002-653408N



002-653405



002-653408



002-653412N
販売終了



002-653413N



002-653415N



002-653412



002-653413



002-653415



002-653431N



002-653432N



002-653433N



002-653431



002-653432



002-653433



002-653451N



002-653452N



002-653453N



002-653451



002-653452



002-653453



002-653430CB



002-653440N



002-653447N



002-653440



002-653441



002-653430CWB



002-653447



002-653449



002-653430LW



002-653461N



002-653462N



002-653463N
002-653464N
002-653465N



002-65346215S
002-65346315S



002-65346330S
002-65346430S

ヒーリングカラー・トランスファー・アナログ

ヒーリングカラー

Tri-Grip™ 構造で1.25mmヘックスドライバー・Unigrip ScrewDriver・SCS Driverが使用可能

滅菌済

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	
002-653012N	3.0mmD	3.8mm	2mm	販売終了
002-653013N	3.0mmD	3.8mm	3mm	
002-653015N	3.0mmD	3.8mm	5mm	
002-653012	3.0mmD	5.0mm	2mm	販売終了
002-653013	3.0mmD	5.0mm	3mm	
002-653015	3.0mmD	5.0mm	5mm	
002-653412N	3.4mmD	5.0mm	2mm	販売終了
002-653413N	3.4mmD	5.0mm	3mm	
002-653415N	3.4mmD	5.0mm	5mm	
002-653412	3.4mmD	5.8mm	2mm	
002-653413	3.4mmD	5.8mm	3mm	
002-653415	3.4mmD	5.8mm	5mm	



インプラントトランスファー クローズドトレイ式

未滅菌

専用スクリュー1個付属 (Tri-Grip™タイプ)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-653005N	3.0mmD	3.8mm	002-100036
002-653005	3.0mmD	4.8mm	002-100036
002-653405N	3.4mmD	4.8mm	002-100033
002-653405	3.4mmD	5.7mm	002-100033



インプラントトランスファー オープントレイ式

未滅菌

専用スクリュー1個付属 (Tri-Grip™タイプ)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-653008N	3.0mmD	3.8mm	002-100037
002-653008	3.0mmD	4.8mm	002-100037
002-653408N	3.4mmD	4.8mm	002-100035
002-653408	3.4mmD	5.7mm	002-100035



インプラントアナログ

未滅菌

商品コード	プラットフォーム
002-653006	3.0mmD
002-653406	3.4mmD



スクリューに使用するドライバーについて

Tri-Grip™ …① 1.25mmヘックスドライバー、② Unigrip ScrewDriver、③ SCS Driverの3種が使用可能
Dual-Grip™ …① 1.25mmヘックスドライバー、② Unigrip ScrewDriverの2種が使用可能

カントウアーアバットメント・チタンベースアバットメント

カントウアー アバットメント (ストレート)

未滅菌

専用スクリュー1個付属 (Tri-Grip™タイプ)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ(唇側)	専用スクリュー
002-653031N	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100034
002-653032N	3.0mmD	3.7mm	2mm	002-100034
002-653033N	3.0mmD	3.7mm	3mm	002-100034
002-653031	3.0mmD	4.7mm	1mm	002-100034
002-653032	3.0mmD	4.7mm	2mm	002-100034
002-653033	3.0mmD	4.7mm	3mm	002-100034
002-653431N	3.4mmD	4.7mm	1mm	002-100032
002-653432N	3.4mmD	4.7mm	2mm	002-100032
002-653433N	3.4mmD	4.7mm	3mm	002-100032
002-653431	3.4mmD	5.7mm	1mm	002-100032
002-653432	3.4mmD	5.7mm	2mm	002-100032
002-653433	3.4mmD	5.7mm	3mm	002-100032

※舌側は+1.0mm



カントウアー アバットメント 15° (角度付き)

未滅菌

専用スクリュー1個付属 (Tri-Grip™タイプ)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ(唇側)	専用スクリュー
002-653051N	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100034
002-653052N	3.0mmD	3.7mm	2mm	002-100034
002-653053N	3.0mmD	3.7mm	3mm	002-100034
002-653051	3.0mmD	4.7mm	1mm	002-100034
002-653052	3.0mmD	4.7mm	2mm	002-100034
002-653053	3.0mmD	4.7mm	3mm	002-100034
002-653451N	3.4mmD	4.7mm	1mm	002-100032
002-653452N	3.4mmD	4.7mm	2mm	002-100032
002-653453N	3.4mmD	4.7mm	3mm	002-100032
002-653451	3.4mmD	5.7mm	1mm	002-100032
002-653452	3.4mmD	5.7mm	2mm	002-100032
002-653453	3.4mmD	5.7mm	3mm	002-100032

※舌側は+1.0mm



チタンベースアバットメント

未滅菌

専用スクリュー1個付属 (Tri-Grip™タイプ)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ(唇側)	専用スクリュー
002-653030CB	3.0mmD	3.7mm	0.5mm	002-100034
002-653430CB	3.4mmD	4.1mm	0.5mm	002-100032
002-653430CWB	3.4mmD	5.1mm	0.5mm	002-100032



スクリュー・CTアバットメント


スクリュー

未滅菌

Tri-Grip™ 構造 (※商品コード末尾がSのショートタイプはDual-Grip™構造)

商品コード	プラットフォーム	
002-100034S*	3.0mmD	フィクセーションスクリューD1.2 ショート 用途:スクリュー固定式(SCR)アバットメント15・30°(角度付き)用
002-100034	3.0mmD	フィクセーションスクリューD1.2 用途:アバットメント用
002-100036	3.0mmD	フィクセーションスクリューD1.2 ロング 用途:デンボラリー・CTアバットメント/インプラントトランスファークローズドトレイ式用
002-100037	3.0mmD	インプラントトランスファースクリューD1.2 オープン 用途:インプラントトランスファークローズドトレイ式/ワキシング用
002-100054	3.0mmD	フィクセーションスクリューD2.2 NE 用途:ゴールドアバットメントNE/デンボラリーアバットメントチタン NE用
002-100054XL	3.0mmD	ワキシングスクリューD2.2 用途:NEタイプアバットメントのワキシング用 ロングタイプ
002-100032S*	3.4mmD	フィクセーションスクリューD1.4 ショート 用途:スクリュー固定式(SCR)アバットメント15・30°(角度付き)用
002-100032	3.4mmD	フィクセーションスクリューD1.4 用途:アバットメント用
002-100033	3.4mmD	フィクセーションスクリューD1.4 ロング 用途:デンボラリー・CTアバットメント/インプラントトランスファークローズドトレイ式用
002-100035	3.4mmD	インプラントトランスファースクリューD1.4 オープン 用途:インプラントトランスファークローズドトレイ式/ワキシング用
002-100052	3.4mmD	フィクセーションスクリューD2.6 NE 用途:ゴールドアバットメントNE/デンボラリーアバットメントチタン NE用
002-100052XL	3.4mmD	ワキシングスクリューD2.6 用途:NEタイプアバットメントのワキシング用 ロングタイプ

各2イリ

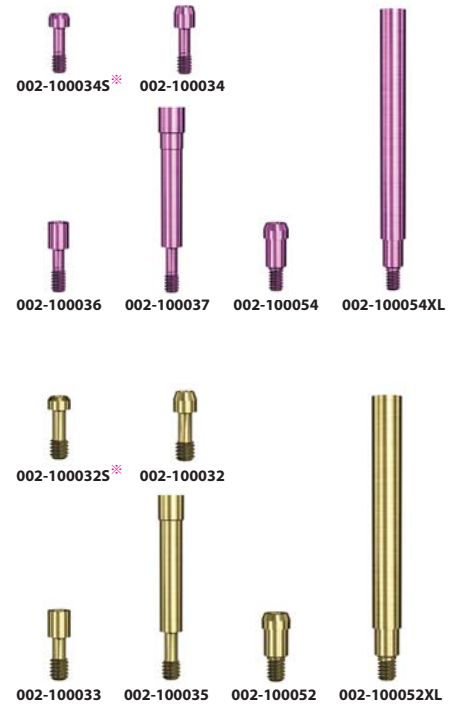


CT(キャリア/トランスファー)アバットメント

未滅菌

専用スクリュー1個付属(Tri-Grip™タイプ)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-653002N	3.0mmD	3.7mm	2mm	002-100036
002-653002	3.0mmD	4.7mm	2mm	002-100036
002-653402N	3.4mmD	4.7mm	2mm	002-100033
002-653402	3.4mmD	5.7mm	2mm	002-100033

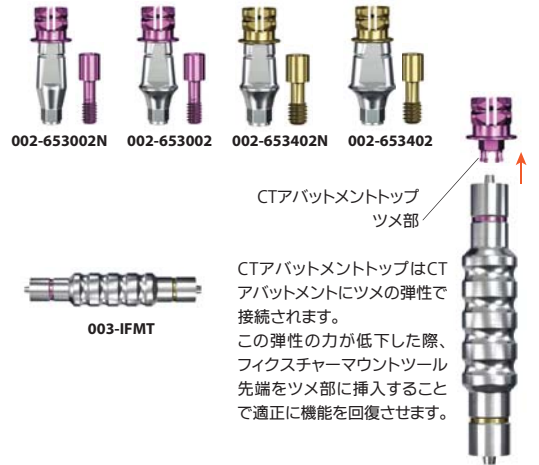

CTアバットメントトップ
ツメ部

CTアバットメントトップはCTアバットメントにツメの弾性で接続されます。この弾性の力が低下した際、フィクスチャーマウントツール先端をツメ部に挿入することで適正に機能を回復させます。

003-IFMT

インタラクティブ フィクスチャーマウントツール

CTアバットメント

用途:

- ・インプラントレベルでの印象採得(クローズドトレイ/オープントレイ式)に使用できます。
- ・最終アバットメントに使用できます。




インプラント頭部にCTアバットメントを装着する。



通例に従い、シリコン印象材(ライトボディ)をCTアバットメント周囲に塗布し覆う。




CTアバットメントトップが印象内に残る。

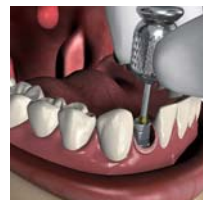


CTアバットメントをインプラントから取り外す。



CTアバットメントをインプラントアナログと連結する。

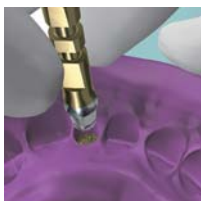

CTアバットメントを、印象内の切りかけ面に注意し、相当する位置・方向に差し込む。CTアバットメントトップに確実に装着する。

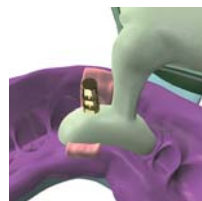

周囲に人工歯肉材を築盛し、ガム模型を作成する。



アバットメントを形成する。



アバットメントの溝が残っている場合は、ブロックアウトして使用する。



デンボラリークラウンを製作する。

フルカントウアー・ゴールド・テンポラリーアバットメント

フルカントウアー(CTR)アバットメント

未滅菌

専用スクリュー1個付属(Tri-Grip™タイプ)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-653030L	3.0mmD	4.7mm	2mm	002-100034
002-653430LW	3.4mmD	6.5mm	2mm	002-100032



002-653030L

002-653430LW

ゴールドアバットメント

未滅菌

専用スクリュー1個付属(Tri-Grip™タイプ)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-653040N	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100034
002-653040	3.0mmD	4.7mm	1mm	002-100034
002-653440N	3.4mmD	4.7mm	1mm	002-100032
002-653440	3.4mmD	5.7mm	1mm	002-100032



002-653040N

002-653040

002-653440N

002-653440

ゴールドアバットメントNE (ノンエンゲージ)

未滅菌

専用スクリュー1個付属(Tri-Grip™タイプ)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-653041	3.0mmD	4.7mm	1mm	002-100054
002-653441	3.4mmD	5.7mm	1mm	002-100052



002-653041

002-653441

テンポラリーアバットメントPEEK

未滅菌

専用スクリュー1個付属(Tri-Grip™タイプ)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-653047N	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100036
002-653047	3.0mmD	4.7mm	2mm	002-100036
002-653447N	3.4mmD	4.7mm	1mm	002-100033
002-653447	3.4mmD	5.7mm	1mm	002-100033



002-653047N

002-653047

002-653447N

002-653447

テンポラリーアバットメントチタンNE (ノンエンゲージ)

未滅菌

専用スクリュー1個付属(Tri-Grip™タイプ)

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-653049	3.0mmD	4.7mm	1mm	002-100054
002-653449	3.4mmD	5.7mm	1mm	002-100052



002-653049

002-653449



ゴールドアバットメントNE(ノンエンゲージ)は、スクリューリテインの連結冠、ブリッジに使用します。

アバットメントがそのまま上部構造に加工され、直接インプラントにスクリュー固定される構造になります。

※スクリューリテインの単冠、あるいはカスタムメイドアバットメント製作には、ゴールドアバットメント(ヘックス付タイプ)を使用してください。



スクリュー固定式 アバットメント

スクリュー固定式(SCR) アバットメント

PLトランスファー、アバットメント用キャップ付属
1.25mmヘックストドライバー、Unigrip ScrewDriver、SCS Driverが使用可能

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-653061	3.0mmD	5.0mm	1mm
002-653062	3.0mmD	5.0mm	2mm
002-653063	3.0mmD	5.0mm	3mm
002-653064	3.0mmD	5.0mm	4mm
002-653065	3.0mmD	5.0mm	5mm
002-653461N	3.4mmD	5.0mm	1mm
002-653462N	3.4mmD	5.0mm	2mm
002-653463N	3.4mmD	5.0mm	3mm
002-653464N	3.4mmD	5.0mm	4mm
002-653465N	3.4mmD	5.0mm	5mm



スクリュー固定式(SCR) アバットメント15°・30°(角度付き)

PLトランスファー、アバットメント用キャップ、
専用スクリュー1個付属(Dual-Grip™タイプ)付属

未滅菌

プラットフォーム	カラー部高さ(高位)	15°	30°	専用スクリュー
3.0mmD	2.5mm	002-65306215S	—	002-100034S
3.0mmD	3.5mm	002-65306315S	002-65306330S	002-100034S
3.0mmD	4.5mm	—	002-65306430S	002-100034S
3.4mmD	2.5mm	002-65346215S	—	002-100032S
3.4mmD	3.5mm	002-65346315S	002-65346330S	002-100032S
3.4mmD	4.5mm	—	002-65346430S	002-100032S

※低位は 15°: -1.3mm

30°: -2.5mm

4.8mmDボディインプラントの場合、必要に応じてコーティカルボンドドリル(003-SPCD4-6)を使用。



スクリュー固定式アバットメント、



角度付き(15°・30°)は、下記コンポーネントと組み合わせ使用します。

スクリュー固定式(SCR)アバットメント 印象用パーツ他

1.25mmヘックストドライバー使用

未滅菌

商品コード	品名	カラー部直径
002-100061	スクリュー固定式アバットメントアナログ	5.0mm
002-100062	スクリュー固定式アバットメントトランスファー(オープン)	5.0mm
002-100063	スクリュー固定式アバットメントトランスファー(クローズ)	5.0mm
002-100068	スクリュー固定式アバットメントPLトランスファー	5.0mm
002-400013	スクリュー固定式アバットメント用キャップ	2イリ
002-100014	SRAトランスファースクリュー オープン D1.8	2イリ
002-100015	SRAトランスファースクリュー クローズ D1.8	2イリ



スクリュー固定式(SCR)アバットメント コンポーネント

専用スクリュー1個付属(1.25mmヘックストドライバーが使用可能)

未滅菌

商品コード	品名	カラー部直径
002-100067	ゴールド&プラスチックコーピング	5.0mm
002-100069	チタンテンポラリーコーピング	5.0mm
002-100005	コーピングスクリュー(交換用)	2イリ



スクリュー固定式アバットメント

アングルド用ボールトップ スクリュー固定式アバットメント(SCR)用

未滅菌

ボールアバットメントトランスファー、アバットメント用キャップ付属
1.25mmヘックスドライバーが使用可能

組合せ図



002-100070S




商品コード	品名
002-100070S	アングルド用ボールトップ

アングルド用ボールトップコンポーネント

未滅菌

商品コード	品名	
002-100081	ボールアタッチメントハウジング	2イリ
002-100082	ボールアタッチメントナイロンライナー	2イリ
002-100083	ナイロンライナートランスファー	2イリ
002-100084	ボールアバットメントトランスファー	2イリ
002-100085	ボールアバットメントアナログ	
002-100087	ボールアバットメント用キャップ	2イリ
002-100088	ボールアタッチメントフィメールセット	
003-100086	ボールアバットメントツールセット	

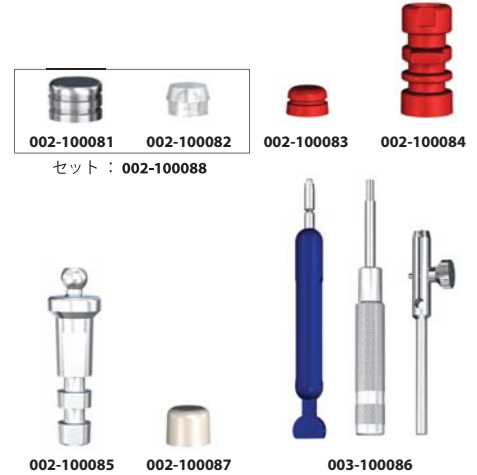

ボールアバットメントツールセットの使用方法

ボールアタッチメントの設置工程で使用するボールアバットメントツールセット (003-100086)は、3つのツールによって構成されています。

①ナイロンライナーインサーター：

ボールアタッチメントナイロンライナー(002-100082 以下ナイロンライナー)を、ボールアタッチメントハウジング(002-100081 以下ハウジング)に押し込んでセットする際に使用します。先端の突起をナイロンライナー内側に挿入して操作することで、押し込む方向を確保し、確実な挿入を可能にします。

②リーミングインスツルメント：

ナイロンライナーの把持力を調節するためのツールです。先端をナイロンライナー内側に押し込み、時計回りに回すことで内側を削合し、把持力を弱めることが可能です。手回しにより過度な削合を防止します。

③マンドリル：

ボールアタッチメントを鑄造によりヘダーバー等の延長カンチレバー上に設置する設計で、ボールパターンをバーパターンに接続する際に使用するツールです。先端にボールパターンを固定したマンドリルをサベヤーに取り付けて、義歯の着脱方向を確認しながらバーパターンにボールパターンを取り付けます。



①ナイロンライナーインサーター
②リーミングインスツルメント
③マンドリル

外科用器具

パーツ着脱用 ヘックスドライバー

未滅菌

商品コード	品名
003-THT1.25	1.25mmテーパードヘックスドライバー L (パーツ落下防止機能付/全長28mm)
003-THT1.25S	1.25mmテーパードヘックスドライバー S (パーツ落下防止機能付/全長23mm)



003-THT1.25 003-THT1.25S

1.25mmのデリバリーヘックスドライバー

先端にテーパーが付与され、口腔内でのパーツの落下を防止する。


用途:

- ・カバースクリュー着脱
- ・ヒーリングカラー着脱
- ・アバットメントスクリュー、スクリュー固定式上部構造のスクリューの運搬 等

インプラント埋入用ツール

未滅菌

商品コード	品名
003-SPRI	スイッチシュラチェットインサート
003-SPFMD	スイッチシュフィクスチャーマウントツールCA
003-HT2.3LG	2.3mmヘックスインサージョンドライバー L (パーツの落下防止機能付)
003-HT2.3SG	2.3mmヘックスインサージョンドライバー S (パーツの落下防止機能付)
003-HD2.3SG	2.3mmヘックスインサージョンドライバー CA (パーツの落下防止機能付)
003-HT2.7LG	2.7mmヘックスインサージョンドライバー L (パーツの落下防止機能付)
003-HT2.7SG	2.7mmヘックスインサージョンドライバー S (パーツの落下防止機能付)
003-HD2.7SG	2.7mmヘックスインサージョンドライバー CA (パーツの落下防止機能付)
	ヘックスインサージョンドライバー L (各サイズ共通全長30mm)
	ヘックスインサージョンドライバー S (各サイズ共通全長18mm)

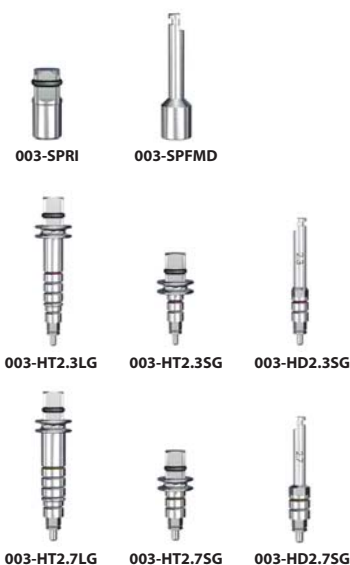

003-SPRI 003-SPFMD 003-HT2.3LG 003-HT2.3SG 003-HD2.3SG 003-HT2.7LG 003-HT2.7SG 003-HD2.7SG

スイッチシュラチェットインサート

用途:

・ラチェットレンチ(003-R)に装着し、インプラントのバイアルからのキャリアーおよび埋入途中まで使用 P 20参照

スイッチシュフィクスチャーマウントツールCA

用途:

・コントラに装着し、インプラントのバイアルからのキャリアーおよび埋入途中まで使用 P 20参照

2.3mmのヘックスドライバー



用途:

・インプラント頭部に挿入し、インプラントを埋入(プラットフォーム3.0mmD)

003-HT2.3LG、003-HT2.3SGは頭頂部に4mmスクエアを有し、埋入用ラチェットレンチとの併用が可能です。

2.7mmのヘックスドライバー



用途:

・インプラント頭部に挿入し、インプラントを埋入(プラットフォーム3.4mmD)

003-HT2.7LG、003-HT2.7SGは頭頂部に4mmスクエアを有し、埋入用ラチェットレンチとの併用が可能です。



003-SPRI



003-SPFMD

アバットメント締結用 ヘックスドライバー

未滅菌

商品コード	品名
003-HT1.25L	1.25mmヘックスドライバーエクストラロング (最終締結用/全長27mm)
003-HT1.25	1.25mmヘックスドライバー L (最終締結用/全長22mm)
003-HT1.25S	1.25mmヘックスドライバー S (最終締結用/全長18mm)
003-HD1.25	1.25mmヘックスツールCA (最終締結用/全長28mm)



003-HT1.25L 003-HT1.25 003-HT1.25S 003-HD1.25

1.25mmのヘックスドライバー

用途:

・アバットメントスクリュー、スクリュー固定式上部構造のスクリューの最終締結(トルクレンチとの併用)

003-HT1.25L、003-HT1.25、003-HT1.25Sは頭頂部に4mmスクエアを有し、トルクレンチとの併用が可能です。

外科用器具

その他器具

未滅菌

商品コード	品名
003-R	ラチェットレンチ
040-07005	トルクレンチ20Ncm
003-TW30	トルクレンチ30Ncm
003-TWM	マルチトルクレンチ (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60Ncm)
003-ABH	アバットメントホルダー
003-PAR	パラレリングツール2.8/2.3
003-LDRILL	ロケータードリル2.3
003-DE	ドリルエクステンダー
003-AXS3.0	3.0mmアバットメントリムーバルツール
003-AXS3.4	3.4mmアバットメントリムーバルツール

アバットメントリムーバルツール (003-AXS3.0・003-AXS3.4) は1.25mmヘックスドライバー併用となります。

アバットメントホルダー (003-ABH) は、各種アナログを装着し、その先に取り付けたパーツの切削・研磨する際のハンドルとして使用。




アバットメントリムーバルツール(003-AXS3.0/003-AXS3.4)

用途:

・固着、噛み込んだアバットメントの取り外し

アバットメントスクリューを除去し、アバットメントリムーバルツール(003-AXS3.0/003-AXS3.4)を時計回しにアバットメントにねじ込んでいくとアバットメントが持ち上がり、取り外しが可能となります。

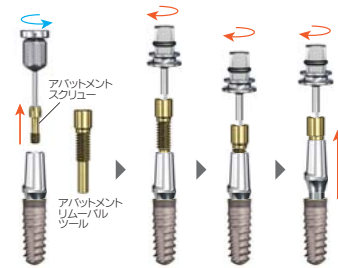

除去用レスキューツール

未滅菌

商品コード	品名
003-IXT	IXTインプラントリムーバルツール
003-SXT	SXTスクリューリムーバルツール

IXTインプラントリムーバルツール

用途:

・インプラント除去の際、ネック部のインターナルヘックスにドライバーが嵌合しないケースで使用

レンチにて反時計回しにインプラント内にねじ込んで使用します。

SXTスクリューリムーバルツール

用途:

・アバットメントスクリュー頭部のヘックスホールにドライバーが嵌合しないケースでのアバットメントスクリューの除去

レンチにて反時計回しにスクリュー頭部のヘックスドライバーホールにねじ込んで使用します。



オプション

未滅菌

商品コード	品名
600-00001	ITXトルクメーター100
040-25001	ヘーベル・メルトン アバットメントホルダー チタン

ITXトルクメーター100

●ラチェット機能を有します。4mmスクエアを有するヘッドを装着し、単純な動作でのインプラント埋入やアバットメント締結を可能にします。

●本体に設置されたゲージ針が、**埋入および締結トルクを計測します。**

●トルクゲージ機能により、20-100Ncmの広いレンジでトルクを計測します。

●シンプルな構造で、メンテナンスが容易です。ゲージはシンプルな棒バネ式で、メンテナンス不良によるトルク値の誤差が少ない構造です。



600-00001

ヘーベル・メルトン アバットメントホルダー チタン

補綴用パーツのピックアップ、装着に使用します。把持状態で固定され、落下を防止します。(チタン製)



040-25001

届出番号：13B1X00053AC0001

届出番号：13B1X00053P00025

サージカルドリル

3.3mmDインプラント用

未滅菌

商品コード	直径	マーキング
003-SPD2.3	2.3mmD	6-16mm
003-SD2.3S	2.3/2.0mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SPD2.8	2.8mmD	6-16mm
003-SD2.8S	2.8/2.3mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SPCD3.3	3.7/3.3mmD スイッチュカウンターシンクドリル 硬骨質でのインプラント窩形成用	



4.1mmDインプラント用

未滅菌

商品コード	直径	マーキング
003-SPD3.2	3.2mmD	6-16mm
003-SPD3.2S	3.2mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SPD3.5	3.5mmD	6-16mm
003-SPD3.5S	3.5mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SPCD4.1	4.8/4.1mmD スイッチュカウンターシンクドリル 硬骨質でのインプラント窩形成用	



4.8mmDインプラント用

未滅菌


商品コード	直径	マーキング
003-SPD3.8	3.8mmD	6-16mm
003-SPD3.8S	3.8mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SPD4.2	4.2mmD	6-16mm
003-SPD4.2S	4.2mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SPCD4.8	4.8mmD/4.8mmD スイッチュカウンターシンクドリル 硬骨質でのインプラント窩形成用	
003-SPCD4-6	6.5/4.8mmD スイッチュカウンターシンクドリル 深めに埋入もしくは非常に硬骨質でのインプラント窩形成用	




SPCD(コーティカルボーン)ドリル

スイッチュカクティブインプラントは骨内に埋入される表面にSBM処理を施し、さらにはネック部にマイクログループを付与することで骨のダウングロースを抑制するデザインです。したがって、ボディアが骨内に収まるまでしっかりと埋入する必要があります(右図)。


Dense BoneおよびVery Dense Boneの場合、SPCDドリルを所定の位置まで穿孔することで、骨孔入口付近を拡大し、皮質骨部分の埋入ストレスを軽減します。

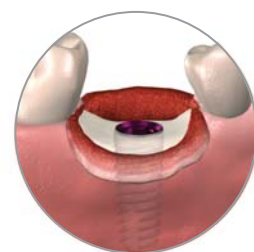


通法に従い、ドリリングを行う。

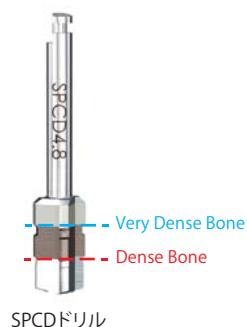

【Dense Boneの場合】

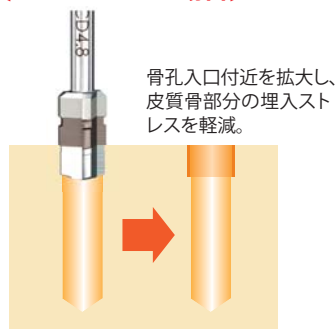

【Very Dense Boneの場合】

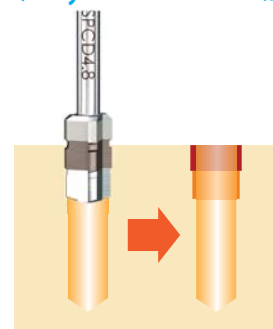

SPCDドリルにてドリルチャートに従って骨孔入り口を拡大する。

インプラント埋入ドリルチャート


3.3mmD




4.1mmD



4.8mmD

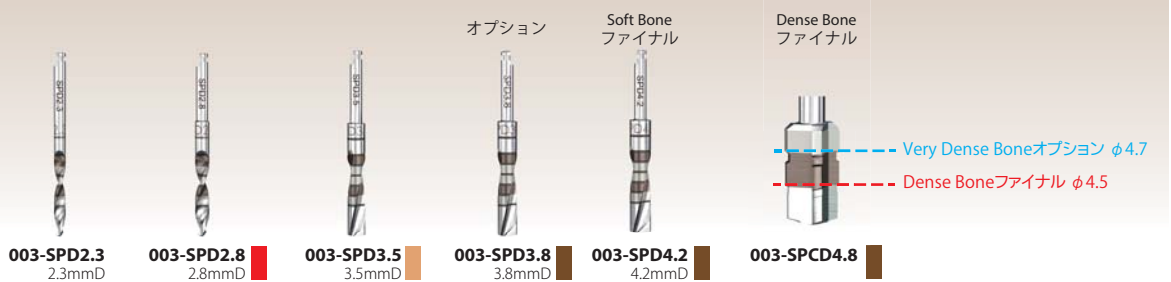

「オプション」のステップは、即時荷重する際のファイナルドリルです。

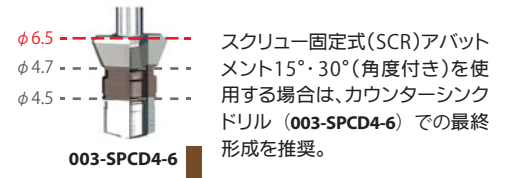


ドリルの回転は600~1,250rpmを推奨いたします。





Implant Direct社の専用ドリルやインスツルメントは、未滅菌の状態でお届けいたします。通法にしたがって滅菌の上、ご使用ください。




インプラント窩形成用ドリルは外部注水式です。注水による十分な冷却を行い、穿孔してください。

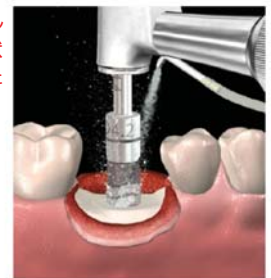

ドリルスコアラインについて

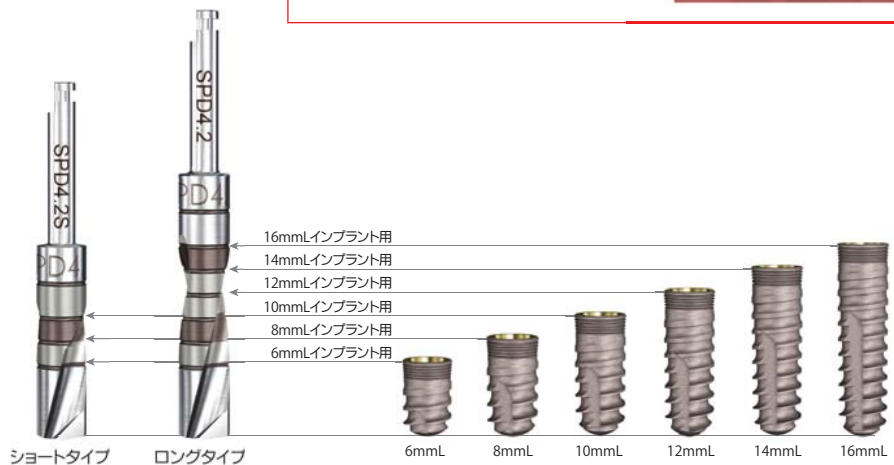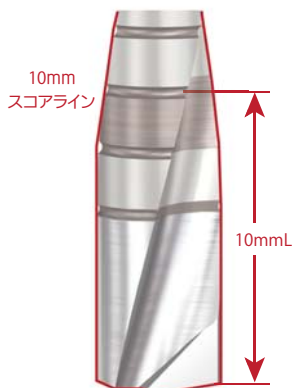

サージカルトレイコンテンツ

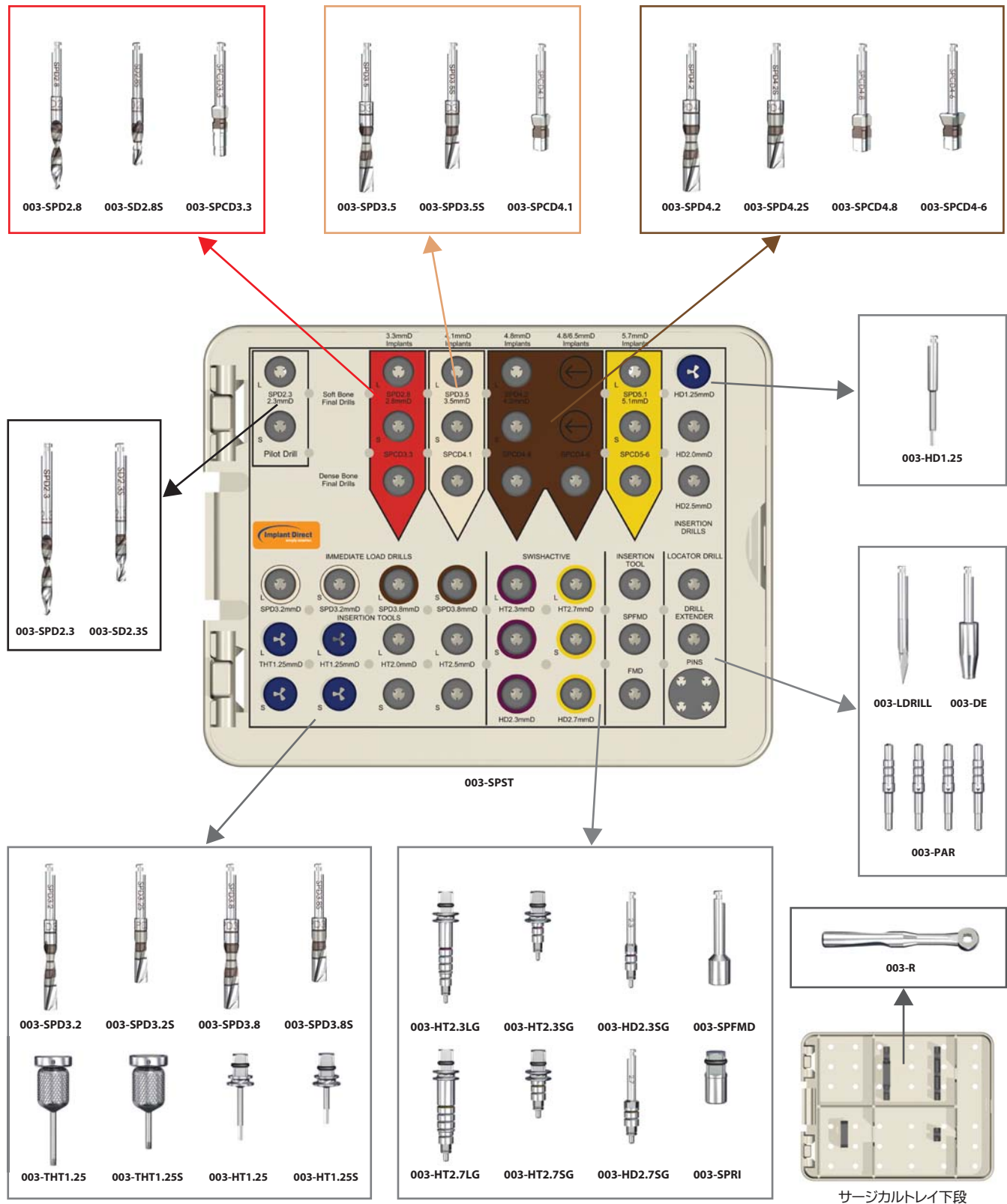

サージカルトレイ下段

サージカルトレイ(003-SPST):

サージカルトレイは、スイッチェアクティブインプラントの外科手術に使用するドリル、インセプションツール、ドライバー他の専用インスツルメントを収納し、そのままオートクレーブ滅菌*も行えるオーガナイザーです。

スタッフによる器具類の管理はもとより、ドリルは埋入インプラントの直径にリンクし、カラーコード化しているため、手術時のサイズ認識に有効です。

※滅菌条件:温度121℃、20分 または 温度134℃、5分

サージカルキット

スウィッシュアクティブ用外科キット

未滅菌

商品コード	品名
004-00005	スウィッシュアクティブ 外科コンプリートキット
004-00006	スウィッシュアクティブ 外科ベーシックキット
003-SPST	スウィッシュ サージカルトレイ



003-SPST

商品コード	商品名	コンプリート キット	ベーシック キット
003-SPST	スウィッシュ サージカルトレイ	●	●
003-SPD2.3	ストレートドリル2.3L	●	●
003-SD2.3S	ステップドリル2.3/2.0S	●	
003-SPD2.8	ストレートドリル2.8L	●	●
003-SD2.8S	ステップドリル2.8/2.3S	●	
003-SPCD3.3	スウィッシュカウンターシンクドリル3.7/3.3mm	●	●
003-SPD3.2	ストレートドリル3.2L	●	●
003-SPD3.2S	スウィッシュストレートドリル3.2S	●	
003-SPD3.5	ストレートドリル3.5L	●	●
003-SPD3.5S	スウィッシュストレートドリル3.5S	●	
003-SPCD4.1	スウィッシュカウンターシンクドリル4.8/4.1mm	●	●
003-SPD3.8	ストレートドリル3.8L	●	●
003-SPD3.8S	スウィッシュストレートドリル3.8S	●	
003-SPD4.2	ストレートドリル4.2L	●	●
003-SPD4.2S	スウィッシュストレートドリル4.2S	●	
003-SPCD4.8	スウィッシュカウンターシンクドリル4.8/4.8mm	●	●
003-SPCD4.6	スウィッシュカウンターシンクドリル6.5/4.8mm	●	●
003-THT1.25	1.25mmテーパードヘックスドライバー-L	●	●
003-THT1.25S	1.25mmテーパードヘックスドライバー-S	●	
003-HT1.25	1.25mmヘックスドライバー-L	●	●
003-HT1.25S	1.25mmヘックスドライバー-S	●	
003-HT2.3LG	2.3mmヘックスインサージョンドライバー-L	●	●
003-HT2.3SG	2.3mmヘックスインサージョンドライバー-S	●	
003-HT2.7LG	2.7mmヘックスインサージョンドライバー-L	●	●
003-HT2.7SG	2.7mmヘックスインサージョンドライバー-S	●	
003-HD1.25	1.25mmヘックスインツールCA	●	
003-HD2.3SG	2.3mmヘックスインサージョンドライバー-CA	●	
003-HD2.7SG	2.7mmヘックスインサージョンドライバー-CA	●	
003-SPFMD	スウィッシュフィクスチャーマウントツールCA	●	●
003-LDRILL	ロケータードリル2.3	●	
003-DE	ドリルエクステンダー	●	
003-R	ラチェットレンチ	●	●
003-PAR	パラレリングツール2.8/2.3	● (キットは4本入り)	● (キットは4本入り)

埋入手術手順



開封前に商品箱・ラベル表示にてサイズ等に相違ないか確認する。インプラントは2重バイアルに梱包されている。(内部は滅菌済)



外バイアルのインプラント情報が記載されたラベルを剥がし、カルテに貼付する。



外バイアルのキャップを反時計回して開封する。



内バイアルを清潔域にスライドさせ落とす。

! 内バイアルは側面の半分が開放されているので、インプラント体に触れないよう注意すること。



キャリアートランスファー頭部をスイッチュフィクスチャーマウントツールCA(003-SPFMD)で把持し、内バイアルからインプラントを取り出す。



もしくはスイッチュラチェットインサート(003-SPRI)を使用して取り出す。



インプラント窩へキャリアーし、噛み込み防止のために、ある程度の固定が得られるまで埋入する。



ヘックスインサーションドライバーに付け替えて所定の深度まで埋入する。



内バイアル基底部に、2mmHのエクステンダーとカバースクリューが収納されている。1.25mmテーパードヘックスドライバーで取り外す。



【1回法】
付属の2mmHエクステンダー、もしくは別売りのヒーリングカラーを装着し、縫合する。



【2回法】
カバースクリューをインプラント体に装着し、縫合する。



角度付きアバットメントを使用する際の埋入のポイント

インサーションドライバーの上部に付与されているヘックス面は、インプラント内部のヘックス面の向きとリンクしています(図1)。

また、角度付きアバットメントのマーatinの低い面(唇側面)は、アバットメントのヘックス面の向きに設定されています(図2)。

インプラント埋入を終える際、インサーションドライバー上部のヘックス面を目安にし、内部ヘックス面の位置を調整することで、角度付きアバットメントの向きを、隣在歯の唇側面を考慮した補綴的・審美的に望ましい向きに設定することができます(図3)。

図 1.

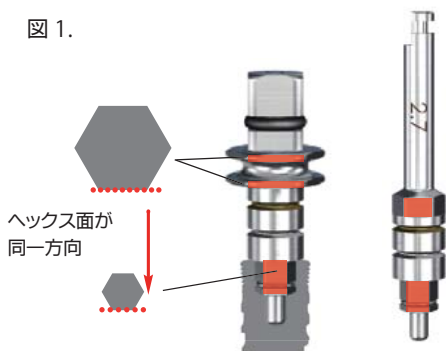
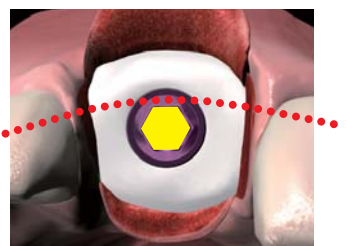


図 2.

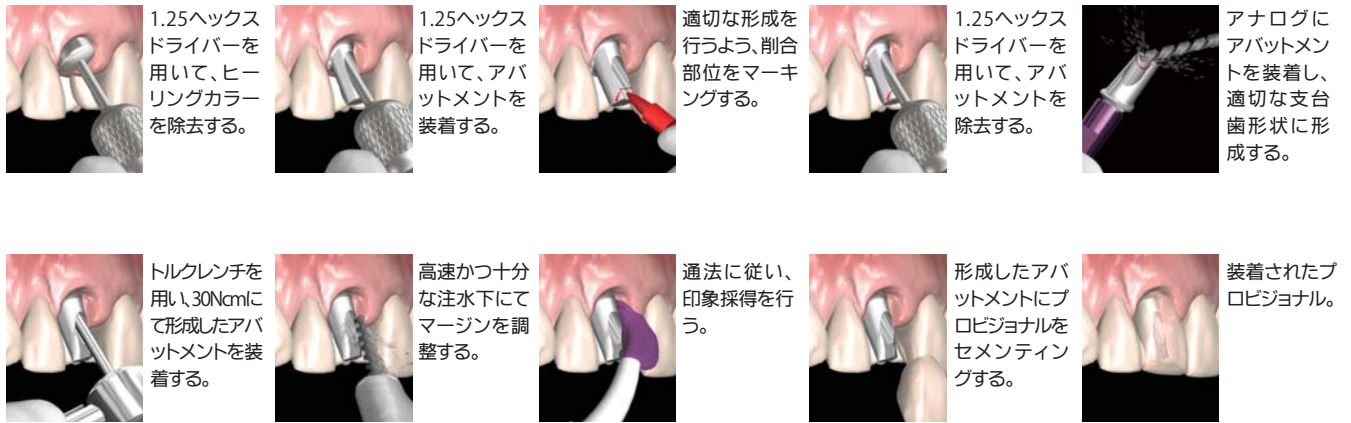


図 3.






チェアサイドでのアバットメントの形成手順




印象採得手順

インダイレクト(クローズドトレイ)法

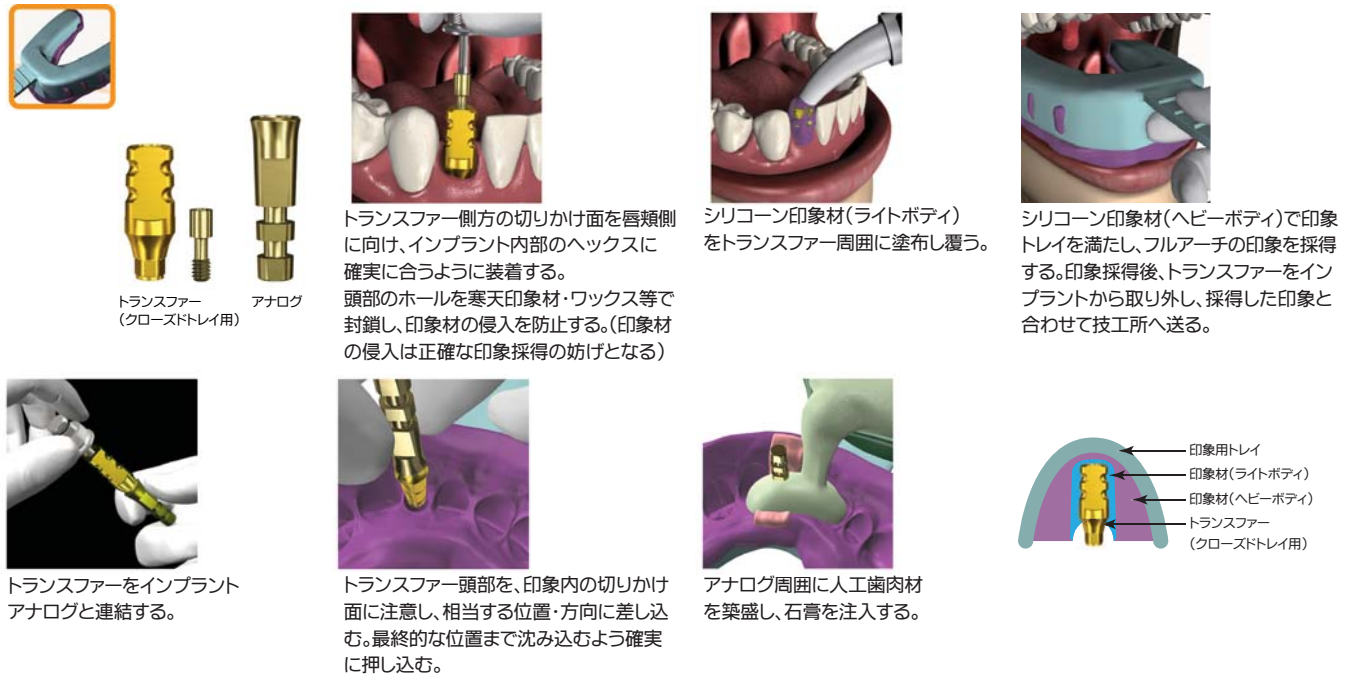

ダイレクト(オープントレイ)法

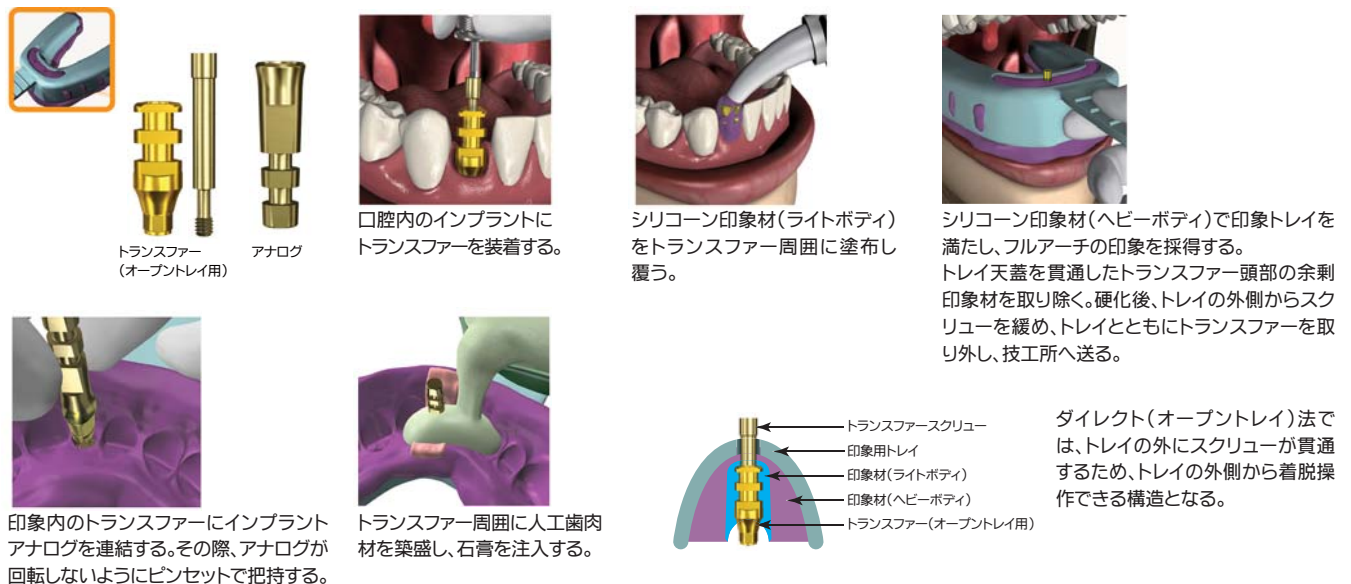

セメント固定式



カントウアー アバットメント

チタン合金製。
前歯部をイメージしたマージンが
付与され、加工の時間と手間を
抑えるデザイン。
カラー部高さと支台角度(15°)の
選択肢を用意。



フルカントウアー アバットメント

チタン合金製。
削合による形成を前提にしており、
加工の自由度が高く、強度も高い。



CT アバットメント

チタン合金製。
トランスファーとアバットメントと
して使用可能。
加工の時間と手間を抑えるデザ
イン。



ゴールドアバットメント

金合金製。
鋳接により、カスタムメイドのア
バットメントを製作するタイプ。
ラインナップ中、最も加工の自由
度が高く、チタン製アバットメント
では対応できない設計に選択。



スクリー固定式



スクリー固定式 アバットメント

チタン合金製。
アバットメントを介在させ、それ
を土台に上部構造(専用コーピ
ングを加工)をスクリー固定
するタイプ。
カラー部高さと傾斜角度の選
択肢を用意。
連結冠やブリッジに適用。



ゴールドアバットメント

金合金製。
鋳接を伴い、アバットメントその
ものを補綴物に加工するUCLA
アバットメント。
回転防止機構付は単冠に適用。
回転防止機構無しは連結冠や
ブリッジに適用。



オーバーデンチャー



バーオーバーデンチャー

スクリー固定式 アバットメント

チタン合金製。
アバットメントを介在させ、それ
を土台に上部構造(専用コーピ
ングを加工)をスクリー固定
するタイプ。
カラー部高さと傾斜角度の選
択肢を用意。
連結冠やブリッジに適用。



ボールアタッチメント

アングルド用ボールトップ +スクリー固定式 (SCR) アバットメント角度付き

チタン合金製。
角度付きアバットメントを介在させ、
ボールトップを固定する。

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


アングルド用ボールトップ +スクリー固定式 (SCR) アバットメント角度付き



チタン合金製。
ストレートタイプのアバットメントを
介在させ、ボールトップを固定する。



補綴コンポーネント サイズ詳細・カット限界の目安

	カラー部高さ	プラットフォーム	カット限界 (B)	高さ (A) (インプラントとの接合部から頭頂まで)
キャリアートランスファー アバットメント (CT アバットメント)	 2mm (1.6mm)	3.0mmD 用 3.4mmD 用	3.0mm 3.1mm	7.2mm 7.2mm
カントウアー (CTR) アバットメント ストレート	 1mm (0.7mm) 舌側は +1.0mm	3.0mmD N 用 3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.3mm 2.5mm	7.1mm 8.3mm 8.3mm
		3.0mmD N 用 3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.3mm 2.5mm	8.1mm 9.4mm 9.4mm
		3.0mmD N 用 3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.3mm 2.5mm	8.9mm 10.2mm 10.2mm
	 2mm (1.7mm) 舌側は +1.0mm	3.0mmD N 用 3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.3mm 2.5mm	8.1mm 9.4mm 9.4mm
		3.0mmD N 用 3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.3mm 2.5mm	8.9mm 10.2mm 10.2mm
		3.0mmD N 用 3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.3mm 2.5mm	8.9mm 10.2mm 10.2mm
カントウアー アバットメント 角度付き (15°)	 1mm (0.7mm) 舌側は +1.0mm	3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.5mm	7.2mm 7.2mm
		3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.5mm	8.2mm 8.2mm
	 2mm (1.7mm) 舌側は +1.0mm	3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.5mm	8.2mm 8.2mm
		3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.5mm	9.1mm 9.1mm
	 3mm (2.6mm) 舌側は +1.0mm	3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.5mm	9.1mm 9.1mm
		3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.5mm	9.1mm 9.1mm
チタンベース アバットメント	 0.5mm (0.4mm) (0.5mm)	3.0mmD 用 3.4mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.5mm 2.5mm	5.8mm 5.8mm 5.9mm
		3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.5mm	8.6mm 8.6mm
		3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.5mm	8.6mm 8.6mm
フルカントウアー (CTR) アバットメント	 2mm (1.6mm) 2mm (1.7mm)	3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.3mm 2.5mm	8.6mm 8.6mm
ゴールド アバットメント	 1mm (0.7mm)	3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.8mm 2.8mm	8.0mm 8.0mm
ゴールド アバットメント NE (ノンエンゲージ)	 1mm (0.7mm)	3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.9mm 2.9mm	7.9mm 7.9mm
テンポラリー アバットメント	 2mm (1.7mm) 3.0mmD N 用 1mm (0.7mm)	3.0mmD 用 3.4mmD 用	3.1mm 3.2mm	10.0mm 10.0mm
		3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.5mm 2.5mm	9.0mm 9.0mm
	 1mm (0.8mm)	3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.5mm 2.5mm	9.0mm 9.0mm
		3.0mmD 用 3.4mmD 用	2.5mm 2.5mm	9.0mm 9.0mm
スクリュー固定式 アバットメント & コーピング	 1mm (1.0mm)	3.0mmD 用 3.4mmD 用	3.8mm 3.8mm	8.8mm 8.8mm
		3.0mmD 用 3.4mmD 用	3.8mm 3.8mm	9.8mm 9.8mm
	 2mm (2.0mm)	3.0mmD 用 3.4mmD 用	3.8mm 3.8mm	9.8mm 9.8mm
		3.0mmD 用 3.4mmD 用	3.8mm 3.8mm	10.8mm 10.8mm
	 3mm (3.0mm)	3.0mmD 用 3.4mmD 用	3.8mm 3.8mm	10.8mm 10.8mm
		3.0mmD 用 3.4mmD 用	3.8mm 3.8mm	11.8mm 11.8mm
	 4mm (4.0mm)	3.0mmD 用 3.4mmD 用	3.8mm 3.8mm	11.8mm 11.8mm
		3.0mmD 用 3.4mmD 用	3.8mm 3.8mm	12.8mm 12.8mm

カラー部直径サイズは
各頁の品目をご覧ください。

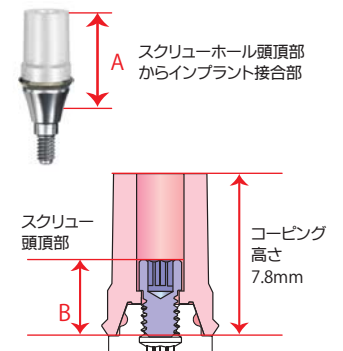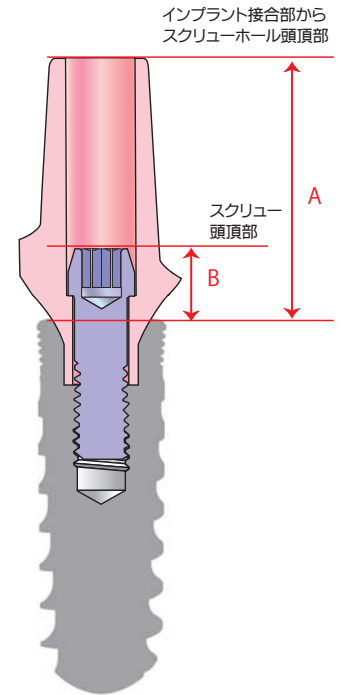

●カット限界 (B) のサイズは
「角度付き (15° 30°)」共通

カラー部高さ数値は太字が製品名での表記、()内は詳細値となります。

Implant Direct 製品専用FAX注文書

電話 番号	FAX 番号	注文書 記入日	ご使用 予定日
※FAXをお持ちの場合は必ずご記入ください。			
診療所名		ご芳名	
〒		都 道	市 区
ご住所		府 県	郡

商品コード	商品名	注文数	金額
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			

備考

- **ご注文方法**
ご注文は、所定の用紙にご記入のうえ、(株)インプラテックス または (株)インプラテックス指定の特約店にお願いいたします。
 - **製品の交換について**
製品の交換は、製品到着後6ヶ月以内とさせていただきます。(製品が未開封、パッケージに損傷の無い物、滅菌期限 1 年以上の物に限りです)
 - **製品の返品について**
返品は、お買い上げ製品がご注文の品と異なる場合、または破損や汚損している場合に限り、お受けいたします。
製品の返品は、製品到着後14日以内とさせていただきます。(製品が未開封、パッケージに損傷の無い物に限りです)
 - **配達料**
送料は基本的に負担させていただきますが、1回のご注文が10,000円未満(税別)の場合は送料をご負担頂くことになりますので、あらかじめご了承ください。
タイム便・超速便については別途料金が必要となります。
- ※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。表示価格は全て消費税別です。表示価格は全て希望小売価格となります。

FAX:03-5850-8505

(株式会社インプラテックス 東京本社)

●ご記載頂いた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。

販売名: インタラクティブ インプラント 医療機器承認番号: 22800BZ100024000	販売名: アナログ 医療機器届出番号: 13B1X00053AD0001	販売名: トランスファー 医療機器届出番号: 13B1X00053AD0003	販売名: リムーバルツール 医療機器届出番号: 13B1X00053AD0011	販売名: ドライバーツール 医療機器届出番号: 13B1X00053AD0006
販売名: レンチ 医療機器届出番号: 13B1X00053AD0007	販売名: ガイドピン 医療機器届出番号: 13B1X00053AD0005	販売名: ドリル 医療機器届出番号: 13B1X00053AD0008	販売名: 手術用レンチ 医療機器届出番号: 13B1X00053P00007	販売名: 技工用ツール 医療機器届出番号: 13B1X00053AD0004

製造販売元



株式会社 インプラテックス

いつも、となりに

〒116-0013東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル

TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00～17:00にお願いいたします。

歯科器具・インプラント材料・セミナー

インプラテックス

検索

Facebook
はじめました。



株式会社 インプラテックス

製造元



(米国)

お取扱店

※商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。

2016-12改訂 itxo.pdf