

vol.5
2025.5~

**IMPLANT
DIRECT™**
SIMPLY SMARTER

SWISHPLUS™

Implants | Prosthetics | Instruments

スウィッシュプラス カタログ・マニュアル

インプラント | 補綴 | インストルメント

エステティックレベル

SBM



OCTAGON &
CONICAL HEX



SwishPlus
SBM



株式会社 インプラテックス
いつも、となりに



インプラテックス
Implant Direct社製品
保証プログラム



RNレギュラーネック
4.8mmD プラットフォーム



SWISHPLUS™
スウィッシュプラス

インプラントダイレクト スウィッシュプラス 製品カタログ & マニュアル

目次

目次/Implant Direct社について/カラーコードについて	2
特徴とデザイン/表面性状/埋入位置について	3
ラインナップ/パッケージ/仕様	4
インプラント/品名長さに対する実際の埋入深度	5
補綴コンポーネントチャート	6-7
カバースクリュー・ヒーリングカラー・トランスファー・アナログ・スキャンアダプター	8
カントウアーアバットメント・スクリュー	9
ストレートアバットメント 専用トランスファー/アナログ	10
テンポラリー・ゴールドアバットメント・スクリュー固定式アバットメント用ボルトトップ	11
スクリュー固定式 アバットメント	12
ロケーター® アタッチメントシステム	13
外科 補綴用器具	14-15
テクニカ ツイストドリル ブラック(ストップ付)	16
テクニカ ツイストドリル ブラック ドリルチャート	17
サージカルドリル	18
埋入手術手順/角度付きアバットメントを使用する際の埋入のポイント	19
サージカルトレイコンテンツ	20
サージカルドリル ツール 一覧	21
チェアサイドでのアバットメントの形成手順/印象採得手順	22
補綴コンポーネント サイズ詳細・カット限界の目安	23

Implant Direct 社について



Implant Direct社は2006年にGerald A. Niznick氏により創立されました。

同氏はインプラントにおいてインターナルコネクションを含む、米国特許を35も取得し、その業績に対し、米国内をはじめ世界的にも高い信頼と評価を集めています。

米国カリフォルニア州に本拠地を構えるImplant Direct社は米国歯科医療分野大手Envista社のNobel Biocare systemsに属しています。

使用するインプラントのメーカーが世界規模であるということは、患者様が他国においてもメンテナンスを受けることが可能であること、安定した商品供給が受けられること等はもちろん、患者様に安心してインプラント治療を選択いただける大切なポイントにもなります。また、その製品は、患者様の負担軽減とDr.の施術のしやすさを配慮した専用パーツ・器具を多数ラインナップしています。



Implant Direct社米国工場内部



研修センター

カラーコードについて コンポーネントや専用ツールの選択を容易にします。

インプラント直径	インプラント直径 ドリル・サージカルトレイ のカラーコード	プラットフォームサイズ のカラーコード インプラント上部パーツ選択時に使用
3.3mmD		プラットフォーム直径 3.7mmD
4.1mmD		プラットフォーム直径 4.8mmD
4.8mmD		バイアルキャップトップの識別ラベルは白色



販売名: イントラクティブ インプラント
一般の名称: 歯科用インプラントシステム
分類: 高度管理医療機器
医療機器承認番号: 22800BZ100024000

販売名: キャスタブルコーピング
一般の名称: 歯科インプラント技工用器材
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0002

販売名: レンチ
一般の名称: 手術用レンチ
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0007

販売名: Salvin ピンセット
一般の名称: ピンセット
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053P00025

販売名: Legacy2,3 インプラント
一般の名称: 歯科用インプラントシステム
分類: 高度管理医療機器
医療機器承認番号: 22700BZ100018000

販売名: トランスファー
一般の名称: 歯科インプラント技工用器材
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0003

販売名: Salvin 手術用レンチ
一般の名称: 手術用レンチ
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053P00007

販売名: スキャンアダプター
一般の名称: 歯科インプラント技工用器材
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0014

販売名: ID インプラント用可搬式コンポーネント
一般の名称: 歯科用インプラントアバットメント
分類: 高度管理医療機器
医療機器承認番号: 22600BZ100016000

販売名: 技工用ツール
一般の名称: 歯科インプラント補綴用器具
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0004

販売名: ドリル
一般の名称: 手術用ドリルビット
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0008

販売名: リムーバールツール
一般の名称: 歯科用インプラント手術器具
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0011

販売名: インプラントダイレクトオーバーデンチャーアタッチメント
一般の名称: 歯科用精密弾性アタッチメント
分類: 管理医療機器
医療機器承認番号: 228ALBZ100002000

販売名: ガイドピン
一般の名称: 歯科用インプラント手術器具
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0005

販売名: サージカルキット
一般の名称: 手術用ドリルビット
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0009

販売名: ドライバーツール
一般の名称: 手術用ネジ回し
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0006

販売名: アナログ
一般の名称: 歯科インプラント技工用器材
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0001

販売名: サージカルキット
一般の名称: 手術用ネジ回し
分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00053AD0006


特徴とデザイン

エステティックレベルで埋入されるスウィッシュプラス


- ・骨縁上のネック部機械加工面は1mmで従来のティッシュレベルより審美的に有利(エステティックレベルで埋入)。
- ・ネック部の下にインプラント周囲の骨吸収を抑えるマイクログループを付与。
- ・次第に深くなるシングルリードスレッドは初期固定性を増大。
- ・埋入操作を容易にする2本のカッティンググループ。
- ・接合部インターナルオクタゴンコネクションの強度を高めるダブルインターナルヘックスの採用により、狭小骨での歯冠幅径を抑えた審美性の高い補綴が可能(3.3mmDインプラント)。
- ・インプラント内部のオクタゴン面には、高い埋入トルクが掛かった場合でも接合部にダメージを与えないよう、スクエアツールで埋入するための溝が付与(特許)。
- ・6mm長のショートサイズのインプラントもラインナップされており、多様な選択肢を持つ。
- ・4mmスクエア及びオクタゴン仕様のラチェットが使用できるキャリア/トランスファーを採用。
- ・インターナルオクタゴン/ヘックスの面部の位置関係も把握できるカラーコード化されたキャリア/トランスファー。
- ・カバースクリュー、2mmHエクステンダー、キャリア/トランスファーを含むオールインワンパッケージ。
- ・豊富なパーツ類により様々な補綴形態にも対応可能。

⚠ スウィッシュプラスインプラントの埋入位置は、品名長さより **1mmL 深く埋入** (P.17 参照)

エステティックレベルの埋入位置について

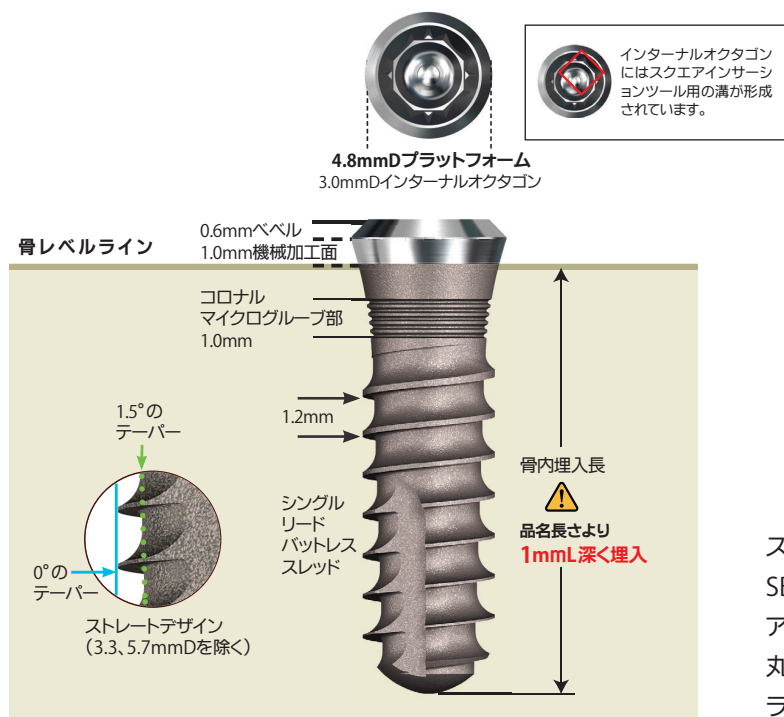


表面性状

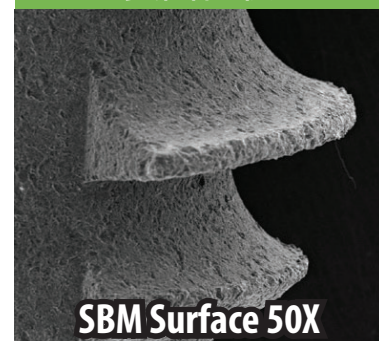

スウィッシュプラスインプラントの基本的な表面性状は、SBM(可溶性プラスチックメチアであるハイドロキシアパタイト結晶を使用)プラスト処理により、スレッドを丸めることなく形成された中程度の粗造面です。インプラントネック中間部までSBM処理が施されています。



キャリア頭部とティンプルはインプラント内部オクタゴン/ヘックスとリンクしている。

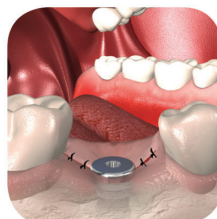


カバースクリュー装着




カバースクリューと2mmHエクステンダーを組合せてヒーリングカラーとして使用可能。




ラインナップ

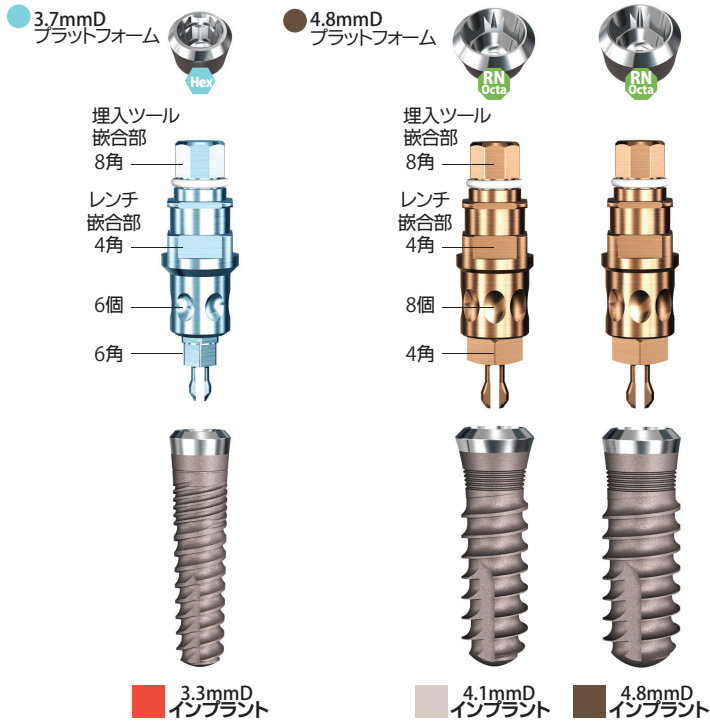

パッケージ

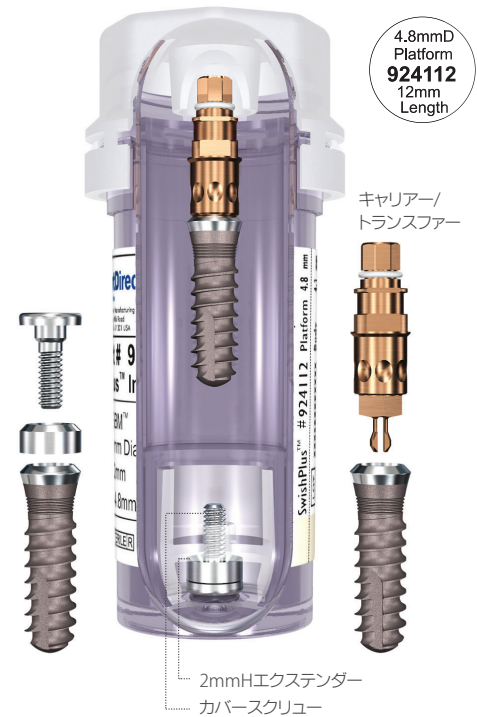

仕様

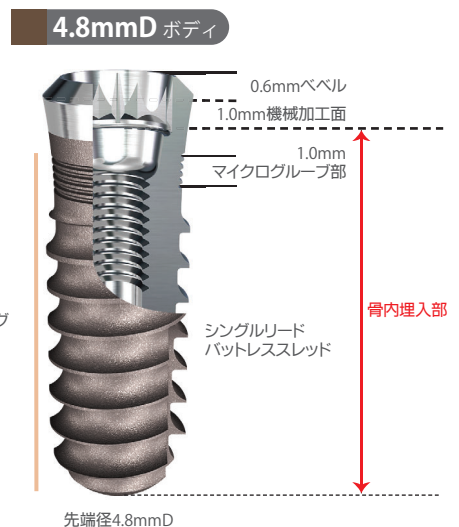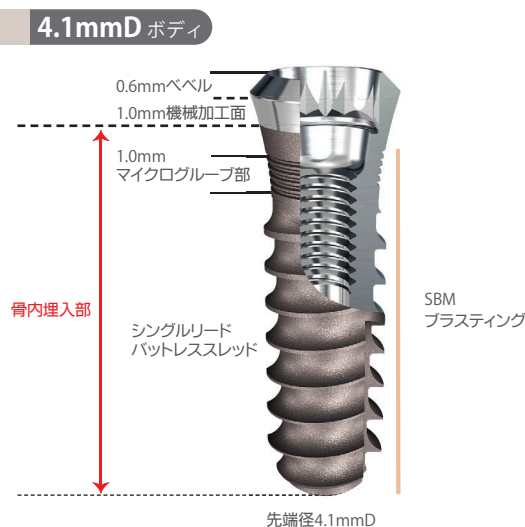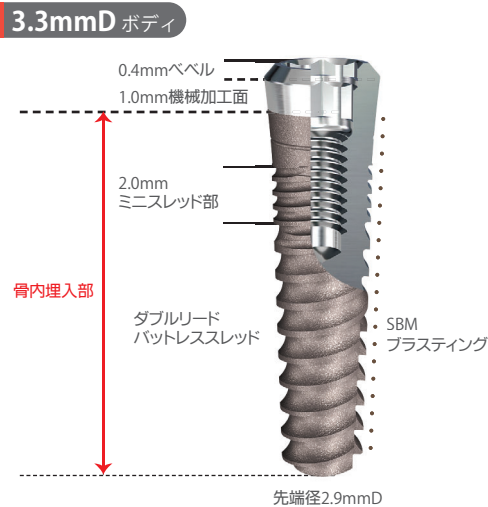

インプラント

SBM

3.3mmD ボディ

Hex

滅菌済
キャリアー/トランスファー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属

商品コード	品名	骨内埋入長 エスティックレベル	プラットフォーム
001-923308	3.3×8	9mmL	3.7mmD
001-923310	3.3×10	11mmL	3.7mmD
001-923312	3.3×12	13mmL	3.7mmD
001-923314	3.3×14	15mmL	3.7mmD

3.3×8 3.3×10 3.3×12 3.3×14



4.1mmD ボディ


RN Octa

滅菌済
キャリアー/トランスファー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属

商品コード	品名	骨内埋入長 エスティックレベル	プラットフォーム
001-924106	4.1×6	7mmL	4.8mmD
001-924108	4.1×8	9mmL	4.8mmD
001-924110	4.1×10	11mmL	4.8mmD
001-924112	4.1×12	13mmL	4.8mmD
001-924114	4.1×14	15mmL	4.8mmD

4.1×6 4.1×8 4.1×10 4.1×12 4.1×14

Short

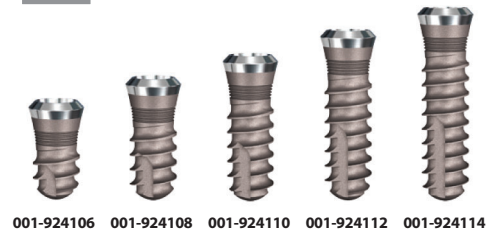

4.8mmD ボディ

RN Octa

滅菌済
キャリアー/トランスファー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属

商品コード	品名	骨内埋入長 エスティックレベル	プラットフォーム
001-924806	4.8×6	7mmL	4.8mmD
001-924808	4.8×8	9mmL	4.8mmD
001-924810	4.8×10	11mmL	4.8mmD
001-924812	4.8×12	13mmL	4.8mmD

4.8×6 4.8×8 4.8×10 4.8×12

Short



3.3mmDインプラントの適用

- ・複数歯連結冠、ブリッジ または オーバーデンチャー固定
- ・単独歯欠損への使用は下顎の中切歯、側切歯及び上顎の側切歯相当部位にのみ適用
- ※ 臼歯部に埋入した3.3mmDインプラントへは、アングルドアパットメントの使用は推奨しない。

6mmLインプラントの適用

- ・他のインプラントとの連結
- ・できるだけ太いインプラントの使用


スウィッシュプラスの品名長さに対する実際の埋入深度

重要




スウィッシュプラスの
埋入位置は品名長さより
1mmL 深く埋入

例) インプラント名称が 4.1×10mmL の場合、
実際の骨内埋入部分は 11mmL になります。

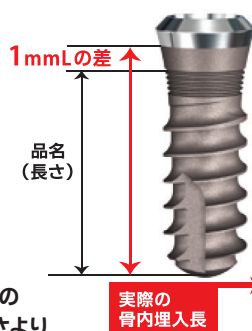

品名 (長さ)	6 mmL	8 mmL	10 mmL	12 mmL	14 mmL
スウィッシュ プラス埋入位置					
骨内埋入長 エスティックレベル	7 mmL	9 mmL	11 mmL	13 mmL	15 mmL

品名長さより 1mmL 深く埋入

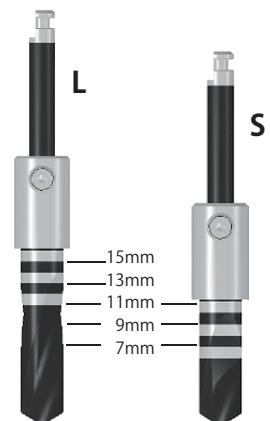

補綴コンポーネントチャート

3.7mmDプラットフォーム



3.3mmDインプラント



付属のキャリアー/トランスファー


カバースクリュー
ヒーリングカラー
インプラントトランスファー
インプラントアナログ
スキャンアダプター



002-903701H



002-903713H

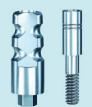

002-903705



002-903708



002-903706



002-853006D
3Dプリンター模型用



003-873009PT

カントウアーアバットメント
(ストレート & 角度付き 15°)



002-853031



002-853032



002-853051



002-853052

ストレートアバットメント

トランスファー&キャップ
アナログ
コーピング



002-853021



002-853022



002-853023



002-903702



002-303726



002-9037

各種アバットメント



002-853041



002-853049



002-853047

ロケター® アバットメント



002-853091-L



002-853092-L



002-853093-L



002-853094-L



002-853095-L

スクリュー固定式アバットメント
(角度付き 15°)



002-85306215S
002-85306315S
002-85306330S
002-85306430S

補綴コンポーネントチャート

4.8mmDプラットフォーム



4.1 & 4.8mmDインプラント




付属のキャリアー/トランスファー




002-904801H




002-904813NH
002-904813H

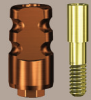


002-904805N

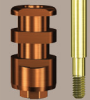

002-904808N

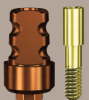

002-904805

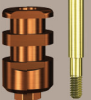

002-904808



002-904806



002-904806D
3Dプリンター 模型用



003-904809PT



002-904831



002-904832



002-904831P
(在庫のみ)



002-904851



002-904852



002-904851P



002-904821N



002-904822N



002-904820



002-9048201



002-904821



002-904822



002-904702



002-304726



002-9047



002-305702



002-305726



002-3057



002-904841



002-904849



002-904847



002-904891-L



002-904892-L



002-904893-L



002-904894-L



002-904895-L



002-904861



002-904862



002-904863



002-904864



002-90486415S
002-90486430S

カバースクリュー・ヒーリングカラー・トランスファー・アナログ・スキャンアダプター

スクリューホールと使用するドライバーについて



Duo-Grip™

・使用ドライバー: SCS Driver、1.25mmヘックスドライバーの2種

・Duo-Grip™スクリューは、4.8mmDプラットフォーム（オクタゴン）のアパットメントスクリューに採用

・カラーコード: 陽極酸化処理されたイエロー

スクリーホール

4.8mmDプラットフォーム



1.25ヘックス

・使用ドライバー: 1.25mmDヘックスドライバー

・3.7mmDプラットフォーム（ヘックス）のアパットメントスクリューに採用。

・カラーコード: 陽極酸化処理されたブルー

スクリーホール

3.7mmDプラットフォーム

カバースクリュー

Duo-Grip™ 構造で1.25mmヘックスドライバー・SCS Driverが使用可能

滅菌済

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-903701H	3.7mmD	3.8mm	1mm
002-904801H	4.8mmD	4.9mm	1mm



ヒーリングカラー

Duo-Grip™ 構造で1.25mmヘックスドライバー・SCS Driverが使用可能

滅菌済

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-903713H	3.7mmD	3.7mm	3mm
002-904813NH	4.8mmD	5.1mm	3mm
002-904813H	4.8mmD	5.8mm	3mm





インプラントトランスファー クローズドトレイ式

専用スクリュー1個付属

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-903705	3.7mmD	3.8mm	002-100041
002-904805N	4.8mmD	5.1mm	002-100042
002-904805	4.8mmD	5.7mm	002-100042

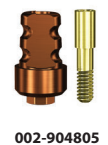
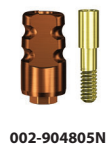


インプラントトランスファー オープントレイ式

専用スクリュー1個付属

未滅菌


商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-903708	3.7mmD	3.8mm	002-100026
002-904808N	4.8mmD	5.1mm	002-100018
002-904808	4.8mmD	5.7mm	002-100018

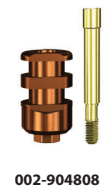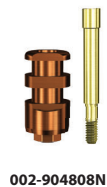

インプラントアナログ

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	適用
002-903706	3.7mmD	
002-853006D	3.7mmD	3Dプリンター模型用
002-904806	4.8mmD	
002-904806D	4.8mmD	3Dプリンター模型用

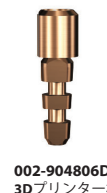

※3Dプリンターで模型を作成する際は、“3Dプリンター模型用”をお選びください

スキャンアダプター

専用スクリュー1個付属

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	品名
003-873009PT	3.7mmD	スキャンアダプターレガシーP3.0
003-904809PT	4.8mmD	スキャンアダプタースイッチP4.8



用途: 模型上のアナログ、もしくは口腔内のインプラントに接続し、スキャナーでスキャンし、その形状データとライブラリのデータを重ね合わせることで、インプラントの位置関係を特定

スキャンアダプターの
ライブラリはこちら

カントウアーアバットメント・スクリュー

商品コード下の黒丸数字はインプラント体とのインターフェイス(P23の図)を示しています。
サイズ詳細・カット限界の目安はP23をご覧ください。


カントウアー アバットメント (ストレート)

未滅菌

専用スクリュー1個付属

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ(唇側)	専用スクリュー
002-853031	3.7mmD PS	3.7mm	1mm	002-100020
002-853032	3.7mmD PS	3.7mm	2mm	002-100020
002-904831	4.8mmD	5.7mm	0.5mm	002-100019
002-904832	4.8mmD	5.7mm	2mm	002-100019
002-904831P (在庫のみ)	4.8mmD PS	5.7mm	0.75mm ※舌側は+1.0mm	002-100019

※PS=インターフェイスがプラットフォームシフトタイプとなります。

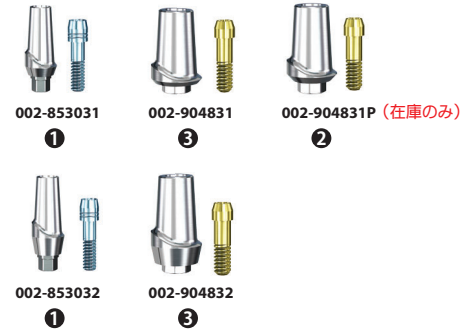


カントウアー アバットメント 15° (角度付き)

未滅菌

専用スクリュー1個付属

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ(唇側)	専用スクリュー
002-853051	3.7mmD PS	4.8mm	0.75mm	002-100020
002-853052	3.7mmD PS	4.5mm	2mm	002-100020
002-904851	4.8mmD	5.7mm	0.5mm	002-100019
002-904852	4.8mmD	6.0mm	2mm	002-100019
002-904851P	4.8mmD PS	5.3mm	0.75mm ※舌側は+1.0mm	002-100019

※PS=インターフェイスがプラットフォームシフトタイプとなります。

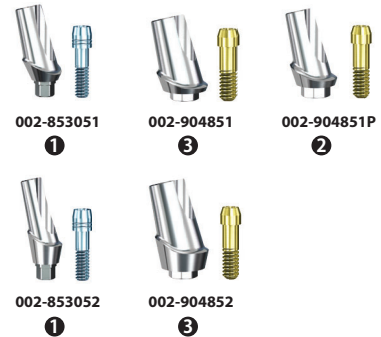


スクリュー

未滅菌

商品コード	品名 & 用途
プラットフォーム: 3.7mmD用	
002-100020S	ナロー用フィクセーションスクリューXS スクリュー固定式アバットメント角度付き(15・30°)用
002-100020	ナロー用フィクセーションスクリューS アバットメント用
002-100041	ナロー用フィクセーションスクリューM インプラントトランスファークローズドトレイ式&プラスチックテンポラリーアバットメント用
002-100026	インプラントトランスファースクリューD1.6 オープン インプラントトランスファークローズドトレイ式&ワキシング用
002-100026XL (在庫のみ)	ワキシングスクリューD1.6 ワキシング用ロングタイプ


各2イリ

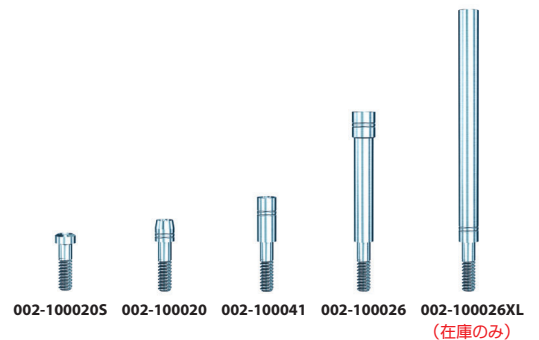

プラットフォーム: 4.8mmD用

002-100019S	フィクセーションスクリューD1.9ショート スクリュー固定式アバットメント角度付き(15・30°)用
002-100019	フィクセーションスクリューD1.9 アバットメント用
002-100042	フィクセーションスクリューD1.9ロング インプラントトランスファークローズドトレイ式&プラスチックテンポラリーアバットメント用
002-100018	インプラントトランスファースクリューD1.9 オープン インプラントトランスファークローズドトレイ式&ワキシング用
002-100018XL (在庫のみ)	ワキシングスクリューD1.9 ワキシング用ロングタイプ

各2イリ

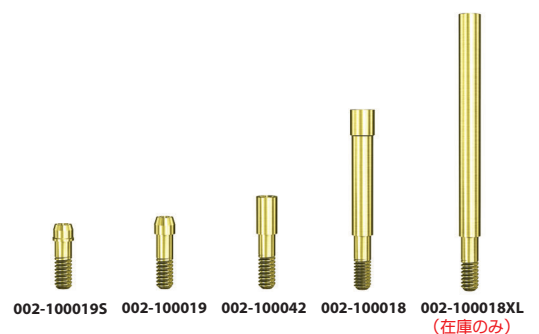

ストレートアバットメント 専用トランスファー / アナログ


商品コード脇の黒丸数字はインプラント体とのインターフェイス(P23の図)を示しています。

ストレートアバットメント

トランスファー・アバットメント用キャップ
専用スクリュー各1個付属 **未滅菌**

商品コード	プラットフォーム	アバットメント直径	カラー部高さ	使用アナログ	専用スクリュー
002-853021	3.7mmD PS	3.7mm	1mm	002-9037	002-100020
002-853022	3.7mmD PS	3.7mm	2mm	002-9037	002-100020
002-853023	3.7mmD PS	3.7mm	3mm	002-9037	002-100020
002-904821N	4.8mmD	4.8mm	0.5mm	002-9047	002-100019
002-904822N	4.8mmD	4.8mm	2mm	002-9047	002-100019
002-904821	4.8mmD	5.7mm	0.5mm	002-3057	002-100019
002-904822	4.8mmD	5.7mm	2mm	002-3057	002-100019

※PS=インターフェイスがプラットフォームシフティングとなります。

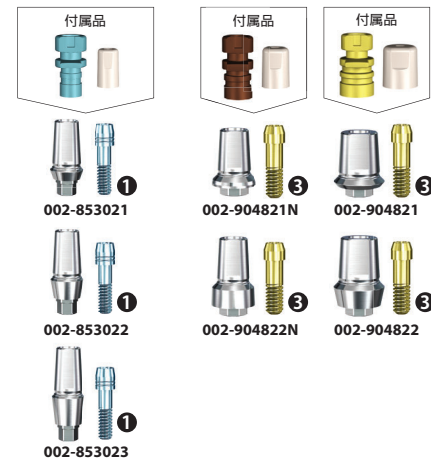

ストレートアバットメントキット

トランスファー・アナログ・アバットメント用キャップ
キャストブルコーピング各1個付属
専用スクリューは1ピースタイプには付属しません。 **未滅菌**

商品コード	プラットフォーム	アバットメント直径	使用アナログ	専用スクリュー
002-904820	4.8mmD	4.7mm	002-9047	002-100019
002-9048201	4.8mmD	4.7mm	002-9047	—



ストレートアバットメントアナログ

キャストブルコーピング付属 **未滅菌**

商品コード	アバットメント直径
002-9037	3.7mm
002-9047	4.7mm
002-3057	5.7mm



※本パーツのカラーコードはインプラントのプラットフォームではなく、アバットメントポストの直径によるものです。

ストレートアバットメントトランスファー

未滅菌

商品コード	アバットメント直径
002-903702	3.7mm
002-904702	4.7mm
002-305702	5.7mm

各2イリ



※本パーツのカラーコードはインプラントのプラットフォームではなく、アバットメントポストの直径によるものです。

ストレートアバットメント用キャップ (暫間期間のアバットメント頭部のカバー)

未滅菌

商品コード	アバットメント直径
002-303726	3.7mm
002-304726	4.7mm
002-305726	5.7mm

各2イリ



ストレートアバットメントキャストブルコーピング (ワックスアップ用)

未滅菌

商品コード	アバットメント直径
002-303728	3.7mm
002-304728	4.7mm
002-305728	5.7mm

各2イリ



テンポラリー・ゴールドアバットメント・スクリュー固定式アバットメント用ボールトップ

商品コード下の黒丸数字はインプラント体とのインターフェイス(P23の図)を示しています。
サイズ詳細・カット限界の目安はP23をご覧ください。

プラスチックテンポラリーアバットメント

未滅菌

専用スクリュー1個付属

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853047	3.7mmD PS	3.7mm	1mm	002-100041
002-904847	4.8mmD	5.7mm	1mm	002-100042

※PS=インターフェイスがプラットフォームシフトリングとなります。



002-853047
①



002-904847
③

チタンテンポラリーアバットメント(NE) (ノンエンゲージ)

未滅菌

専用スクリュー1個付属

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853049	3.7mmD PS	3.7mm	1mm	002-100020
002-904849	4.8mmD	5.0mm	1mm	002-100019

※PS=インターフェイスがプラットフォームシフトリングとなります。



002-853049
①



002-904849
③

ゴールドアバットメント (ノンエンゲージ)

未滅菌

専用スクリュー1個付属

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853041	3.7mmD PS	3.7mm	1mm	002-100020
002-904841	4.8mmD	5mm	0.8mm	002-100019

※PS=インターフェイスがプラットフォームシフトリングとなります。


ゴールドアバットメント(ノンエンゲージ)は、スクリューリテインの連結冠、ブリッジに使用します。
アバットメントがそのまま上部構造に加工され、直接インプラントにスクリュー固定される構造になります。



002-853041
①



002-904841
③

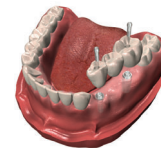


スクリュー固定式アバットメント用

アングル用ボールトップ

スクリュー固定式(SCR)アバットメントに装着し使用します(P.14掲載)。

ボールアバットメントトランスファー
アバットメント用キャップ付属
1.25mmヘックスドライバーが使用可能

商品コード	品名
002-1000705	アングル用ボールトップ

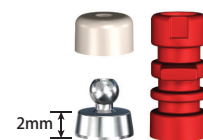

002-1000705

組合せ図



角度付き

アングル用ボールトップコンポーネント

未滅菌


商品コード	品名
002-100081	ボールアタッチメントハウジング
002-100082	ボールアタッチメントナイロンライナー
002-100088	ボールアタッチメントフィメールセット
002-100083	ナイロンライナートランスファー
002-100084	ボールアバットメントトランスファー
002-100085	ボールアバットメントアナログ
002-100087	ボールアバットメント用キャップ
003-100086	ボールアバットメントツールセット



002-100081 002-100082
セット : 002-100088



002-100083

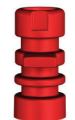

002-100084



002-100085



002-100087



003-100086

ボールアバットメントツール
セットの使用法はこちら
<http://www.itx.co.jp/page2877/>



スクリュー固定式 アバットメント

サイズ詳細・カット限界の目安はP23をご覧ください。

スクリュー固定式(SCR) アバットメント

PLトランスファー、アバットメント用キャップ付属
1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-904861	4.8mmD	5.0mm	1mm
002-904862	4.8mmD	5.0mm	2mm
002-904863	4.8mmD	5.0mm	3mm
002-904864	4.8mmD	5.0mm	4mm



002-904861



002-904862



002-904863



002-904864



付属品

スクリュー固定式(SCR) アバットメント15°・30°(角度付き)

PLトランスファー、アバットメント用キャップ、
専用スクリュー1個付属

未滅菌

プラットフォーム	カラー部高さ(高位)	15°	30°	専用スクリュー
3.7mmD PS	2.5mm	002-85306215S	—	002-100020S
3.7mmD PS	3.5mm	002-85306315S	002-85306330S	002-100020S
3.7mmD PS	4.5mm	—	002-85306430S	002-100020S
4.8mmD	3.0mm	002-90486415S	—	002-100019S
4.8mmD	4.0mm	—	002-90486430S	002-100019S

※低位は 15°: -1.3mm

30°: -2.5mm

※PS=インターフェイスがプラットフォームシフティングとなります。

15°



002-85306215S

30°



002-85306330S



002-85306315S



002-85306430S



002-90486415S



002-90486430S



付属品



スクリュー固定式アバットメント、



角度付き (15°・30°) は、下記コンポーネントと組合せ使用します。

スクリュー固定式(SCR) アバットメント印象用パーツ他

1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

商品コード	品名
002-100006D	スクリュー固定式アバットメントアナログ チタン
002-100062	スクリュー固定式アバットメントトランスファー (オープン)
002-100063	スクリュー固定式アバットメントトランスファー (クローズ)
002-100068	スクリュー固定式アバットメントPLトランスファー 2イリ
002-400013	スクリュー固定式アバットメント用キャップ 2イリ
002-100014	SRAトランスファースクリューオープンD1.8 2イリ
002-100015	SRAトランスファースクリュークローズD1.8 2イリ
003-100009P	スキャンアダプタースクリュー固定式アバットメント用



002-100006D



002-100062



002-100063



002-100068



002-400013



002-100014



002-100015



003-100009P

スクリュー固定式(SCR) アバットメント共通コンポーネント

1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

商品コード	品名
002-100005	コーピングスクリュー (交換用) 2イリ
002-100067	ゴールド&プラスチックコーピング
002-100069	チタンテンポラリーコーピング



002-100005



002-100067



002-100069

ロケター® アタッチメントシステム

ロケター® アバットメント

ロケタードライバー・コアツール使用 未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-853091-L	3.7mmD PS	3.7mm	0.75mm
002-853092-L	3.7mmD PS	3.7mm	2mm
002-853093-L	3.7mmD PS	3.7mm	3mm
002-853094-L	3.7mmD PS	3.7mm	4mm
002-853095-L	3.7mmD PS	3.7mm	5mm
002-904891-L	4.8mmD	4.8mm	1mm
002-904892-L	4.8mmD	4.8mm	2mm
002-904893-L	4.8mmD	4.8mm	3mm
002-904894-L	4.8mmD	4.8mm	4mm
002-904895-L	4.8mmD	4.8mm	5mm

※PS=インターフェイスがプラットフォームシフティングとなります。



ロケターの詳細・術式マニュアルはこちら




ロケター®アバットメントコンポーネント

未滅菌

商品コード	品名	開き角	維持力
002-100092BL4	リプレイスメント ブルー 4イリ	20° 以下	0.68kgf
002-100092PL4	リプレイスメント ピンク 4イリ	20° 以下	1.36kgf
002-100092CL4	リプレイスメント クリア 4イリ	20° 以下	2.27kgf
002-100092ZL4	リプレイスメント グレー 4イリ	40° 以下	0.00kgf
002-100092RL4	リプレイスメント レッド 4イリ	40° 以下	0.45kgf
002-100092EL4	リプレイスメント オレンジ 4イリ	40° 以下	0.91kgf
002-100092GL4	リプレイスメント グリーン 4イリ	40° 以下	1.82kgf
002-100093L4	リプレイスプロセッシングメント 黒 4イリ		
002-100091L4	デンチャーキャップセット 4イリ	リプレイスプロセッシングメント 黒 組込み済	
890-00001	ロケターブロックアウトスペーサー (20個入) 厚み 0.5mm		
002-1000100L4	プロセッシングスペーサー 4イリ	高さ3.3mm 外径6.35mm	
002-10098SIL2	メーリングプロセッシングバック※ 2イリ	20° 以下	ブルー・ピンク・クリア
002-10098SL2	EXTメーリングプロセッシングバック※ 2イリ	40° 以下	レッド・オレンジ・グリーン

※ブロックアウトスペーサー・デンチャーキャップセット・各リプレイスメントが入っています。

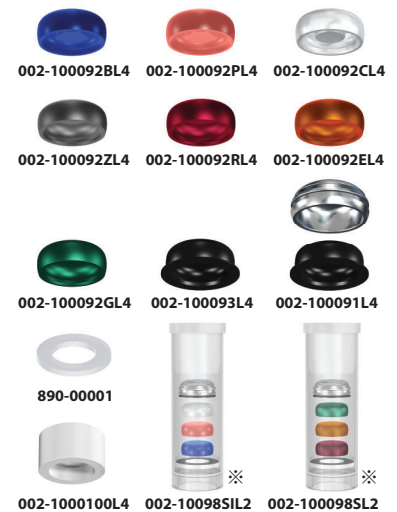

ロケター®アバットメントトランスファー、アナログ、アラインメントツール

未滅菌


商品コード	品名
002-100094L4	インプレッションコーピング 4イリ
002-100095L4	フィメールアナログ4mmD 4イリ
003-100097L4	パラレルポスト 4イリ
003-100099L	アングルメジャメントガイド



ロケター®インスツルメント

未滅菌

商品コード	品名
003-LDD	ロケタードライバー29mmCA
003-LDDS	ロケタードライバー23mmCA
003-LDT	ロケタースクエアドライバー21mmレンチ
003-LDTS	ロケタースクエアドライバー15mmレンチ
003-100096L	ロケターコアツール
003-100096LEA	ロケターアバットメントドライバー
003-TW30	トルクレンチ30Ncm

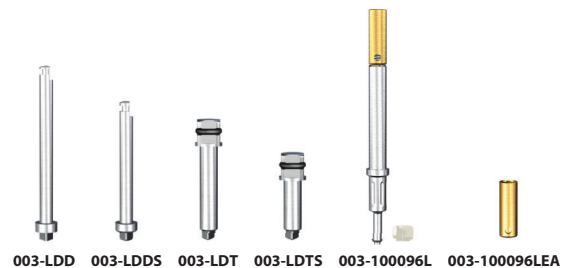

ロケターコアツール



患者説明用ロケター®模型&リーフレット

商品コード	品名
040-80031	ロケターオーバーデンチャー模型 下顎2本
900-00003	ロケター説明用リーフレット (100部) (名入れ可)



外科 補綴用器具

インプラント埋入用ツール

未滅菌

商品コード 品名

キャリアートランスファー頭部用

003-SPFMD スウィッシュフィクスチャーマウントツールCA

3.7mmDプラットフォーム用

Hex

003-HT2.0LG 2.0mmヘックスインサージョンドライバーL (パーツの落下防止機能付/全長30mm)

003-HT2.0SG 2.0mmヘックスインサージョンドライバーS (パーツの落下防止機能付/全長18mm)

003-HD2.0SG 2.0mmヘックスインサージョンドライバーCA (パーツの落下防止機能付/全長25mm)

4.8mmDプラットフォーム用

RN Octa

003-904807 SP ST インサージョンツール (先端スクエア)

スウィッシュラチェットインサート

用途: ラチェットレンチ(003-R)に装着し、インプラントのバイアルからのキャリアーおよび埋入に使用

スウィッシュフィクスチャーマウントツールCA

用途: コントラに装着し、インプラントのバイアルからのキャリアーおよび埋入に使用

2.0mmヘックスインサージョン

用途: インプラント頭部に挿入し、インプラントを埋入

3.7mmDプラットフォーム用

Hex

SPSTインサージョンツール (先端スクエア)

用途: インプラント頭部に挿入し、インプラントを埋入

4.8mmDプラットフォーム用

RN Octa

オクタゴンアライメントツール (先端オクタ)

用途: インプラント頭部に挿入し、インプラントを埋入

4.8mmDプラットフォーム用

RN Octa

パーツ着脱用 ヘックスドライバー

未滅菌

商品コード 品名

003-THT1.25 1.25mmテーパードヘックスドライバー L (パーツ落下防止機能付/全長28mm)

003-THT1.25S 1.25mmテーパードヘックスドライバー S (パーツ落下防止機能付/全長23mm)

1.25mmのデリバリーヘックスドライバー

用途: カバースクリュー着脱、ヒーリングカラー着脱

アバットメントスクリュー、スクリュー固定式上部構造のスクリューのキャリアー 等
先端にテーパーが付与され、口腔内でのパーツの落下を防止する。

アバットメント締結用 ヘックスドライバー

未滅菌

商品コード 品名

003-HT1.25L 1.25mmヘックスドライバーエクストラロング (最終締結用/全長27mm)

003-HT1.25 1.25mmヘックスドライバーL (最終締結用/全長22mm)

003-HT1.25S 1.25mmヘックスドライバーS (最終締結用/全長18mm)

003-HD1.25 1.25mmヘックスツールCA (最終締結用/全長28mm)

1.25mmのヘックスドライバー

用途: アバットメントスクリュー、スクリュー固定式上部構造のスクリューの最終締結
頭頂部に4mmスクエアを有したツールは、トルクレンチとの併用が可能。



003-SPFMD



003-HT2.0LG



003-HT2.0SG




003-HD2.0SG



003-904807

頭頂部に4mmスクエアを有したツールで、
埋入用ラチェットレンチとの併用が可能

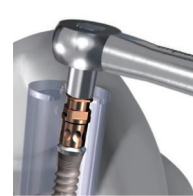

スウィッシュラチェット
インサートの使用法



スウィッシュフィクスチャー
マウントツールCAの使用法



003-THT1.25



003-THT1.25S



003-HT1.25L



003-HT1.25



003-HT1.25S



003-HD1.25

外科 補綴用器具

レンチ器具

未滅菌

商品コード	品名
003-R	ラチェットレンチ (外科用)
003-TWE	トルクレンチ 10-90Ncm (外科補綴用)
※003-TWEには、003-C8521、003-C9141の2種ドライバーが付属	
040-07005	トルクレンチ20Ncm (補綴用)
003-TW30	トルクレンチ30Ncm (補綴用)
003-C8521	4×4mmドライバー (4X4⇒TWEレンチに装着/手回しも可)
003-C9141	3mmヘックスドライバー (CA⇒TWEレンチに装着/手回しも可)

トルクレンチ 10-90Ncm(ラチェット機能付)


用途: ラチェット機能付。

ゲージ針で埋入および締結トルクを計測します。

4×4mmドライバー、3mmヘックスドライバー2種が付属します。




↑
トルクレンチに取り付けたアダプター(回転ダイヤル付)

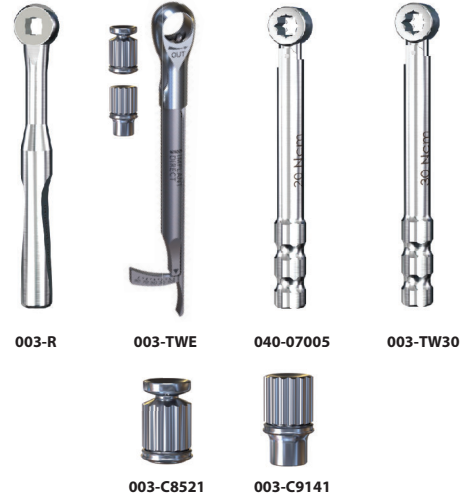

その他器具

未滅菌


商品コード	品名
003-PAR	パラレリングツール2.8/2.3
003-LDRILL	ロケータードリル2.3
003-DE	ドリルエクステンダー (17mm延長)
003-ABH	アバットメントホルダー (補綴用)

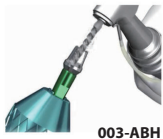

アバットメントホルダー

用途: パーツの切削・研磨時の把持用ハンドル


各種アナログを装着し、その先に取り付けたパーツの切削・研磨する際のハンドルとして使用する。

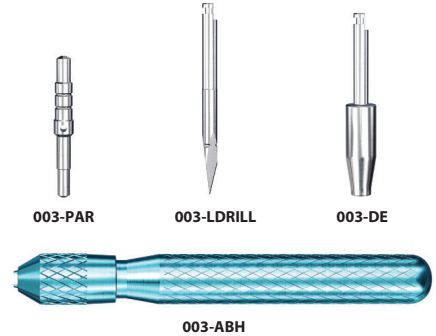

除去用レスキューツール

未滅菌

商品コード	品名
003-IXT	IXTインプラントリムーバルツール
003-SXT	SXTスクリューリムーバルツール

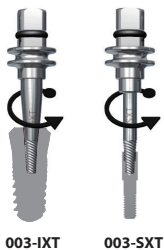

IXTインプラントリムーバルツール

用途: インプラント除去の際、ネック部のインターナルヘックス/オクタゴンにドライバーが嵌合しないケースで使用
レンチにて反時計回しにインプラント内にねじ込んで使用する。

SXTスクリューリムーバルツール

用途: アバットメントスクリュー頭部のドライバーホールにドライバーが嵌合しないケースでのアバットメントスクリューの除去
3.3mmDインプラント除去の際、ネック部のインターナルヘックスにドライバーが嵌合しないケースで使用
レンチにて反時計回しにスクリュー頭部のドライバーホールにねじ込んで使用する。
最大90Ncmまで。



オプション

未滅菌

商品コード	品名
040-25001	ヘーベル・メルトン アバットメントホルダー チタン

ヘーベル・メルトン アバットメントホルダー チタン

補綴用パーツのピックアップ、装着に使用します。

把持状態で固定され、落下を防止します。(チタン製)



販売名: Salvin ピンセット 一般的名称: ピンセット 分類: 一般医療機器 医療機器届出番号: 13B1X00053P00025

040-25001

テクニカ ツイストドリル ブラック (ストッパー付)

DLCコーティングにより耐摩耗性・耐久性・硬度・耐食性を

より高めたインプラント手術用ドリルです。

ストッパーにより予定深度以上の穿孔を防止します。

穿孔長さを設定できる可動式ストッパーと専用レンチが付属しています。


※外部注水式：十分に生理食塩水をかけドリルを冷却しながらご使用ください。



ショートドリル(ストッパー付)

可動式ストッパー、専用レンチ付属 未滅菌

商品コード	品名	直径	刃部長さ(L1)	全長(L2)
310-22200	テクニカ ツイストドリル ブラック2.0S	2.0mmD	11.5mm	33mm
310-22280	テクニカ ツイストドリル ブラック2.8S	2.8mmD	11.5mm	33mm
310-22320	テクニカ ツイストドリル ブラック3.2S	3.2mmD	11.5mm	33mm
310-22350	テクニカ ツイストドリル ブラック3.5S	3.5mmD	11.5mm	33mm
310-22380	テクニカ ツイストドリル ブラック3.8S	3.8mmD	11.5mm	33mm
310-22420	テクニカ ツイストドリル ブラック4.2S	4.2mmD	11.5mm	33mm

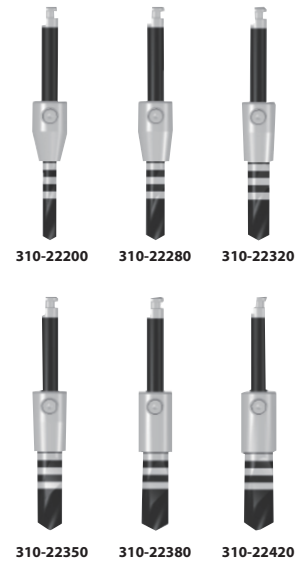

- ・マーキングライン:6-7-8-9-10-11mm
- ・ストッパー調節範囲:6~11mm

ツイストドリルブラック/ショート



ロングドリル(ストッパー付)

可動式ストッパー、専用レンチ付属 未滅菌

商品コード	品名	直径	刃部長さ(L1)	全長(L2)
310-22201	テクニカ ツイストドリル ブラック2.0L	2.0mmD	16.5mm	38mm
310-22281	テクニカ ツイストドリル ブラック2.8L	2.8mmD	16.5mm	38mm
310-22321	テクニカ ツイストドリル ブラック3.2L	3.2mmD	16.5mm	38mm
310-22351	テクニカ ツイストドリル ブラック3.5L	3.5mmD	16.5mm	38mm
310-22381	テクニカ ツイストドリル ブラック3.8L	3.8mmD	16.5mm	38mm



- ・マーキングライン:11-12-13-14-15-16mm
- ・ストッパー調節範囲:11~16mm

ツイストドリルブラック/ロング




テクニカ ツイストドリル ブラックの推奨滅菌条件: オートクレーブ 121℃ 20分間


ご注文の際は、「商品コード」もしくは「スウィッシュプラス用のブラックドリル」とご指定ください。

テクニカ ツイストドリル ブラック ドリルチャート


- ・ドリルチャートのカラーコードはスウィッシュサージカルトレイ(右の外科トレイ)のカラーコードとリンクしています。
- ・本プロトコルでは、純正Ø2.3mmドリルの代わりにØ2.0mmドリルを使用します。
- ・「オプション」のステップは、抜歯即時埋入時のファイナルドリルです。
- ・推奨回転数を参考に、骨質に合わせてこの前後の回転数でご使用ください。
- ・推奨回転数: Ø2.0: 1,000rpm、その他: 1200rpm

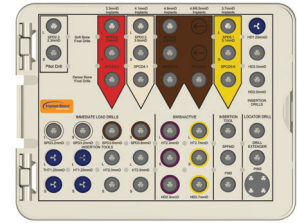


3.3
mmD

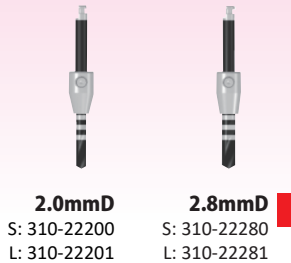


エステティックレベルファイナル

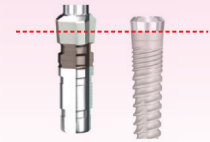

4.1
mmD

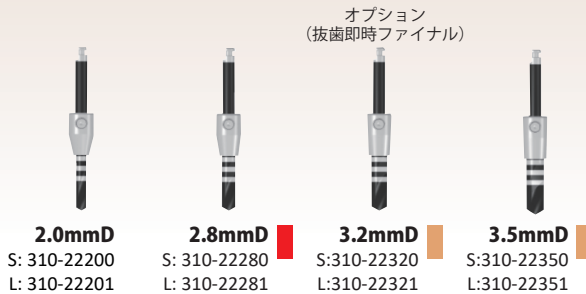


エステティックレベルファイナル

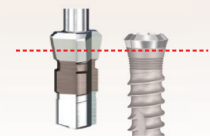

4.8
mmD



エステティックレベルファイナル

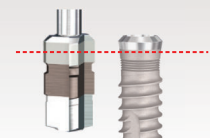


L: 003-SPD4.2※

※純正 L ドリルを使用する際は、
深度確認時、ドリルのラインにご注意ください。

重要

スウィッシュプラスの品名長さに対する実際の埋入深度

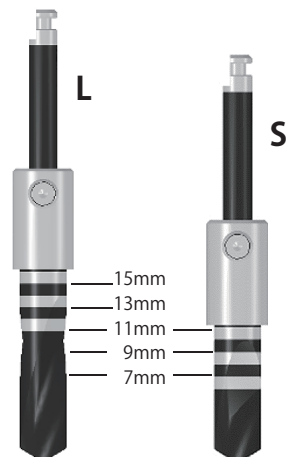

サージカルドリル

パイロットドリル

未滅菌

商品コード	直径	マーキング
003-SPD2.3	2.3mmD	6-16mm
003-SD2.3S	2.3/2.0mmD	6-13mm (ショートタイプ)



003-SPD2.3



003-SD2.3S

3.3mmDインプラント用

未滅菌

商品コード	直径	マーキング
003-SPD2.8	2.8mmD	6-16mm
003-SD2.8S	2.8/2.3mmD	6-13mm (ショートタイプ)
003-SPCD3.3	3.7/3.3mmD	硬骨質でのインプラント窩 およびカウンタースINK形成用



003-SPD2.8



003-SD2.8S



003-SPCD3.3

4.1mmDインプラント用

未滅菌

商品コード	直径	マーキング
003-SPD3.2	3.2mmD	6-16mm
003-SPD3.2S	3.2mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SPD3.5	3.5mmD	6-16mm
003-SPD3.5S	3.5mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SPCD4.1	4.8/4.1mmD	硬骨質でのインプラント窩 およびカウンタースINK形成用



003-SPD3.2



003-SPD3.2S



003-SPD3.5



003-SPD3.5S



003-SPCD4.1

4.8mmDインプラント用

未滅菌

商品コード	直径	マーキング
003-SPD3.8	3.8mmD	6-16mm
003-SPD3.8S	3.8mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SPD4.2	4.2mmD	6-16mm
003-SPD4.2S	4.2mmD	6-10mm (ショートタイプ)
003-SPCD4.8	4.8/4.8mmD	硬骨質でのインプラント窩 およびカウンタースINK形成用



003-SPD3.8



003-SPD3.8S



003-SPD4.2



003-SPD4.2S



003-SPCD4.8


ドリル掲載ページのカラーコードは、スイッチャーサージカルトレイ(写真の外科トレイ)のカラーコードとリンクしています。



Implant Direct社の専用ドリルやインスツルメントは、
未滅菌の状態でお届けいたします。
通法に従い滅菌の上、ご使用ください。



インプラント窩形成用ドリルは外部注水式です。
注水による十分な冷却を行い、穿孔してください。

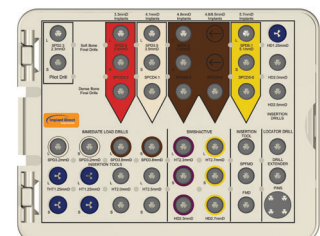

埋入手術手順



開封前に商品箱・ラベル表示にてサイズ等に相違ないか確認する。インプラントは2重バイアルに梱包されている。(内部は滅菌済)



外バイアルのインプラント情報が記載されたラベルを剥がし、カルテに貼付する。



外バイアルのキャップを反時計回しで開封する。




内バイアルを清潔域にスライドさせ落とす。


⚠ 内バイアルは側面の半分が開放されているため、インプラント体に触れないよう注意すること。




キャリアー/トランスファー頭部をスウィッシュフィクスチャーマウントツールCA(003-SPFMD)で把持し、内バイアルからインプラントを取り出す。

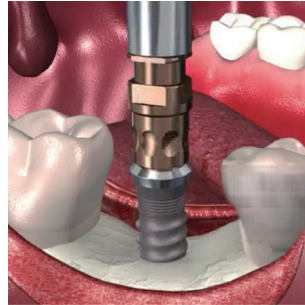


インプラント窩へキャリアーし、所定の位置まで埋入する。

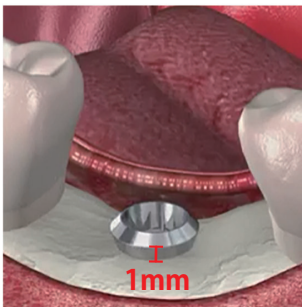

エスティックレベル埋入位置

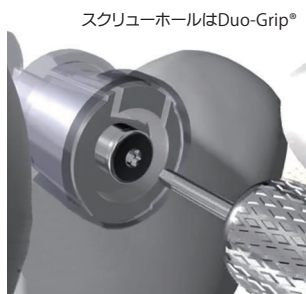

内バイアル底部に、2mmHのエクステンダーとカバースクリューが収納されている。1.25mmテーパードヘックスドライバーで取り外す。

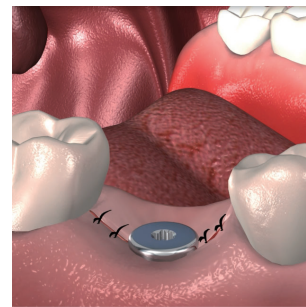

付属のカバースクリューを装着、もしくはカバースクリューと2mmHエクステンダーを合わせ装着、縫合する。(1回法)

角度付きアバットメントを使用する際の埋入のポイント

角度付きアバットメントのマーシンの低い面(唇側面)は、アバットメントのオクタゴン/ヘックス面の向きに設定されています。




インプラント埋入を終える際、それぞれのプラットフォームにおいて下記の目安を利用して、インプラント内部のオクタゴン/ヘックス面の位置を調整することで、角度付きアバットメントの向きを、隣在歯の唇側面を考慮した補綴的・審美的に望ましい向きに設定することができます(図1)。

プラットフォーム4.8mmD ^{RN Octa} インプラント埋入時


インプラント内部のオクタゴン面の向きは、キャリアー頭部オクタゴン、キャリアー体部のディンプル、および、SPSTインサージョンツール、オクタゴンアライメントツール軸上のオクタゴン面で確認できます(図2)。

プラットフォーム3.7mmD ^{Hex} インプラント埋入時

インプラント内部のヘックス面の向きは、キャリアー体部のディンプル、および、インサージョンツール/ドライバーのヘックス面で確認できます(図3)。

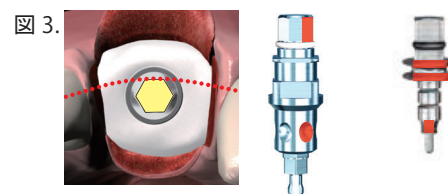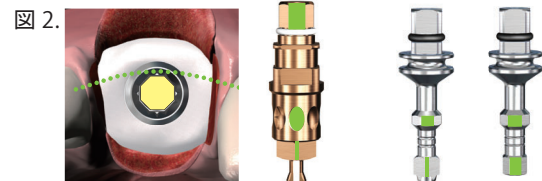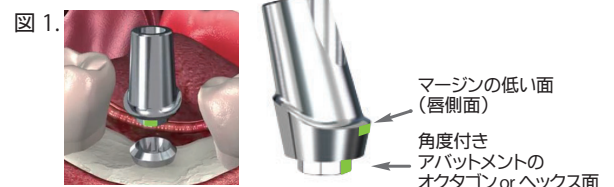

サージカルトレイコンテンツ

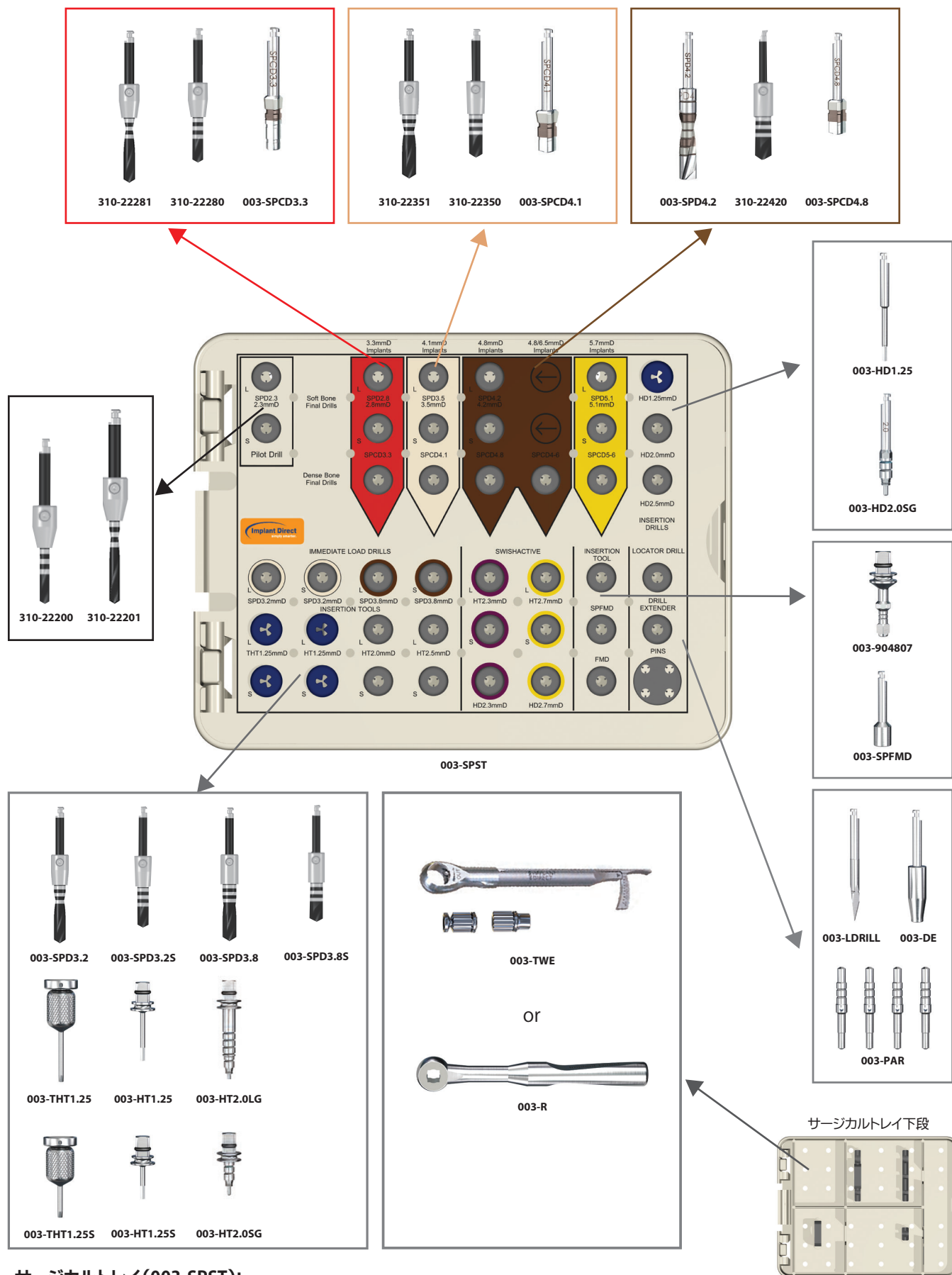

サージカルトレイ (003-SPST):

外科手術に使用するドリル、インサージョンツール、ドライバー等の専用インスツルメントを収納し、オートクレープ滅菌*が可能なオーガナイザーです。スタッフによる器具類の管理を簡便にします。ドリルは埋入するインプラントの直径にリンクし、カラーコード化しているため、手術時のサイズ認識に有効です。


推奨滅菌条件: 高圧蒸気滅菌 132℃ 15分間
推奨滅菌条件 (テクニカツイストドリル ブラック): オートクレープ 121℃ 20分間

サージカルドリル ツール 一覧

商品コード	商品名
310-22200	ツイストドリルブラック2.0S
310-22201	ツイストドリルブラック2.0L
310-22280	ツイストドリルブラック2.8S
310-22281	ツイストドリルブラック2.8L
310-22320	ツイストドリルブラック3.2S
310-22321	ツイストドリルブラック3.2L
310-22350	ツイストドリルブラック3.5S
310-22351	ツイストドリルブラック3.5L
310-22380	ツイストドリルブラック3.8S
310-22381	ツイストドリルブラック3.8L
310-22420	ツイストドリルブラック4.2S
003-SPD2.3	SWストレートドリル2.3L
003-SD2.3S	SWストレートドリル2.3S
003-SPD2.8	SWストレートドリル2.8L
003-SD2.8S	SWストレートドリル2.8S
003-SPD3.2	SWストレートドリル3.2L
003-SPD3.2S	SWストレートドリル3.2S
003-SPD3.5	SWストレートドリル3.5L
003-SPD3.5S	SWストレートドリル3.5S
003-SPD3.8	SWストレートドリル3.8L
003-SPD3.8S	SWストレートドリル3.8S
003-SPD4.2	SWストレートドリル4.2L
003-SPD4.2S	SWストレートドリル4.2S
003-SPCD3.3	スウィッシュカウンタースINKドリル3.7/3.3mm
003-SPCD4.1	スウィッシュカウンタースINKドリル4.8/4.1mm
003-SPCD4.8	スウィッシュカウンタースINKドリル4.8/4.8mm
003-THT1.25	1.25mmテーパードヘックスドライバー-L
003-THT1.25S	1.25mmテーパードヘックスドライバー-S
003-HT1.25	1.25mmヘックスドライバー-L
003-HT1.25S	1.25mmヘックスドライバー-S
003-HD1.25	1.25mmヘックスインツールCA
003-HT2.0LG	2.0mmヘックスインサクションドライバー-L
003-HT2.0SG	2.0mmヘックスインサクションドライバー-S
003-HD2.0SG	2.0mmヘックスインサクションドライバーCA
003-LDRILL	ロケータードリル2.3
003-DE	ドリルエクステンダー
003-PAR	パラレリングツール2.8/2.3
003-SPFMD	スウィッシュフィクスチャーマウントツールCA
003-904807	SP ST インサクションツール
003-TWE	トルクレンチ 10-90Ncm
003-R	ラチェットレンチ
003-SPST	スウィッシュ サージカルトレイ

チェアサイドでのアバットメントの形成手順


Duo-Grip®タイプのドライバーには1.25ヘックスドライバーとSCS Driverが使用可能

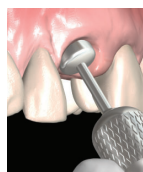


1.25ヘックスドライバーを用いて、ヒーリングカラーを除去する。



1.25ヘックスドライバーを用いて、アバットメントを装着する。

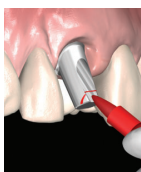

適切な形成を行うよう、削合部位をマーキングする。

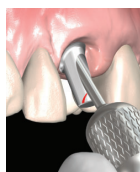


1.25ヘックスドライバーを用いて、アバットメントを除去する。




アナログにアバットメントを装着し、適切な支台歯形状に形成する。



トルクレンチを用い、30Ncmにて形成したアバットメントを装着する。

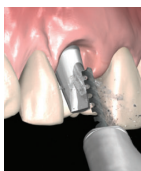


高速かつ十分な注水下にてマージンを調整する。

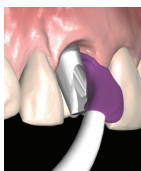

通法に従い、印象採得を行う。



形成したアバットメントにプロビジョナルをセメンティングする。

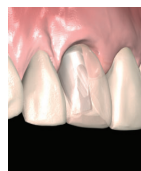

装着されたプロビジョナル。

印象採得手順

インダイレクト(クローズドトレイ)法



付属のキャリア/トランスファーも使用可能



トランスファー(クローズドトレイ用)




アナログ



トランスファー側方の切りかけ面を唇頬側に向け、インプラント内部のオクタゴン/ヘックスに確実に合うように装着する。頭部のホールを寒天印象材・ワックス等で封鎖し、印象材の侵入を防止する。(印象材の侵入は正確な印象採得の妨げとなる)



シリコン印象材(ライトボディ)をトランスファー周囲に塗布し覆う。

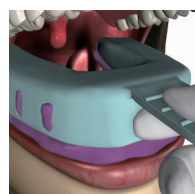


シリコン印象材(ヘビーボディ)で印象トレイを満たし、フルアーチの印象を採得する。印象採得後、トランスファーをインプラントから取り外し、採得した印象と合わせて技工所へ送る。




トランスファーをインプラントアナログと連結する。




トランスファー頭部を、印象内の切りかけ面に注意し、相当する位置・方向に差し込む。最終的な位置まで沈み込むよう確実に押し込む。

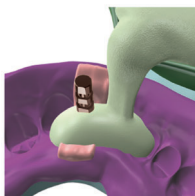

アナログ周囲に人工歯肉材を築盛し、石膏を注入する。

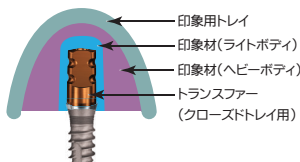


ダイレクト(オープントレイ)法

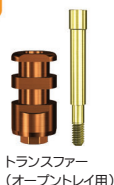

トランスファー(オープントレイ用)




アナログ

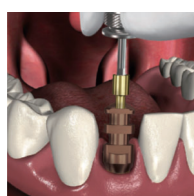


口腔内のインプラントにトランスファーを装着する。




シリコン印象材(ライトボディ)をトランスファー周囲に塗布し覆う。

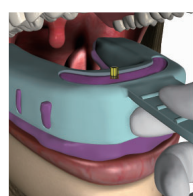


シリコン印象材(ヘビーボディ)で印象トレイを満たし、フルアーチの印象を採得する。トレイ天蓋を貫通したトランスファー頭部の余剰印象材を取り除く。硬化後、トレイの外側からスクリューを緩め、トレイとともにトランスファーを取り外し、技工所へ送る。

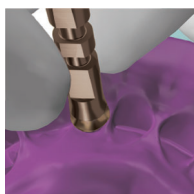

印象内のトランスファーにインプラントアナログを連結する。その際、アナログが回転しないようにピンセットで把持する。

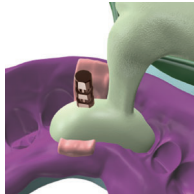


トランスファー周囲に人工歯肉材を築盛し、石膏を注入する。





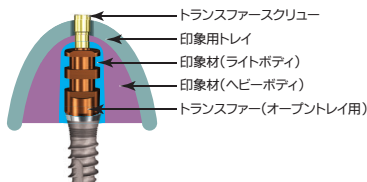


ダイレクト(オープントレイ)法では、トレイの外にスクリューが貫通するため、トレイの外側から着脱操作できる構造となる。

補綴コンポーネント サイズ詳細・カット限界の目安

カラー部直径サイズは
各頁の品目をご覧ください。

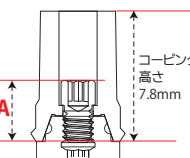アバットメント	商品コード	プラットフォーム	カラー部 高さ	参照図	カット限界 (A) インプラントとの接合部 ～スクリュー頭頂部まで	高さ (B) インプラントとの 接合部～頭頂まで	
カントウアー アバットメント ストレート	 002-853031	 002-853032	3.7mmD PS	1mm 舌側は +1.0mm	①	3.0mm 7.3mm	
	 002-853032	 002-904831	3.7mmD PS	2mm 舌側は +1.0mm	①	3.0mm 8.4mm	
	 002-904831	 002-904832	4.8mmD	0.5mm 舌側は +1.0mm	③	3.5mm 8.1mm	
	 002-904832	 002-904831P	4.8mmD	2mm 舌側は +1.0mm	③	3.5mm 9.6mm	
	 002-904831P		4.8mmD PS	0.75mm 舌側は +1.0mm	②	3.2mm 8.4mm	
カントウアー アバットメント 15° (角度付き)	 002-853051	 002-853052	3.7mmD PS	0.75mm 舌側は +1.0mm	①	3.0mm 7.7mm	
	 002-853052	 002-904851	3.7mmD PS	2mm 舌側は +1.0mm	①	3.0mm 8.9mm	
	 002-904851	 002-904852	4.8mmD	0.5mm 舌側は +1.0mm	③	3.5mm 7.4mm	
	 002-904852	 002-904851P	4.8mmD	2mm 舌側は +1.0mm	③	3.5mm 8.9mm	
	 002-904851P		4.8mmD PS	0.75mm 舌側は +1.0mm	②	3.2mm 7.7mm	
ストレート アバットメント	 002-853021	 002-853022	3.7mmD PS	1mm	①	3.0mm 6.5mm	
	 002-853022	 002-853023	3.7mmD PS	2mm	①	3.0mm 7.5mm	
	 002-853023	 002-903722	3.7mmD PS	3mm	①	3.0mm 8.5mm	
	 002-903722 販売終了	 002-904821N	3.7mmD	2mm	③	3.4mm 7.5mm	
	 002-904821N	 002-904822N	4.8mmD	0.5mm	③	3.5mm 6.1mm	
	 002-904822N	 002-904821	4.8mmD	2mm	③	3.5mm 7.5mm	
	 002-904821	 002-904822	4.8mmD	0.5mm	③	3.5mm 6.0mm	
	 002-904822	 002-904820	4.8mmD	2mm	③	3.5mm 7.5mm	
	 002-904820	 002-9048201	4.8mmD	—	④	2.8mm 5.0mm	
	 002-9048201		4.8mmD	—	⑤	3.3mm 5.0mm	
ゴールド アバットメント	 002-853041	 002-904841	3.7mmD PS	1mm	①	3.0mm 8.3mm	
	 002-904841		4.8mmD	0.8mm	③	3.5mm 8.0mm	
プラスチック テンポラリー アバットメント	 002-853047	 002-904847	3.7mmD PS	1mm	①	5.7mm 10.3mm	
	 002-904847		4.8mmD	1mm	③	5.9mm 10.3mm	
チタン テンポラリー アバットメント (NE)	 002-853049	 002-904849	3.7mmD PS	1mm	①	3.0mm 9.0mm	
	 002-904849		4.8mmD	1mm	③	3.5mm 9.0mm	
スクリュー固定式 アバットメント & コーピング	 002-903761 販売終了	 002-903762 販売終了  002-903763 販売終了  002-904861  002-904862 002-904863 002-904864 002-853062155 002-853063155 002-904864155 002-853063305 002-853064305 002-904864305	3.7 mmD	4.8 mmD	各カラー部高さ (1mm ~ 4.0mm)	3.8mm コーピング高さ 7.8mm + 各アバットメント のカラー部高さ	
	 002-903762 販売終了						
	 002-903763 販売終了						
	 002-904861						
	 002-904862						
	 002-904863						
	 002-904864						
	 002-853062155						
	 002-853063155						
	 002-904864155						
	 002-853063305						
	 002-853064305						
	 002-904864305						

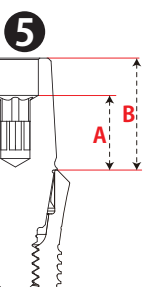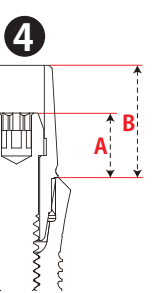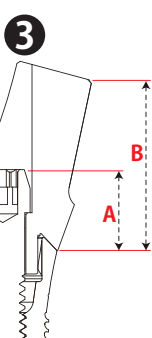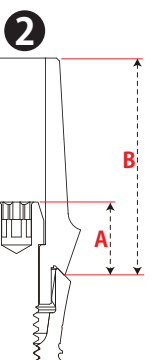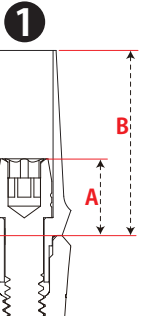

Implant Direct 製品専用FAX注文書

電話 番号	FAX 番号	注文書 記入日	ご使用 予定日
診療所名		ご芳名	
メールアドレス*			
〒	都 道	市 区	
ご住所	府 県	郡	

商品コード	商品名	注文数	金額
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			

備考 ※送付先が上記と異なる場合はご記入ください。

※メールアドレスをぜひご記入ください。弊社からのご連絡の他、弊社主催セミナーの優待情報・お得な商品情報等を配信いたします。

●商品の発送

ご注文いただきました商品は宅急便にて発送いたします。午後3時までのご注文は当日発送、午後3時以降のご注文につきましては翌日発送となります。また、ご注文品の在庫がない場合は、弊社より納期をご連絡いたします。あらかじめご了承ください。

●製品の交換について

製品の交換は、製品到着後6ヶ月以内とさせていただきます。(製品が未開封、パッケージに損傷の無い物、滅菌期限1年以上の物に限りです)

●製品の返品について

返品は、お買い上げ製品がご注文の品と異なる場合、または破損や汚損している場合に限り、お受けいたします。製品の返品は、製品到着後14日以内とさせていただきます。(製品が未開封、パッケージに損傷の無い物に限りです)

●配達料

送料は基本的に負担いたしますが、1回のご注文が10,000円未満(税別)の場合は送料をご負担いただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。

タイム便・超速便については別途料金が必要となります。

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。
表示価格は全て消費税別です。表示価格は全て希望小売価格となります。



インプラテックス
Implant Direct社製品保証プログラム

Implant Direct社製品を安心して
お使いいただけるよう、
「インプラテックスImplant Direct社製品
保証プログラム」をご提供しております。
詳細はお問い合わせください。

ご注文は
24時間受付

FAX: 03-5850-8505

(株式会社インプラテックス 東京本社)

●ご記載頂いた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。

製造販売元



株式会社 インプラテックス

いつも、とにりに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日を除く9:00~17:00にお願いいたします。



メール配信登録で
セミナーご優待!!

メールニュース配信登録は
QRコードから登録フォーム
にお入りください。➡



製造元



(米国)

SIMPLY SMARTER

