

touch
タッチ

white
ホワイト

注：図中の写真はピエゾサージェリータッチを使用しています。ピエゾホワイトも同様です。

組み立て説明書

1 バッグサポートロッドを取り付けます。



2 ハンドピースホルダーを取り付けます。
右図のように4通りの設置が可能です。



3 ポンプチューブをハンドピースに接続します。



4 ハンドピースを本体に接続します。



5 蠕動ポンプ内に、ポンプチューブを設置します。



6 ポンプチューブを
ディスチャージに接続します。



ピエゾサージェリータッチ／ピエゾホワイト 組み立て説明書

注：図中の写真はピエゾサージェリータッチを使用しています。ピエゾホワイトも同様です。


7 フットペダルを本体に接続します。



8 電源コードを本体に接続します。



9 ダイナモレンチを用いて、ハンドピースに
インサートチップを取り付けます。
カチッという音がするまでねじ込みます。
※必ず右図のようにハンドピースの上部
の樹脂部を把持して着脱してください。

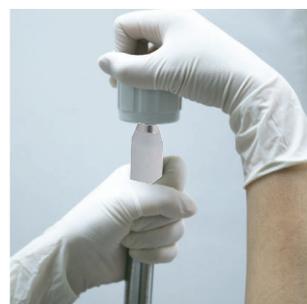

ハンドピース上部をしっかりと
把持することでハンドピースを
保護します。

10 本体の電源スイッチをONにします。



ご使用後

- ・「洗浄・滅菌マニュアル」に従い、
洗浄と滅菌を行ってください。
- ・使用後は必ずクリーニング機能を行ってください。
- ・インサートチップの消毒には、過酸化水素系消毒剤
を使用せず、中性の消毒剤を使用してください。
- ・滅菌の前に、インサートチップをエアを使用して
完全に乾燥させてください。



ピエゾサージェリータッチ



ピエゾホワイト

お問い合わせ先



本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp