

インプラテックスだけの特典

◎ 製品保証期間: 通常1年間のところ「2年間保証」に延長

商品コード 370-10000

品名 ITX シロプロ 3G

標準価格 675,000円

- セット内容
- ①コントロールユニット、ITXダイヤルノブ
  - ②マイクロモーター
  - ③モーターケーブル
  - ④ハンドピース
  - ⑤ブラケット
  - ⑥イリゲーションシステム(10個) ※内部注水使用時
  - ⑦フットペダル
  - ⑧フットペダル ガード
  - ⑨イリゲーションチューブ(10本) ※外部注水使用時
  - ⑩イリゲーションスタンド
  - ⑪チューブ取付けクリップ
  - ⑫電源ケーブル
  - ⑬プロテクションフィルム(2枚)



仕様

コントロールユニット

サイズ(幅×奥行×高さ)/重量	242 × 244 × 102mm / 2.8 Kg
プログラム	・コントラングル ギア比 ・回転速度及びトルク ・モーター正・逆回転設定 ・注水量(5段階)

メンテナンス用スプレー3種  
"Trio Pack" (別売)

マイクロモーター/ケーブル

サイズ(幅×奥行×高さ)/重量	φ23.2 × 83.8mm / 110 g
回転速度域	100-40,000rpm
ライト(ハンドピースとの組合せ)	12Klux以上

ハンドピース (CA 20:1 L KM マイクロシリーズ)

ギア比	20:1
回転速度域	5-2,000rpm (モーター使用時)
寸法/重量	85mm / 79 g
最大トルク	70Ncm
ヘッドの高さ	13.5mm

別売品

370-10009	イリゲーションチューブ シロプロL用(10本入) ※外部注水使用時	15,300 円
370-10006	イリゲーションチューブ CA20L KM用(Y分岐・10本入) ※内外部併用注水使用時	17,500 円
370-10010	イリゲーションシステム CA20:1L KM用(10個入) ※内部注水使用時	41,200 円
370-10012	チューブ用クリップ3Gモーターケーブル用(10個入)	2,900 円
370-10063	●スプレーネット 洗浄スプレー500ml	9,700 円
370-10064	●ルブリフルイド 潤滑スプレー500ml	9,700 円
370-10065	●アクアケア 注水チューブ洗浄スプレー500ml	9,000 円
370-10011	●●●TRIOPACK(メンテナンス用スプレー3種パック)	27,600 円
370-10014	プロテクションフィルム シロプロ3G用(10枚入)	7,700 円
370-10008	IMPLATEX シロプロ 3G ダイヤルノブ	9,800 円
370-10005	ハンドピース(20:1L KM マイクロシリーズ)	260,100 円
370-00001	ハンドピース(PMRM1122 ストレート1:1 外部注水)	126,480 円
370-00002	ハンドピース(PMAM1122 アングル 1:1 外部注水)	173,400 円

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。表示価格は全て消費税別です。表示価格は全て希望小売価格となります。

販売名:シロプロ3rd Generation(CA20:1L KM) 一般的名称:電動式骨手術器械 管理医療機器 認証番号:231AK8ZX00017000 販売名:シロプロ3rd Generation(MX-LED 3rd Gen マイクロモーター) 一般的名称:歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 認証番号:231AK8ZX00017000  
販売名:ハンドピース(20:1L KM マイクロシリーズ) 一般的名称:ストレート・キードアングルハンドピース 管理医療機器 認証番号:221AF8ZX00001000 販売名:イリゲーションチューブCA20L KM用(Y分岐仕様) 一般的名称:洗浄器キット 一般医療機器 届出番号:1382X00075000039

注文書

診療所名	ご芳名		
〒	都道府県	市区	
ご住所	府県	郡	
メールアドレス*			
商品コード	商品名	ITX シロプロ 3G	注文数
商品コード	商品名	イリゲーションチューブ シロプロL用(10本入) ※外部注水使用時	注文数
商品コード	商品名	TRIOPACK(メンテナンス用スプレー3種パック)	注文数
商品コード	商品名		注文数


ご注文は 24時間受付 FAX:03-5850-8505

※メールアドレスはPC用のアドレスをご記入ください。携帯電話のアドレスはご遠慮ください。●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。 www.itx.co.jp

発売元



〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル  
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

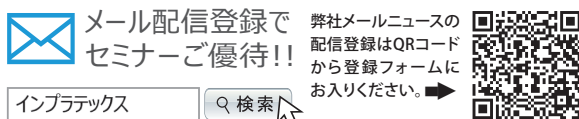

製造販売元/製造元 ビエン・エア・アジア株式会社  
〒171-0014東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング10F

お取扱店

※商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。202603\_04F

SWISS MADE の信頼性  
新型インプラントモーター

# IMPLATEX Chiropro 3G

シロプロ 3rd Generation

PURE SIMPLICITY



インプラント・外科用モーターの新しいスタイルを、  
インプラテックスは提案します。

インプラントの治療のご経験に関わらず、  
インプラント手術を速く、シンプルに、効率的に遂行できます。

ITX Chiropro 3G ならインプラントの正確で円滑な埋入操作を実現します。



# IMPLATEX

# IMPLATEX Chiropro 3G

シロプロ 3<sup>rd</sup> Generation

# PURE SIMPLICITY



IMPLATEX シロプロ 3Gは、インプラント手術に本当に必要な高品質な機能が、コンパクトに集約されています。

大型4.3インチカラーディスプレイとダイヤルノブにより、設定・操作はいたってシンプルで、インプラント手術成功のため術者は治療に専念できます。清掃・滅菌しやすいデザイン、簡単セットの注水チューブ、標準化されたメンテナンス手順はスタッフ負担も軽減します。



### 滅菌可能・直視的操作のダイヤルノブ

一つのダイヤルノブで、ほとんど全ての設定操作が簡単に行えます。設定変更はダイヤルノブの回転と確認プッシュで完了です。ダイヤルノブは簡単に着脱でき、滅菌可能で清潔を保てます。

SWISS MADE

### 新世代モーターテクノロジー

ITX シロプロ 3GのMX-iマイクロモーターとCA 20:1ハンドピースの組み合わせによる高い回転安定性とパワーは、全てのインプラント手術手順において正確で円滑な操作を提供します。

### Dualook™ライトシステム搭載 新世代コンパクトハンドピース

従来比30%短小・23%軽量化により重さとバランスが最適化され、操作性が向上し術者の手腕肩への負担を軽減します。光軸の異なる2光源が明瞭で広い視野を提供し快適操作を助けます。



### Accu-Chuck™ Soft Push™: バーロック、回転駆動メカニズム

バーロック、振動防止機能により回転数に関わらず最適な安定性と精度が保たれます。軽い力で素早く簡単に確実なバーの着脱が可能なSoft Push™ ボタンシステム搭載。耐久性の高いCA 20:1ハンドピースは独自のハンドピース内部注水経路を搭載しており、注水チューブに煩わされず正確な手術が行えます。

### IMPLATEX シロプロ3G その他の特徴

- ☑ コンパクト、シンプル設定・操作でコストパフォーマンスが高く、インプラント導入時、モーター買い替え、スペア機としても最適です。
- ☑ 新技術採用により操作性を向上しつつ、実績ある既存上位機種と部品を共用化することで、低価格化を実現しています。
- ☑ カセット式注水ポンプはワンタッチ装着可能で衛生面も確実です。準備スタッフの負担を軽減し、手術直前の「水が出ない」トラブルも回避できます。流量: 30-150ml/分 (5段階)
- ☑ フットペダル操作でモーター回転数・回転方向・注水の有無・ステップ変更が行えます。手術中でもオレンジボタンの長押しで5Ncmずつトルクを増加させることができ、スタック時も簡単に脱出することができます。

### 予め設定したプロトコルで、インプラント手術を円滑に実行

直視的な簡単操作で、治療時間を短縮します。プロトコルは骨状況の変化やインプラントシステムに合わせてカスタマイズ可能です。手術中に想定されるプロトコルを5ステップ登録できます。登録したステップは、すぐに呼び出せます。ステップごとに設定済みパラメータが明瞭に表示され、治療に専念できます。手術中、必要な場合、ダイヤルノブ操作で回転数とトルク値が変更できます※。

※ステップ【1】【2】では回転数、【3】【4】【5】ではトルク値の変更が可能です。

ステップ	出荷時初期設定			追加設定例	
	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】
回転数	2,000rpm	600rpm	20rpm	20rpm (逆転)	20rpm
トルク値	25.0Ncm	55.0Ncm	45.0Ncm	50.0Ncm	45.0Ncm
注水量	3/5	3/5	off	off	off
対象	皮質骨の穿孔	海綿骨の穿孔拡大	タップ・埋入	タップ逆転	埋入

### 煩雑なキャリブレーション操作は不要

高精度の電子制御システムにより、煩雑な“キャリブレーション”操作は過去のものとなりました。

### 4.3インチ大型カラーディスプレイ

簡潔で見やすいディスプレイ表示で、手術のための情報を確認できます。ハンドピースの回転数・トルク値・回転方向、注水量等を明瞭に表示します。



### 埋入操作後に確認可能

インプラント埋入中、トルク値はリアルタイムで表示され、モーター停止後は最大実行トルク値が表示されます。埋入操作中に変動するトルク値のチェックは不要です。埋入操作後、落ち着いて到達トルク値を確認できます。このトルク値は即時荷重の判断材料の一つとしてご利用いただけます。

### 正確なトルク値

搭載されている高精度の電子制御システムによりトルク出力は(+/-5%)の幅で制御され、表示トルク値は術中トルク値と長期に渡り正確に一致します。埋入操作中の骨抵抗に対し、自動トルク調整機能がスタックを回避します。

- ☑ コントロールユニットの前面パネルは、清掃しやすい高耐性ガラスを採用しています。
- ☑ モーターは防水プラグ不要でウォッシャーディスインフェクターでの熱水洗浄が可能です。
- ☑ 標準化されたハンドピースメンテナンス手順は、通常、最も故障頻度が多いハンドピーストラブルを防ぎます。
- ☑ ITX シロプロ 3Gは、通常1年間の製品保証期間が2年間適用となります。