

サイナスリフトの進化形 MANUAL PIEZO LIFT

Mectron社ピエゾサージェリー®に
サイナスリフト用インサートチップ
4種が新たに追加されました。

クリスタルサイナスリフトにおいて、シュナイダー膜を穿孔せずに
安全に上顎洞底へアプローチすることは、最も重要な課題です。
本製品は、オステオトームの利点と、ピエゾサージェリー®のシュナイダー
膜を含む軟組織を傷つけない特性を組み合わせることで、精密なサイナス
リフト手術が可能になります。エドガー・エル・チャール博士の支援により
開発された本インサートチップは、上顎洞底から骨を優しく除去すること
を可能にし、シュナイダー膜を損傷させずに骨リングを形成します。これ
によって、その後のオステオトームによる挙上をより安全に行えます。



セット

商品コード 140-18020

マニュアルピエゾリフトキット

標準価格: 96,000円

セット内容: インサートチップ4種
チップスタンド



new!



商品コード 140-15370

インサートチップ
PL0419

上顎洞底骨除去と膜剥離用
使用モード:
cancellous / cortical

商品コード 140-15740

インサートチップ
PL0527

上顎洞底骨除去と膜剥離用
使用モード:
cancellous / cortical

商品コード 140-15750

インサートチップ
PL0631

上顎洞底骨除去と膜剥離用
使用モード:
cancellous / cortical

商品コード 140-15760

インサートチップ
PL0719

骨リングの除去用
使用モード:
cancellous / cortical

単品

標準価格: 各28,000円

マーキングライン
各種共通
3-4-5-6-7-8mm




ピエゾサージェリーに
関する詳細はこちらへ
※臨床レポート、動画等を
各種閲覧いただけます。

※「→」は注水孔位置です。
※本紙に掲載のインサートチップは、
Mectron社のピエゾサージェリー®
専用です。他社類似品では使えません。

使用方法

ステップバイステップ


使用モード：
cancellous / cortical

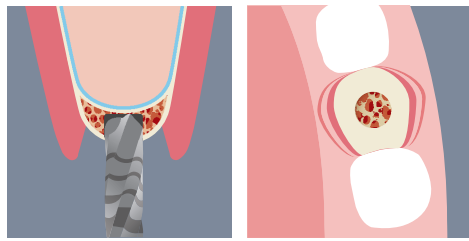

Step1. 上顎洞底へのアプローチ

インプラントシステムのドリルフローに従い、埋入インプラントのサイズに応じて埋入部位を形成し、シュナイダー膜の1mm下まで到達します。



硬骨質の場合：インサートチップIM3Pを使用して上顎洞の皮質骨をさらに削り、シュナイダー膜に接近し、その後Step2に進みます。

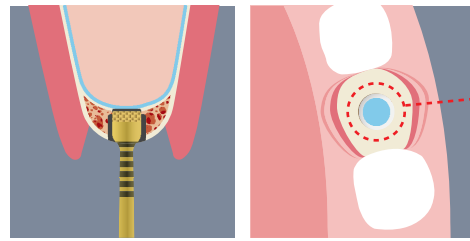

Step2. 骨リングの形成と膜の剥離

上顎洞底皮質骨の中央部を本インサートチップで形成し、シュナイダー膜に達するまで進めます。この時、上顎洞底皮質骨側壁に骨リングが形成されます。


インサートチップの選択は最終形成ドリル・埋入窩に合わせて使い分けます。

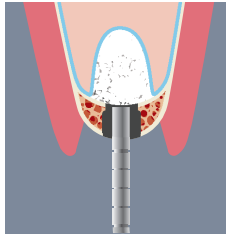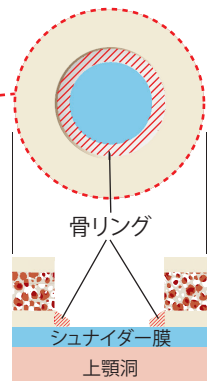

Step3. サイナスリフトと骨移植


骨補填材の填入とシュナイダー膜の剥離を、槌打式のオステオトームを使用して行います。

骨リングによりシュナイダー膜は低侵襲に挙上され、穿孔のリスクを低減します。

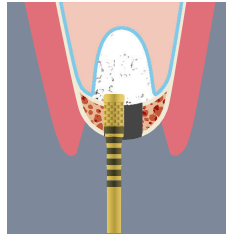

Step4. 骨リングの除去

インサートチップPL0719(直径1.9mm)を使用し、余剰な骨リングを除去します。

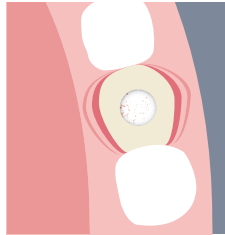

Step5. インプラントの埋入

各インプラントシステムの手順を用いて、インプラントを埋入します。

本品についてのお問い合わせ・デモのご依頼は、お気軽に弊社または担当営業までご連絡ください。

デモサービスは右記QRコードからも申込みいただけます。



販売名：ピエゾサージェリータッチ 一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器 認証番号：224ALBZX00012000

注文書

電話番号

FAX番号

注文書記入日

ご使用予定日

診療所名 都道府県 市区郡 ご芳名

ご住所 〒 都道府県 市区郡

E-mail

※楷書でご記入ください。-と、IとL、oと0など区別しにくい文字にはフリガナをお願いします。

商品コード	品名	標準価格	数量
140-18020	マニュアルピエゾリフトキット	96,000 円	
140-15730	インサートチップPL0419	28,000 円	
140-15740	インサートチップPL0527	28,000 円	
140-15750	インサートチップPL0631	28,000 円	
140-15760	インサートチップPL0719	28,000 円	

備考欄

ご注文は24時間受付 FAX: 03-5850-8505

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。表示価格は消費税別、希望小売価格となります。●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用いたします。弊社の個人情報方針の詳細は、弊社ホームページをご参照ください。www.itx.co.jp

製造販売元 / 発売元



いつも、となりに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-33-19 YDM 日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00~17:00にお願いいたします。

インプラテックス

検索



メール配信登録で 弊社メールニュースの配信登録は下記からお入りください。▼
セミナーご優待!!

製造元



お取扱店

商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。

202603_PDF