

骨干渉による上部構造パーツの不完全な装着を解消 ボーンプロファイルドリル

Bone Profile Drill

届出番号：13B2X00094000108


アバットメント(ヒーリングカラー)を装着する際に、骨が干渉し、パーツ類が正しく収まらない場合があります。

ボーンプロファイルドリルを使用することで、そのような骨干渉を除去・形成し、上部構造パーツの適正な装着が可能となります。



A：インプラントに装着します。
B：中心のホールにドリルガイドを通してドリリングし、干渉する骨を同心円状に除去します。

レガシー™インプラント対応

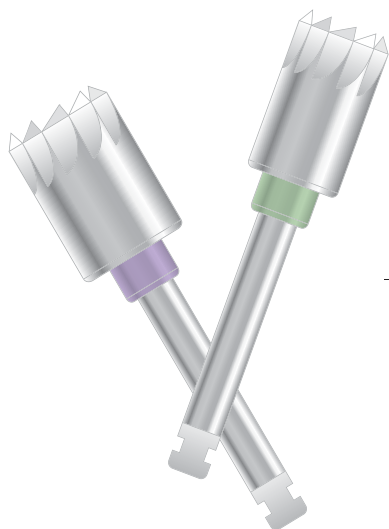

レガシーインプラント
3.5mmD プラットホーム



インプラント直径
3.7mmD 4.2mmD

レガシーインプラント 3.5mmD プラットホーム用 (インプラント直径3.7/4.2mmD)

商品コード	310-08001	ボーンプロファイルドリル 3.7S	15,000円 (税別)
商品コード	310-08002	ボーンプロファイルドリル 3.7L	15,000円 (税別)
商品コード	310-08005	ボーンプロファイルドリルガイド φ3.7	5,000円 (税別)

レガシーインプラント
4.5mmD プラットホーム




インプラント直径
4.7mmD 5.2mmD


レガシーインプラント 4.5mmD プラットホーム用 (インプラント直径4.7/5.2mmD)

商品コード	310-08003	ボーンプロファイルドリル 4.7S	15,000円 (税別)
商品コード	310-08004	ボーンプロファイルドリル 4.7L	15,000円 (税別)
商品コード	310-08006	ボーンプロファイルドリルガイド φ4.7	5,000円 (税別)


適用・使用方法

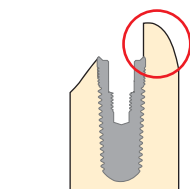

骨の斜面にインプラントを埋入したケース。

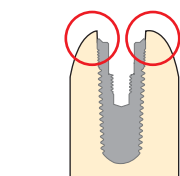


骨縁下に埋入したケース。

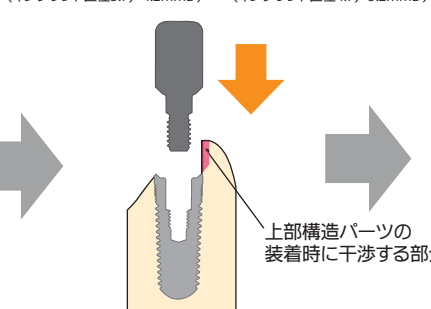


ボーンプロファイルドリルガイドをインプラントに1.25mmヘックスドライバーで装着する。

注：1次手術に使用する場合はインプラントの十分な初期固定を確認ください。

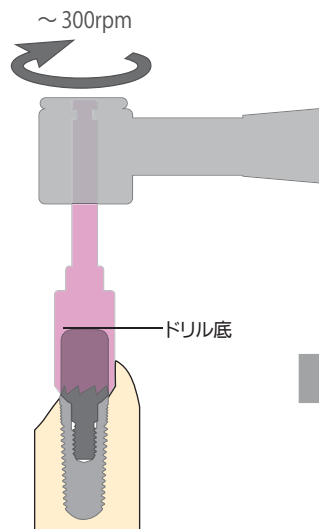

ドリルガイドにボーンプロファイルドリルが被さるようにして、インプラント上方の骨を形成する。ドリルガイドがドリル底に当たる深さまでドリリングする。

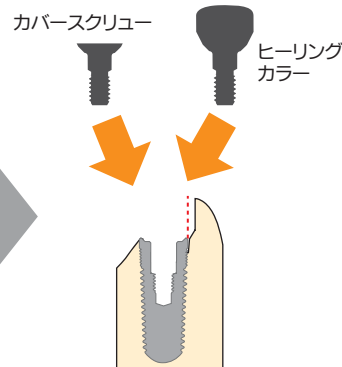


1次手術に使用する場合は、形成後、カバースクリューを装着する(2次手術でのヒーリングカラー装着時の骨干渉を防ぐための事前処理)。2次手術に使用する場合は、ヒーリングカラーを装着する。

レガシーインプラント 3.5mmDプラットホーム用



対応インプラント直径
3.7mmD
4.2mmD

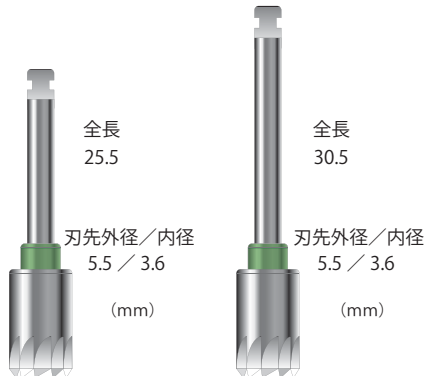

商品コード
310-08001

ボーンプロファイルドリル 3.7S

商品コード
310-08002

ボーンプロファイルドリル 3.7L




商品コード
310-08005

ボーンプロファイル
ドリルガイド φ3.7

レガシーインプラント 4.5mmDプラットホーム用



対応インプラント直径
4.7mmD
5.2mmD

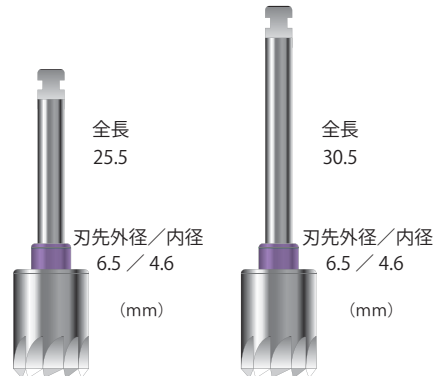

商品コード
310-08003

ボーンプロファイルドリル 4.7S

商品コード
310-08004

ボーンプロファイルドリル 4.7L



商品コード
310-08006

ボーンプロファイル
ドリルガイド φ4.7

注文書

電話
番号

FAX
番号

注文書
記入日

ご使用
予定日

※FAXをお持ちの場合は必ずご記入ください。

診療所名

ご芳名

ご住所 〒 -

都 道
府 県

市 区
郡

商品コード	商品名	レガシーインプラント 対応プラットホーム	対応インプラント直径	標準価格	注文数
310-08001	ボーンプロファイルドリル 3.7S	3.5mmD	3.7mmD・4.2mmD	15,000円（税別）	
310-08002	ボーンプロファイルドリル 3.7L	3.5mmD	3.7mmD・4.2mmD	15,000円（税別）	
310-08005	ボーンプロファイルドリルガイド φ3.7	3.5mmD	3.7mmD・4.2mmD	5,000円（税別）	
310-08003	ボーンプロファイルドリル 4.7S	4.5mmD	4.7mmD・5.2mmD	15,000円（税別）	
310-08004	ボーンプロファイルドリル 4.7L	4.5mmD	4.7mmD・5.2mmD	15,000円（税別）	
310-08006	ボーンプロファイルドリルガイド φ4.7	4.5mmD	4.7mmD・5.2mmD	5,000円（税別）	

ご注文は
24時間受付

FAX: 03-5850-8505

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。また、表示価格は希望小売価格となります。
●ご記載頂いた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用いたします。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。

製造販売元



〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00~17:00にお願いいたします。

● 歯科器具・インプラント材料・セミナー

インプラテックス

検索

Facebook
はじめました。



製造元



お取扱店