

エバダイン® フラス+IP 5g

Evadyne® Plus +IP

光重合型仮封材「エバダイン プラス+IP」は従来の仮封用途に加え、インプラントのアバットメントホールやアクセスホールの封鎖にお使いいただけます。

においがなく診療環境にやさしい製材と、シリンジから直接充填可能な機動力で幅広くご利用いただけます。

10秒*で硬化する半透明のペーストは硬化深度が深く、シンプルな作業性を実現します。

においが
ない

身体に
やさしい


使い方が
やさしい

診療環境に
やさしい


特徴

- インプラント治療におけるアバットメントホール及びアクセスホールの封鎖が可能
- 作業効率の高い10秒*硬化(LED)を実現
- 無味、無臭
- ワンペーストタイプ光重合型
- 高い硬化深度(9mm)
- 一塊除去が可能


アバットメントホールへの使用方法

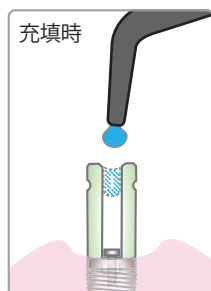


アバットメントホールの容積と充填量をイメージし、ホール手前でペーストを少量押し出す。ホール開口部から3~4mm程度にとどめるよう量に注意する。

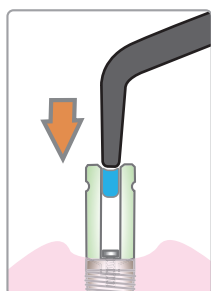


前の手順で押し出した、ペーストをアバットメントホールに充填する。
※過剰充填を避けるため、この際プランジャーは押さない。

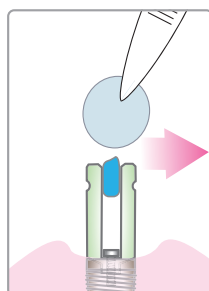

余剰部分を綿球等で横に拭うように除去する。

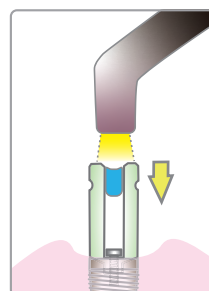

光照射により硬化させる。この際未照射部分が生じないように方向に注意する。

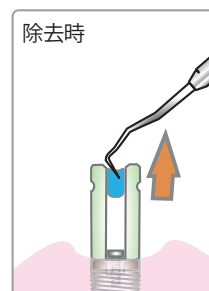

先端の屈曲した探針等(余剰セメント除去器具等:裏面)を用い、アバットメントホールからゆっくりと引き抜く。

※一般的な探針では引っかかりが弱く除去困難な場合もあるので、先端部が屈曲したある程度強度のある器具が望ましい。



シリンジ先端をホールに押し当ててプランジャーを押すと過剰に(深部まで)充填されてしまい、硬化不良や除去困難となるケースがあります。

*照射時間について	
500mW/cm ² 以上	20 秒
1,000mW/cm ² 以上	10 秒
2,000mW/cm ² 以上	5 秒



アクセスホールへの使用イメージ

**10秒
硬化!**

商品コード 530-01211

品名	エバダイン プラス+IP 5g
包装	5gシリンジ入1本、先端チップ15本/1箱
標準価格	3,000 円

天然歯の仮封材としても使用できます

天然歯の基本操作フロー

シリンジから窩洞に流し込む
※窩洞は十分洗浄乾燥してください

濡らした綿球で表面を形成
※余剰部分はこの際に拭き取る

光照射 10 秒 (*)

(*)詳しくは右表、添付文書をご参照ください。

アパットメントホールへの使用方法是もて面をご覧ください。



エバダイン プラス
添付文書

※照射時間について

500mW/ cm² 以上 20 秒

1,000mW/ cm² 以上 10 秒

2,000mW/ cm² 以上 5 秒



商品コード 530-01211

品名 エバダイン プラス+IP 5g

包装 5gシリンジ入1本、先端チップ15本/1箱

標準価格 3,000 円

成分: ポリエステルウレタンジメタクリレート、ウレタンジメタクリレート、アイオノマーガラス、カンファークイノン、その他

交換用先端チップ

商品コード 530-01212

品名 ネオ ブラックチップ(L)15本×2

包装 30本入 (15本×2セット)

仕様 チップ先端外径: 2.5 ± 0.2mm

標準価格 2,000 円 材質: ポリプロピレン



エバダイン プラスの除去時に

商品コード 300-13206

品名 余剰セメント除去器 #2(臼歯用)

標準価格 4,840 円 材質: ステンレス鋼



注文書

電話
番号

FAX
番号

注文書
記入日

ご使用
予定日

診療所名

ご芳名

〒

ご住所

都 道
府 県

市 区
郡

E-mail

商品コード 530-01211

商品名 エバダイン プラス +IP 5g

標準価格 3,000円

注文数

商品コード 530-01212

商品名 ネオ ブラックチップ(L) 15本×2

標準価格 2,000円

注文数

商品コード 300-13206

商品名 余剰セメント除去器 #2 (臼歯用)

標準価格 4,840円

注文数

備考

ご注文は
24時間受付

FAX: 03-5850-8505

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。また、表示価格は全て消費税別、希望小売価格となります。●ご記入いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用いたします。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。www.itx.co.jp

発売元



株式会社 インプラテックス

いつも、とにりに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日を除く9:00~17:00にお願いいたします。



メール配信登録で
セミナーご優待!!

メールニュース配信登録は
QRコードから登録フォーム
にお入りください。➡



製造販売元



ネオ製薬工業株式会社

株式会社YDM

お取扱店

商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。

2304_10K