

インプラントポジショニングゲージ

インプラントの診査診断に3D画像データの応用が広がっていますが、本品を口腔内での埋入位置の確認等、診断や手術時の補助的ツールとして使用すれば、より治療の精度と安全性を高めます。(臼歯部等で少数埋入の場合、単独でのガイドツールとして使用可能です)


インプラント窩形成時、適正な間隔でドリリングをガイド

先端中央に形成されたφ2.3mmの穴でドリルをガイドします。先端のC字形は、歯槽骨形状を確認しながらの計測・穿孔を可能にします。



術前診断において、インプラントの埋入位置とサイズ、本数を計測

C字型の外径は、埋入インプラント外周から1.5mmに設定されており、天然歯や隣在歯との必要な距離確保の目安となります。また、刻印されたスケアーによりインプラント間の距離を任意に設定することも可能です。

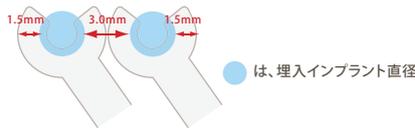

各種サイズ(直径)のインプラントの混在にも対応

φ3.7mm、φ4.2(4.1)mm、φ4.7(4.8)mmのインプラントで、さらに直径が混在した場合にも対応します。

4mmスクエアの把持機能を有し、フィクスチャーマウントの除去にも有効

頭部が4mmスクエアのフィクスチャーマウントを把持する機能を有し、マウントスクリューを緩める際の、インプラントの回転を抑えます。

フィクスチャーマウント把持用穴



●仕様

材質:ステンレス

先端構成: φ3.7mm用×2、φ4.2mm用×2、φ4.7mm用×2
(症例に応じて分解し、枚数を減らして使用することが可能)

●使用方法(ドリルガイドとして)

- ① 手術中に任意に固定して使用する。
- ② 事前に診断用模型上でインプラントの埋入位置を計画し、本品に設定した後、滅菌して手術に使用する。

届出番号:11B1X1000658D123

注文書

電話 番号	FAX 番号 <small>※FAXをお持ちの場合は必ずご記入ください。</small>	注文書 記入日	ご使用 予定日
診療所名	ご芳名		
〒	都 道	市 区	
ご住所	府 県	郡	
メールアドレス*	@	ご記載いただいたメールアドレスには弊社より製品情報などを配信いたします。ご不要の際は□に✓をお入れください。	
商品コード	商品名	注文数	
300-36274	インプラントポジショニングゲージ		

ご注文は
24時間受付

FAX:03-5850-8505

※メールアドレスはPC用のアドレスをご記入ください。携帯電話のアドレスはご遠慮ください。●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。http://itx.co.jp

発売元



〒116-0013東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00~17:00にお願いいたします。

製造販売元



お取扱店