

シラトリキュレット

SHIRATORI Curette

白鳥 清人先生考案・監修により開発した外科用キュレットです。
先端がハンドル中心軸の延長線上に位置しており、先端に力をかけやすく、
今までにない高い操作性を実現し、不良肉芽の搔爬が容易になります。
太目のハンドル径や各部と全長のバランスを追求したキュレットです。

開発協力





白鳥 清人 先生

白鳥歯科インプラントセンター院長
東京歯科大学卒業
日本口腔インプラント学会専門医
日本歯周病学会会員、日本顎咬合学会会員
昭和大学顎口腔疾患制御外科学兼任講師
九州大学大学院口腔機能修復学講座非常勤講師
デンタルコンセプト 21 理事、OJ 常任理事
EAO/AO/IPA アクティブメンバー

狭小部位や臼歯部にも対応。

先端刃部を**ハンドル中心軸**の延長線上に配置。

臼歯部深部でも繊細な操作が可能。

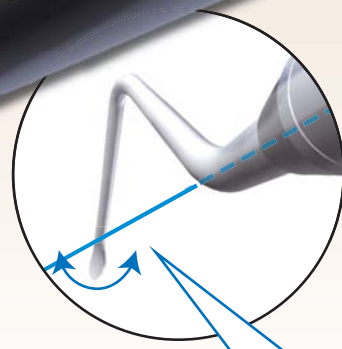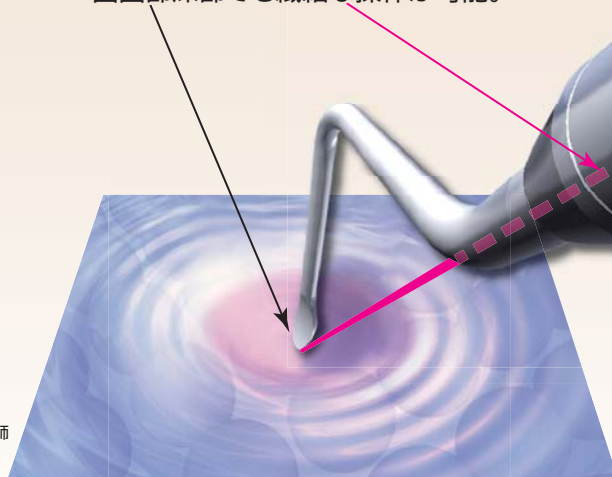

一般的なキュレットはハンドル中心軸の延長線上に先端刃部がなく、力をかけると回転方向に力が逃げてしまう。

先端刃部は 2mm と 3mm の 2 タイプをご用意

商品写真は実物大



刃部最大径
2mm

刃部最大径
2mm

商品コード 307-36511

シラトリキュレット 2.0/2.0mm

標準価格：10,000円（税別）



刃部最大径
3mm

刃部最大径
3mm

商品コード 307-36512

シラトリキュレット 3.0/3.0mm

標準価格：10,000円（税別）


考案から開発まで、白鳥先生の抜歯窩処置のこだわりが詰まった逸品です!

※仕様につきましては裏面をご参照ください。
届出番号:13B1X00053Y00009

インプラント治療に先立って行われる抜歯の手技は、その後のインプラント治療の難易度、成功率、審美性に大きく関係します。抜歯時の不良肉芽の残存は、良好な骨組織と軟組織の治癒の妨げとなります。そこで不良肉芽を残さず、さらに軟組織を傷つせずに抜歯処置をおこなうことが重要です。シラトリキュレットは一般的な鋭匙と異なり、先端がハンドル軸の延長線上に位置しており、さらにφ9.5mmと太めのハンドル径や各部と全長のバランスが良好で、骨面を感じやすく、先端の背面で押して肉芽を剥離する際、十分かつ、繊細な力を先端にかけられる操作性の高い外科用キュレットとなっています。

[シラトリキュレットを使用した抜歯時の不良肉芽の除去方法]

引用元：白鳥先生臨床レポート

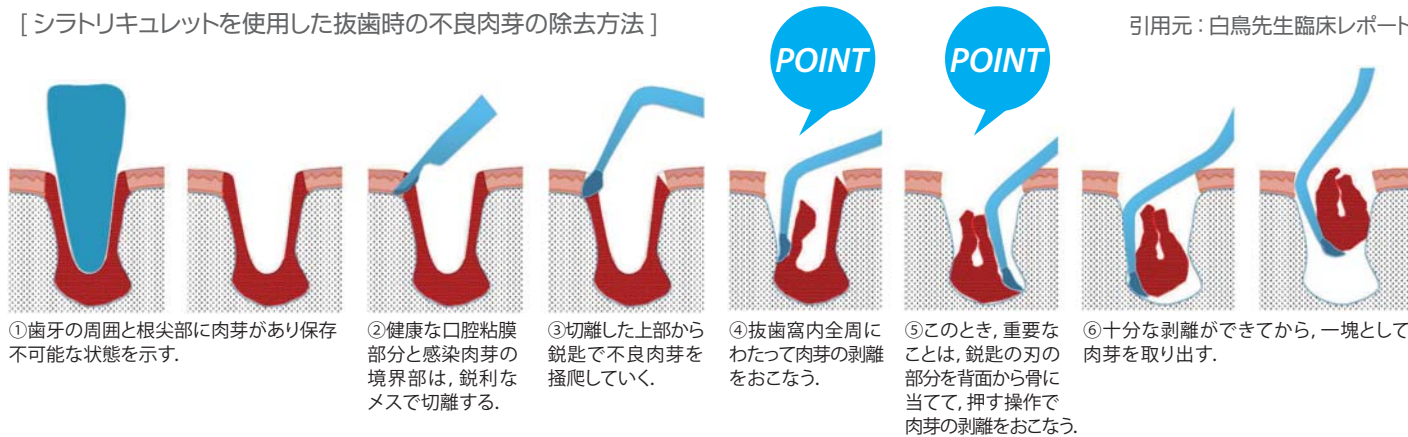

●開発のポイント


- ①先端刃部をハンドル中心軸延長線上へ設定
- ②力を入れやすい太めのハンドル径(φ9.5mm)
- ③臼歯や深い抜歯窩にも対応するシャンク長
- ④バランスの良い全長

●仕様

サイズ:右図参照

材質:ステンレス

滅菌:使用前に滅菌のうえご使用ください

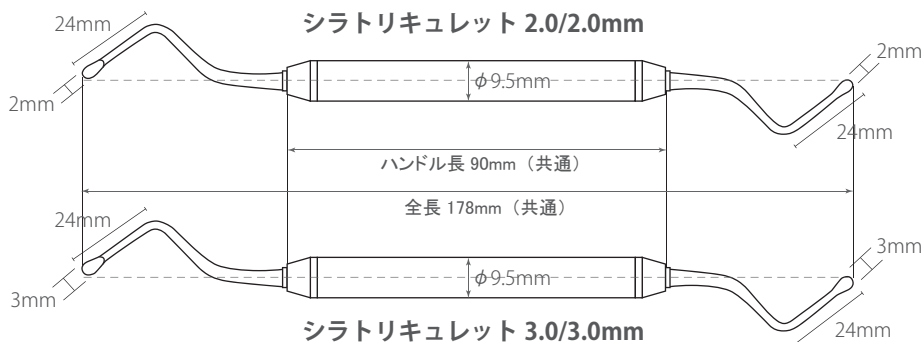

注文書

電話
番号

FAX
番号

※FAXをお持ちの場合は必ずご記入ください。

注文書
記入日

ご使用
予定日

貴院名

ご芳名

〒

都 道

市 区

府 県

郡

商品コード

307-36511

商品名

シラトリキュレット 2.0/2.0mm

標準価格:10,000円(税別)

注文数

商品コード

307-36512

商品名

シラトリキュレット 3.0/3.0mm

標準価格:10,000円(税別)

注文数

ご注文は
24時間受付

FAX:03-5850-8505

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。また、表示価格は希望小売価格となります。
●ご記載頂いた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用いたします。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。

製造販売元/発売元



株式会社 インプラテックス

いつも、となりに

〒116-0013東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00~17:00にお願いいたします。

- 歯科器具
- インプラント材料
- セミナー

Facebook
はじめました。



インプラテックス

検索

お取扱店

商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。

201704itx15k