


注意

本器には必ずメクトロン社製の純正のインサートチップを使用して下さい。他社製品を使用するとハンドピース先端のネジ山が変形し、インサートチップが正しく固定できなくなるおそれがあります。

○

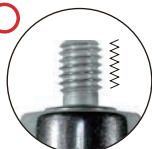

メクトロン社製の純正インサートチップを使用している正常ネジ山。

×



純正品ではないインサートチップを使用し変形したネジ山。インサートチップの固定ができなくなります。



インサートチップ ファンクション

インプラント窩形成

IM1S	special*
IM1 AL	implant
IM1 SP	implant
IM2A	implant
IM2A-15	implant
IM2P	implant
IM2P-15	implant
IM2.8A	implant
IM2.8P	implant
IM3A	implant
IM3A -15	implant
IM3P	implant
IM3P-15	implant
IM3.4A	implant
IM3.4P	implant
IM4A	implant
IM4P	implant
P2-3	implant
P3-4	implant

骨切り・骨切除術

OT1	cancellous / cortical
OT1A	cancellous / cortical
OT2	cancellous / cortical
OT3 (販売終了)	cancellous / cortical
OT4	cancellous / cortical
OT5	cancellous / cortical
OT5A	cancellous / cortical
OT5B	cancellous / cortical
OT6	cancellous / cortical
OT7	cancellous / cortical
OT7A	cancellous / cortical
OT7S-3	special*
OT7S-4	special*
OT7-20	cancellous / cortical
OT8L	cancellous / cortical
OT8R	cancellous / cortical
OT9	cancellous / cortical
OT11	cancellous / cortical
OT12	cancellous / cortical
OT12S	special*
OT13	cancellous / cortical
OT14	cancellous / cortical
SLO-H	cancellous / cortical
PL1	cancellous / cortical
PL2	cancellous / cortical
PL3	cancellous / cortical
PL0419	cancellous / cortical
PL0527	cancellous / cortical
PL0631	cancellous / cortical
PL0719	cancellous / cortical

骨形成術

OP1	cancellous / cortical
OP2	cancellous / cortical
OP3	cancellous / cortical
OP3A	cancellous / cortical

インサートチップ ファンクション

骨形成術

OP4	cancellous / cortical
OP5	perio
OP5A	perio / special
OP6	perio
OP7	cancellous / cortical
OP8	perio / special
OP9	cancellous / cortical
SLC	cancellous / cortical

粘膜剥離

EL1	endo*
EL2	endo*
EL3	endo*
SLS	special*
SLE1	special*
SLE2	special*

骨膜剥離

PR1	cancellous / cortical
PR2	cancellous / cortical

エンド逆根管形成

EN1	endo*
EN2	endo*
EN3	endo*
EN4	endo*
EN5R	endo*
EN5L	endo*
EN6R	endo*
EN6L	endo*

抜歯

EX1	cancellous / cortical
EX2	cancellous / cortical
EX3	cancellous / cortical
EXL3	cortical

インプラント除去

EXP3-R	special / cancellous / cortical
EXP3-L	special / cancellous / cortical
EXP4-R	special / cancellous / cortical
EXP4-L	special / cancellous / cortical

歯周治療/ペリオ

PP1	perio
PS1	perio
PS2	perio
PS6	perio
PP10	perio
PP11	perio
PP12	perio

インプラントメンテナンス

ICP + IC1	endo / perio
-----------	--------------

支台歯形成(クラウンプレップ)

DB2	perio / special
-----	-----------------

注意

本器には必ずメクトロン社製の純正のインサートチップを使用して下さい。他社製品を使用するとハンドピース先端のネジ山が変形し、インサートチップが正しく固定できなくなるおそれがあります。



メクトロン社製の純正インサートチップを使用している正常ネジ山。



純正品ではないインサートチップを使用し変形したネジ山。インサートチップの固定ができなくなります。



インサートチップ モード パワー**

インプラント高形成

IM1S	BONE	SPECIAL*
IM1 AL	BONE	3 / 2 / 1
IM1 SP	BONE	3 / 2 / 1
IM2A	BONE	3 / 2 / 1
IM2A-15	BONE	3 / 2 / 1
IM2P	BONE	3 / 2 / 1
IM2P-15	BONE	3 / 2 / 1
IM2.8A	BONE	3 / 2 / 1
IM2.8P	BONE	3 / 2 / 1
IM3A	BONE	3 / 2 / 1
IM3A -15	BONE	3 / 2 / 1
IM3P	BONE	3 / 2 / 1
IM3P-15	BONE	3 / 2 / 1
IM3.4A	BONE	3 / 2 / 1
IM3.4P	BONE	3 / 2 / 1
IM4A	BONE	3 / 2 / 1
IM4P	BONE	3 / 2 / 1
P2-3	BONE	3 / 2 / 1
P3-4	BONE	3 / 2 / 1

骨切り・骨切除術

OT1	BONE	3 / 2 / 1
OT1A	BONE	3 / 2 / 1
OT2	BONE	3 / 2 / 1
OT3 (販売終了)	BONE	3 / 2 / 1
OT4	BONE	3 / 2 / 1
OT5	BONE	3 / 2 / 1
OT5A	BONE	3 / 2 / 1
OT5B	BONE	3 / 2 / 1
OT6	BONE	3 / 2 / 1
OT7	BONE	3 / 2 / 1
OT7A	BONE	3 / 2 / 1
OT7S-3	BONE	SPECIAL*
OT7S-4	BONE	SPECIAL*
OT7-20	BONE	3 / 2 / 1
OT8L	BONE	3 / 2 / 1
OT8R	BONE	3 / 2 / 1
OT9	BONE	3 / 2 / 1
OT11	BONE	3 / 2 / 1
OT12	BONE	3 / 2 / 1
OT12S	BONE	SPECIAL*
OT13	BONE	3 / 2 / 1
OT14	BONE	3 / 2 / 1
SLO-H	BONE	3 / 2 / 1
PL1	BONE	3 / 2 / 1
PL2	BONE	3 / 2 / 1
PL3	BONE	3 / 2 / 1
PL0419	BONE	3 / 2 / 1
PL0527	BONE	3 / 2 / 1
PL0631	BONE	3 / 2 / 1
PL0719	BONE	3 / 2 / 1

骨形成術

OP1	BONE	3 / 2 / 1
OP2	BONE	3 / 2 / 1
OP3	BONE	3 / 2 / 1
OP3A	BONE	3 / 2 / 1
OP4	BONE	3 / 2 / 1

インサートチップ モード パワー**

骨形成術

OP5	ROOT	PERIO
OP5A	ROOT	PERIO
	BONE	SPECIAL
OP6	ROOT	PERIO
OP7	BONE	3 / 2 / 1
OP9	BONE	3 / 2 / 1
SLC	BONE	3 / 2 / 1

粘膜剥離

EL1	ROOT	ENDO*
EL2	ROOT	ENDO*
EL3	ROOT	ENDO*
SLS	BONE	SPECIAL1
SLE1	BONE	SPECIAL1
SLE2	BONE	SPECIAL1

骨膜剥離

PR1	BONE	3 / 2 / 1
PR2	BONE	3 / 2 / 1

エンド逆根管形成

EN1	ROOT	ENDO*
EN2	ROOT	ENDO*
EN3	ROOT	ENDO*
EN4	ROOT	ENDO*
EN5R	ROOT	ENDO*
EN5L	ROOT	ENDO*
EN6R	ROOT	ENDO*
EN6L	ROOT	ENDO*

抜歯

EX1	BONE	3 / 2 / 1
EX2	BONE	3 / 2 / 1
EX3	BONE	3 / 2 / 1
EXL3	BONE	1

インプラント除去

EXP3-R	BONE	SPECIAL / 3 / 2 / 1
EXP3-L	BONE	SPECIAL / 3 / 2 / 1
EXP4-R	BONE	SPECIAL / 3 / 2 / 1
EXP4-L	BONE	SPECIAL / 3 / 2 / 1

歯周治療/ペリオ

PP1	ROOT	PERIO
PS1	ROOT	PERIO
PS2	ROOT	PERIO
PS6	ROOT	PERIO
PP10	ROOT	PERIO
PP11	ROOT	PERIO
PP12	ROOT	PERIO

インプラントメンテナンス

ICP + IC1	ROOT	ENDO / PERIO
-----------	------	--------------

支台歯形成(クラウンプレップ)

DB2	ROOT	PERIO
	BONE	SPECIAL

* 許容設定モード

** パワー: 1 = max 2 = med 3 = min