
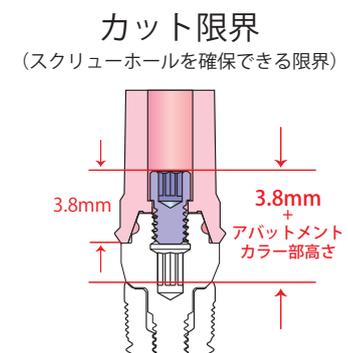
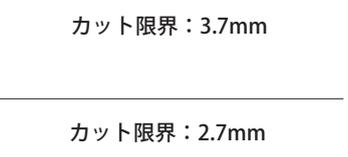


補綴コンポーネントのサイズとカット限界

アバットメント			サイズ		
カラー部高さ	カラー部高さ	カラー部高さ	カラー部高さ	カラー部直径	高さ (インプラントとの接合部から頭頂まで)
1.0mm タイプ	2.0mm タイプ	3.0mm タイプ	1.0mmタイプ	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 4.7mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.7mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 6.5mm	6.5mm
			2.0mmタイプ	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 4.7mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.7mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 6.5mm	7.5mm
ストレートアバットメント			3.0mmタイプ	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 4.7mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.7mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 6.5mm	8.5mm
1.0mm タイプ	2.0mm タイプ		1.0mmタイプ	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 4.5mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.4mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 6.5mm	8.7mm
			2.0mmタイプ	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 4.5mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.4mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 6.5mm	9.7mm
カントゥアアバットメント			※舌側は +1.5mm		
0.75mm タイプ	2.0mm タイプ		0.75mmタイプ	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 4.7mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.6mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 6.8mm	7.8mm
			2.0mmタイプ	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 5.0mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.9mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 7.0mm	9.0mm
カントゥアアバットメント			※舌側は +1.5mm		
ナロータイプ	ワイドタイプ		1.0mm	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 4.5mm 4.5mmD 用 : 5.5mm 5.7mmD 用 : 6.5mm	8.7mm
			2.3mm	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 5.5mm 4.5mmD 用 : 6.5mm 5.7mmD 用 : 7.2mm	8.7mm
ワイドラボアバットメント					
			1.0mm	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 4.7mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.7mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 6.5mm	8.3mm
			ゴールドアバットメント		
プラスチック	チタン		プラスチック 1.0mm	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 4.7mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.7mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 6.5mm	10.3mm
			プラスチック コンケーブ 2.0mm		11.1mm
テンボラリアバットメント			チタン 1.0mm	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 4.7mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.0mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 5.7mm	9.0mm
			1.0mmタイプ	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 5.0mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.0mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 5.7mm	8.8mm
			2.0mmタイプ	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 5.0mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.0mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 5.7mm	9.8mm
スクリー固定式アバットメント & コーピング			4.0mmタイプ	ブラットホーム 3.5mmD 用 : 5.0mm ブラットホーム 4.5mmD 用 : 5.0mm ブラットホーム 5.7mmD 用 : 5.7mm	11.8mm

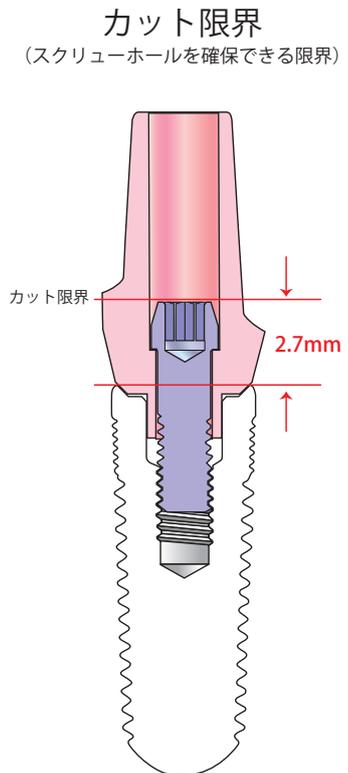

※上記カット限界は、ドライバーによるスクリー操作を行う上での条件です。セメントとの接触面積等、あらゆる条件をもとに設計してください。