


ドライバー系器具の使い分け

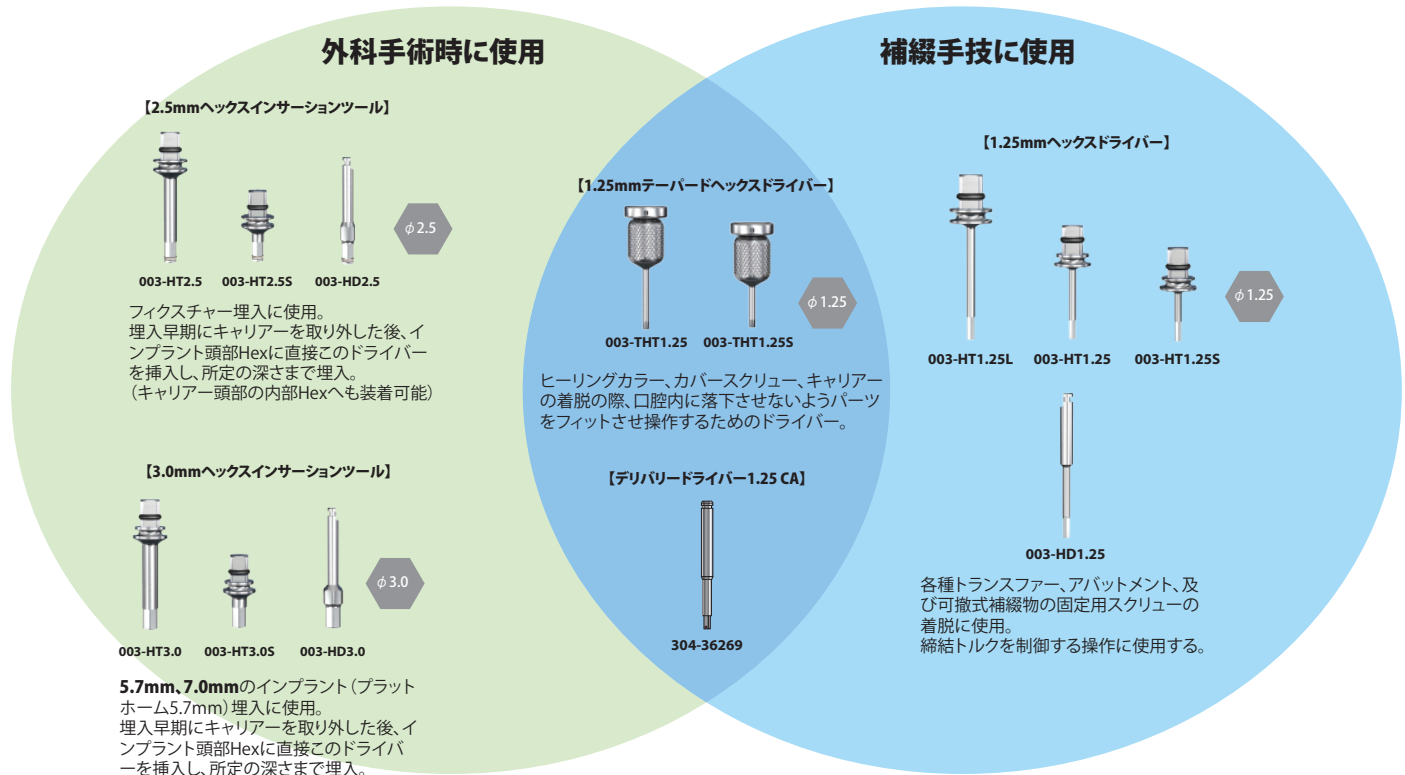

1.25mm ヘックスドライバーと 1.25mm テーパードヘックスドライバーの使い分け

Legacyインプラントのドライバーツールには、1.25mmヘックスドライバーと1.25mmテーパードヘックスドライバーがあります。ともに先端は六角(Hex)になっており、スクリューの着脱に用いますが、それぞれの使用目的が異なりますのでご案内いたします。

ドライバーの種類	先端形状 スクリューとの嵌合状態	特 長	使用目的
1.25mm ヘックス ドライバー		先端が六角柱になっており、スクリューのキャリア機能はない。また、ハンドル部分には4mmのスクエアが付与されており、トルクレンチとの組合せで使用する。	アバットメント、可撤式補綴物の最終締結に、トルクレンチとともに使用。 ※おもに補綴処置に使用。
1.25mm テーパード ヘックス ドライバー		先端部にテーパーが付与されており、スクリューが落下しないようキャリアする。ただし、トルクレンチとの併用ができず、強い締結には向かない。	カバースクリューやヒーリングカラーを口腔内で操作する際に使用。 ※おもに外科処置に使用。