


ドライバー系器具の誤飲防止について

1.25mm、2.5mm、3.0mm のドライバー系器具を口腔内で使用する際に、落下によるドライバーの誤飲を防止する必要があります。

上記器具にはハンドル部に「くびれ」がありますので、この部分に矯正用エラスティック等の O リング（内径 5mm 以下）を用いてデンタルフロスを固定します。

デンタルフロスを直接ドライバーに結び付けるより容易に固定でき、かつ容易に取り外すことも出来ます。誤って口腔内にドライバーを落下させても、デンタルフロスを持って拾い上げることができ、誤飲を防止します。

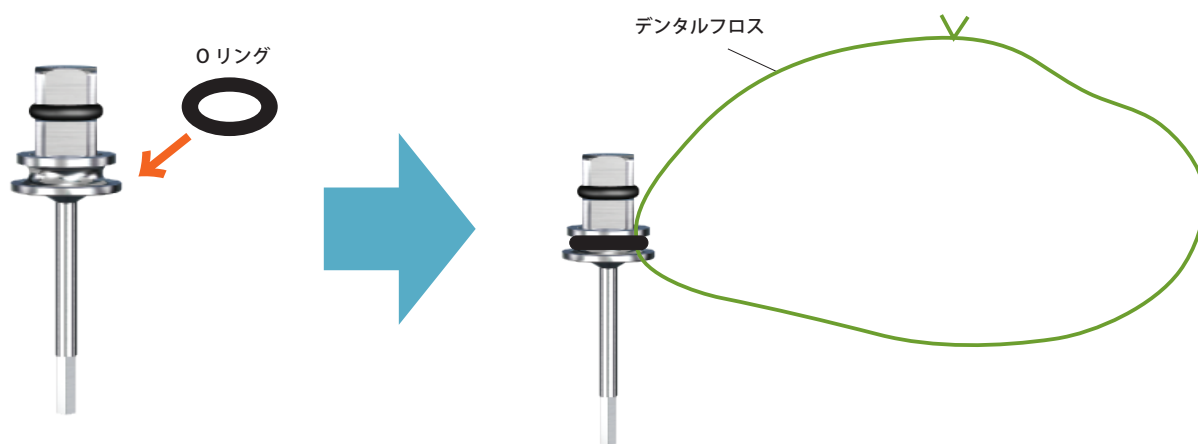

※矯正用 O リングはオートクレーブ滅菌ができませんのでご注意ください。