

Legacy™インプラントのプロビジョナル用コンポーネントについて

Legacy™インプラントには、プロビジョナル用のコンポーネントがラインナップされています。設計や固定法に応じての使い分けをご案内いたします。

設計	単冠	連結	
固定法	セメント固定式 or 可撤式	セメント固定式	可撤式
コンポーネント	<p>【コンケーブタイプ】</p>  <p>プラスチックテンポラリーアバットメント</p>	<p>【コンケーブタイプ】</p>  <p>プラスチックテンポラリーアバットメント</p>	 <p>チタンテンポラリーアバットメント</p> <p>チタンテンポラリーコーピング</p> <p>スクリュー固定式アバットメント</p>
備考	<p>セメント固定式の場合は、テンポラリーアバットメントを支台歯形成して使用します。 可撤式の場合は、テンポラリーアバットメントに直接レジンを築盛してクラウンを製作します。</p>	<p>テンポラリーアバットメントを支台歯形成して使用します。</p>	<p>チタン製のスリーブに直接レジンを築盛して製作し、インプラント、あるいはアバットメントにネジ留めします。</p>

※プラスチックテンポラリーアバットメントは、本体の材質、強度の点から口腔内での使用は28日(4週間)以内となっています。

プラスチックテンポラリーアバットメント使用上の注意

Legacy™用プラスチックテンポラリーアバットメントの使用上の注意は下記の通りです。

アバットメント(プラスチック部)を形成し、レジンを築盛する部分を粗造な面にした後、インプラントアナログとの接合部をワックスでブロックアウトします。(右図)

注意1 レジン築盛の際、**リキッドを予めアバットメントに塗布すると劣化のおそれがあります。絶対に行わないでください。**

注意2 プラスチックテンポラリーアバットメントは、使用目的が暫間用となっており、本体の材質・強度の点から口腔内での使用は**28日(4週間)以内**となっております。

