


## より正確なトランスファー印象を行うポイント


- ① 各個トレーは、製作後24時間で約4%収縮するため、余裕をみて**印象採得の2日前に完成**させておきます。

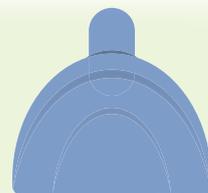

- ② トレー内面には**専用接着剤を印象材注入の5分、できれば10分以上前に塗布**します。接着剤は乾燥したほうが接着力が高くなります。



- ③ 歯牙の**アンダーカットはあらかじめ寒天印象材などでブロックアウト**します。寒天は硬化が早く、印象採得後の除去も容易です。

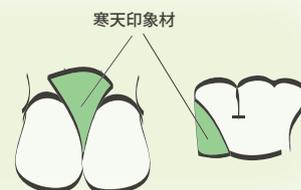


- ④ **印象材の温度が1℃下がる毎に硬化時間が7～8秒延びるので、余裕を持って作業するためには冷蔵庫での保管**をお勧めします。



- ⑤ 硬化後の歪みを最小限に抑えるため、**上顎の場合石膏は口蓋部には注入しません**。

※印象採得後2時間以上経過し、印象内の応力が十分に開放された状態で石膏を注入します。

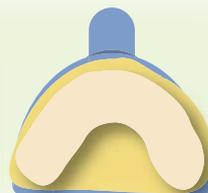

- ⑥ **石膏注入後24時間経過した後**に印象トレーから取り外し、**12時間自然乾燥**させてから操作します。

※印象内で石膏を硬化させ、硬化による歪みを抑えます。また、印象内では石膏内の水分が蒸発しにくいので、トレーから除去した後十分に乾燥させます。

