

歯科界のトップブランド「KaVo Kerr」グループのインプラント

KaVo Kerr
Group

Implant Direct
simply smarter.

The Implant Direct Joint Venture is part of the KaVo Kerr Group



革新をその手に。
Legacy™ System

レガシー システム

レガシー2、レガシー3 同時新発売

KaVo KerrグループImplant Direct社のLegacyシステムに、Legacy2、Legacy3
インプラントをラインナップし、シリーズが一挙に充実いたしました。
欧米市場において急激に成長している同社の基幹商品がいよいよ日本上陸です。




Legacy2

Legacy3

- ネック部のミニスレッドによる埋入ストレス軽減と骨のダウングロス抑制
- バトルレス(鋸刃型)スレッドによる応力分散
- 選択できるテーパ形状
- 豊富なサイズバリエーション(直径は3.7mm、4.2mm、4.7mm、5.2mm、5.7mm、7.0mmの6種類)

高いコストパフォーマンス!

- インプラントパッケージ内のパーツの充実

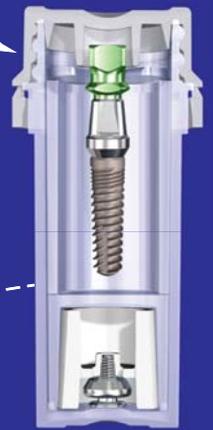

例: Legacy3

オールインワンパッケージ



インプラント



チタン製キャリアー
／トランスファー



カバースクリューを付属のエクステンダーに通して装着すれば、歯肉貫通のスペーサーとして機能します。



エクステンダー



カバースクリュー

販売名: Legacy2,3 インプラント
承認番号: 22700BZ100018000

- インプラント治療の導入
 - システムバリエーションの拡大
 - インプラントの増患
- をお考えの先生へ

ぜひお問い合わせください。
説明員がお伺いいたします。



03-5850-8555 (代表)

製造販売元



株式会社 インプラテックス

いつも、となりに

インプラテックス

検索




※ WEBサイトを一新いたしました!




Legacy1-3は、表面にSBM(可溶性HA粒子をプラスチック)処理を施し、骨接触率を高める。

レガシー2 Legacy™ 2

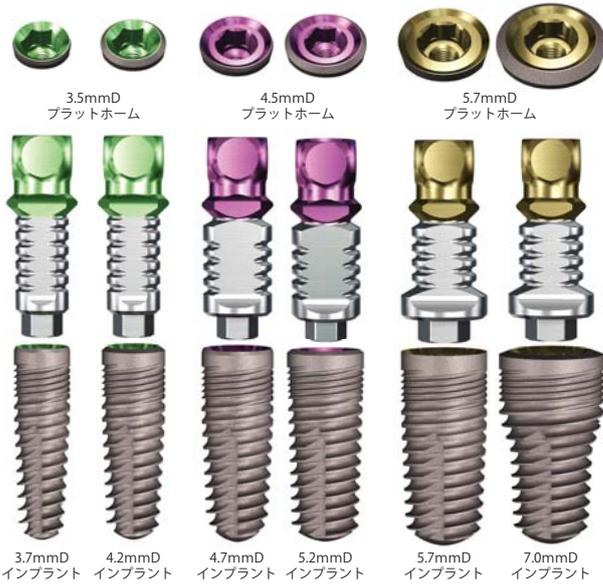

3mmの平行部

テーパボディ
埋入深度の調整を可能にする平行部を設け、主に下顎へ適用。

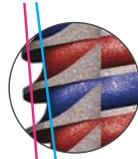

スレッドの外側と内側ではテーパ角度に5°の差があり、先端ほど谷が深くなる設計。旧来のベントを廃し、先端部位のスレッドを深くすることで、より高い初期固定を実現。



インターナルHex構造

インターナルHex(内部六角)構造のプラットホームで、周囲のベベルによるプレジジョンフィットで高精度の連結を実現。

ミニスレッド(四条)

スレッド頂点間隔0.4mm

スレッドであるため埋入時ストレスを軽減し、さらに骨のダウングロスを抑える。

ダブルリードスレッド(二条)

スレッド頂点間隔0.8mm

バットレス(鋸刃)スレッドにより、応力を分散。

カッピンググループ

3本のカッピンググループを垂直的に付与。

【付属品】



チタン製キャリア／トランスファー



エクステンダー



カバースクリュー



インプラント


← 豊富なサイズバリエーション →
※長さは各直径 8-10-11.5-13-16mmL です。

レガシー3 Legacy™ 3



1mmの平行部

テーパボディ
全体的にテーパを設け、骨孔側壁を圧縮して埋入。主に上顎へ適用。

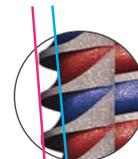

スレッドの外側と内側ではテーパ角度に3°の差があり、先端ほど谷が深くなる設計。旧来のベントを廃し、先端部位のスレッドを深くすることで、より高い初期固定を実現。



インターナルHex構造

インターナルHex(内部六角)構造のプラットホームで、周囲のベベルによるプレジジョンフィットで高精度の連結を実現。

ミニスレッド(四条)

スレッド頂点間隔0.4mm

スレッドであるため埋入時ストレスを軽減し、さらに骨のダウングロスを抑える。

ダブルリードスレッド(二条)

スレッド頂点間隔0.8mm

バットレス(鋸刃)スレッドにより、応力を分散。

カッピンググループ

2本のカッピンググループを垂直的に付与。

【付属品】



チタン製キャリア／トランスファー



エクステンダー



カバースクリュー



インプラント

← 豊富なサイズバリエーション →
※長さは各直径 8-10-11.5-13-16mmL です。

